



感染予防は手洗いから・・・手洗い方法の確認に

手洗い チェッカー LED

専用ローションを手についた汚れに見立てて、専用ライト下で光らせます。

適切な手洗いが実施できているか確認できます。

専用ライトはLEDを採用していますので、従来の蛍光灯タイプと比較して電池寿命が約4倍長持ちします。



洗い残しが光ります

セット内容


① 手洗いチェッカー 本体

② ブラックライトLED

乾電池は付属しておりません。
単3乾電池×4本は別途お買い求めください。

③ 手洗い用石けん液
シャボネットユ・ムP-5
250mL 1本

④ 手洗いチェッカーローション 230mL 2本

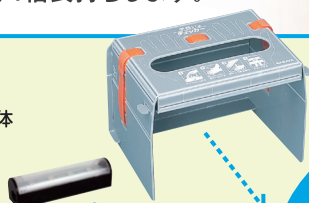

コンパクトに
収納できます



単品でも取り扱っています。

ブラックライトLED

手洗いチェッカーLED付属専用ライトの単品商品です。
既にご購入の「手洗いチェッカー」にも使用可能です。

※本商品には乾電池は同梱されていません。単3乾電池×4本は別途お買い求めください。




手洗いチェッカーの使用法



専用のローションをワンプッシュ
(約1mL)手に取り、まんべんなく塗り広げます。



手洗い用石けん液を使って、
普段通りの手洗いを行います。

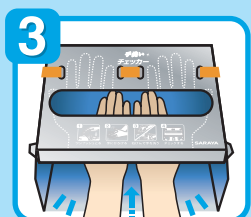

専用ライトを取り付けた本体に
手を入れます。



洗い残した部分が光ります。

| 品名 | 内容量 / 規格 | 1梱入数 | 商品コード | JANコード |
|-----------------------|------------|------|-------|------------------|
| 手洗いチェッカーLED | 1セット | 1 | 41336 | 49-87696-41336-8 |
| ブラックライトLED | — | 1 | 41357 | 49-87696-41357-3 |
| 手洗い用石けん液 シャボネットユ・ムP-5 | 250mL ポンプ付 | 24 | 23259 | 49-87696-23259-4 |
| 手洗いチェッカーローション | 230mL ポンプ付 | 12 | 41337 | 49-87696-41337-5 |

安全にご使用 いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2024年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>