

恒温・攪拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を引き出します。

恒温浸漬槽 TB-35



洗浄ポケット(付属品)



500mLの計量カップ(付属品)

特 徴

① 酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。

- 浸漬液を40℃まで加温、恒温します。
- 攪拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。

② どなたでも簡単にご使用いただけます。

- 電源スイッチをONにするだけで自動運転します。
- 運転中の状態を表示ランプでお知らせします。

③ 洗浄ポケットと計量カップを付属しています。

- 鋼製小物や用具置き場として『洗浄ポケット』を1個付属します。
- 洗浄剤を計量するための『計量カップ』を1個付属します。



恒温浸漬槽TB-35と
サラヤ キャスターラック(セット例)
※ 洗浄剤は含まれておりません。
※ サラヤ キャスターラックは別売品です。

使用方法

- ① 浸漬槽内に給水します。
- ② 洗浄物の汚れの程度に応じて、浸漬槽内に適量の洗浄剤を注入し、洗浄液を調製します。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。
- ④ 温度安定ランプ点灯後、浸漬槽内に洗浄物を浸漬し、洗浄開始します。
- ⑤ 洗浄完了後、電源スイッチをOFFにして、浸漬洗浄していた洗浄物を取り出します。
- ⑥ 排水ホースを排水口に向け、洗浄液を排出します。

洗浄力テスト

	10分	20分	30分	60分
20℃				
40℃				

パワーquick酵素系浸漬洗浄剤の1%洗浄液と洗浄評価インジケータ-TOSI®を用いてテストを行いました。

20℃では60分間以上かかりますが、40℃では30分間の浸漬で汚れは全て除去されました。

【サラヤバイオケミカル研究所による洗浄力テスト方法】

評価方法：洗浄評価インジケータ-TOSI®(Pereg社、ドイツ)を用いて洗浄評価を実施。水道水で使用濃度に調製した洗浄液にTOSI®を2枚ずつ投入し、①20℃で、10分、20分、30分、60分間浸漬、②40℃で10分、20分、30分間浸漬。浸漬後、水道水ですすぎ、残留タンパク検出液で染色した後、目視で評価。

製品仕様

名称		恒温浸漬槽 TB-35	サラヤ キャスターラック (別売品)	
型式		TB-35	—	
外觀寸法 (mm)	浸漬槽	W422×D650×H230 (mm)	W553×D733×H800(mm)	
	制御ユニット	W170×D182×H225 (mm)		
	洗浄ポケット	W170×D125×H140 (mm)		
製品質量		約10kg	約14kg	
洗浄水量		31L~35L	—	
材質	筐体	SUS304、他	SUS304、他	
	ラベル	PET、PP、他	—	
	基板 (ハンダ)	ガラス・エポキシ樹脂 (鉛フリー合金)	—	
	パッキン	シリコン	—	
	排水ホース	シリコン	—	
	排水継手	POM	—	
	キャスター	—	ナイロン、SUS、他	
	ねじ	—	SUS	
その他	棚数	—	2段	
	最大荷重	—	100kgまで	
電源	定格電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	—	
	定格消費電力	加温時	約1010W	—
		非加温時	約10W	—
	コード長さ	約1.8m	—	
排水ホース		約600mm	—	
使用環境温度		10~40℃	—	
使用環境湿度		30~85%RH (但し、結露無きこと)	—	
使用薬剤		パワーquick 酵素系浸漬洗浄剤 パワーquick 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 パワーquick 多酵素浸漬洗浄剤 弱アルカリ性・低起泡性 パワーquick マルチ用酵素洗浄剤 弱アルカリ性	—	

※ 恒温浸漬槽TB-35には洗浄ポケットが1個付属されていますが、追加でお買い求めいただくことができます。詳しくはお問い合わせください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
恒温浸漬槽 TB-35	35L	1	50319	49-87696-50319-9
サラヤ キャスターラック	—	1	50329	49-87696-50329-8



安全にご使用
いただくために

- 製品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、「施工説明書」や「注意ラベル」などの内容も併せてご確認ください。
- 当社指定の薬液をご使用ください。他社の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2014年9月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>