

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



TOURNIQUET

サラヤ ターニケット

清潔で安全な

ディスポーザブルタイプの駆血帯です



1巻
25本分入

商品特徴

幅広サイズ

広い面で巻きつけるため、皮膚の弱い方など、患者様へのご負担を減らすことができます。

ラテックスフリー

ラテックスアレルギーの方にも安心してお使いいただけます。

※全ての方にアレルギーがおきないというわけではありません。

無香料

処置時に気にならない無香料です。

エンボス加工

表面が凹凸加工のため、すべりにくくなっています。

ミシン目付き

ミシン目で切り離してお使いいただけます。

安心感のあるカラー

採血前などの緊張を緩和させるやさしいピンク色です。

サラヤは駆血帯の ディスポーザブル化を 推奨します

患者間、病棟間をまたいで用いられる駆血帯の多くは、MRSA、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、コアグララーゼ陰性ブドウ球菌、アシネトバクター属、カンジダ等の微生物や血液で汚染されているという報告があります*。患者間での駆血帯の共用は、微生物伝播のリスクとなる可能性があるため、ディスポーザブルタイプの駆血帯の使用をおすすめします。



*参考文献

- 1) WHO guidelines on drawing blood: best practice in phlebotomy, 2010
- 2) Reducing the potential for phlebotomy tourniquets to act as a reservoir for methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Leitch A, McCormick I, Gunn I, Gillespie T : Journal of Hospital Infection, 63 : 428-431, 2006
- 3) Potential risk of cross-infection during peripheral-venous access by contamination of tourniquets. Golder M, Chan CLH, O'Shea S, Corbett K, Chrystie IL, French G : Lancet, 355(9197) : 44, 2000
- 4) Tourniquets and nosocomial methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Berman DS, Schaefer S, Simberloff MS, Rahal JJ : The New England Journal of Medicine, 315(8) : 514-515, 1986
- 5) Poor hospital infection control practice in venepuncture and use of tourniquets. Rourke C, Bates C, Read RC : Journal of Hospital Infection, 49(1) : 59-61, 2001
- 6) Blood contamination of tourniquets used in routine phlebotomy. Forseter G, Joline C, Wormser GP : American Journal of Infection Control, 18(6) : 386-390, 1990

Case1

血液汚染リスクの高いエリアに

例) 人工透析室、救急外来、採血室、
血管造影(アンギオ)室など

Case2

感染症リスクの高いエリアに

例) ICU、血液内科など
感染症病棟や接触感染対策が必要な
患者様に

こんな時に
ディスポーザブル
タイプを

その他、災害備蓄や献血バス、救急車等でのご使用に

サラヤターニケットの巻き方



1 穿刺部位の上部7~10cmを目安にターニケットの片側(写真矢印部)を長めに持ち、腕の裏側に通す。



2 長めに持った方を下から上に交差させる。



3 交差させたまま、引っ張った状態で長い方のターニケットを下にくぐらせて固定する。



4 完成。外す際はくぐらせた側の端(写真矢印部)を引っ張ると外れる。

使用上の注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、使用は一回限りとしてください。
- 品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。
- 使用期限(未開封)は3年(目安)です。

仕様

| | |
|-----|---------------------|
| サイズ | 幅25mm × 長さ450mm(1本) |
| 材質 | スチレン系エラストマー(TPE) |
| カラー | ピンク |

本製品は未滅菌のため、使用前に滅菌が必要な場合は、オートクレーブの使用が可能です。滅菌バッグに入れてから滅菌してください。121℃20分・135℃10分に対応しています。

| 品名 | 内容量 / 規格 | 1梱入数 | 商品コード | JANコード |
|-----------|-----------|------|-------|------------------|
| サラヤターニケット | 1巻(25本分入) | 20 | 45320 | 49-87696-45320-3 |

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年10月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00~18:00)