

パワークイック

ジェット洗浄機・
超音波洗浄機 兼用



洗浄機用洗浄剤 アルカリ性

血液・体液などのタンパク汚れや脂質等を
速やかに除去します。

低腐食性

無泡性

無リン

特長

- アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質あるいは脂質を速やかに除去します。
- 無泡性なのでジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。



6kg

パワークイック 洗浄機用洗浄剤 アルカリ性

容量	6kg	1梱入数	3
JANコード	49-87696-50242-0		

使用方法 洗浄機の水量にあわせて、本品の注入量を調節してください。
ジェット洗浄機・超音波洗浄機 … 0.2～0.5% (10Lの水に対し20～50mL)

成分 水酸化カリウム、ケイ酸塩、カルボン酸塩

性状 外観 …… 無色～微黄色・透明液体
臭気 …… 原料臭
液性 …… アルカリ性

使用上の注意

- 用途以外には使用しない。●子供の手の届かないところに保管する。●作業時は必ず保護メガネ、およびゴム手袋を着用する。
- 他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●他の容器に移し替えて使用しない。●キャップを開けると液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚につく恐れがある。●倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。●樹脂の種類やメッキ製品等金属の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。

応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがある。●液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。

SARAYA

● ISO/TC198 による洗浄力試験

モデル汚れ		試験結果★	
羊脱線維素血液	100部	洗浄剤なし	×
卵黄	100部		
ムチン	2部	洗浄剤あり	○

○：十分な洗浄力
 ×：洗浄不足
 ★：卓上型ウォッシャーディスインフェクター使用

● アルミ材質にも使用可能

アルミに対する腐食性

浸漬溶液 (0.2%)	平均腐食度 (g/cm ² /min)	平均侵食度 (cm/100日)
当社品	8.9×10^{-7}	0.0474

耐食性の評価基準

順位	100日間の侵食度	耐食性の評価	} 実用可能範囲
I	0.001cm以下	完全なる耐食性	
II	0.010cm以下	十分なる耐食性	
III	0.100cm以下	耐食性小	
IV	0.100cm以上	耐食的でない	

山本洋一, 日本学術振興会編, 金属防蝕技術便覧, p63, 1959

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がりが上、現品と色合いが若干異なります。