

サラヤ **プラスチックエプロン** (袖なし)  
DISPOSABLE PE APRON/50枚入

サラヤ **プラスチックガウン** (袖つき)  
DISPOSABLE PE GOWN/15枚入

**飛沫、接触感染の防御**

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。



- 標準予防策では、湿性生体物質の跳ね返りやしぶきが生じる手技・患者のケアを行う場合、皮膚と着衣を保護するためにエプロンまたはガウンを着用します。
- エプロンまたはガウンは、最も汚染されやすい体幹全面を覆い、防水性であることが求められます。
- 脱衣時は、汚染面に触れないように注意し、廃棄後は、手洗いをしっかり行うことが重要です。

**SARAYA**

## 特徴

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。

## 用途

- (1) 患者のケア中に、血液、体液等の感染の可能性がある湿性生体物質が、衣類や皮膚に飛散したり跳ね返る可能性がある場合
- 嘔吐、吐血や喀血のある患者のケア時
  - 気管吸引時
  - 接触感染する微生物が検出されている患者への濃厚接触時(全身清拭など)
  - 広範な熱傷や開放創などの処置ケア時 など
- (2) 湿性生体物質や汚染した器材の片付け、洗浄・消毒時
- 排吐物、尿や便などの湿性生体物質の処理時
  - 医療器材等の洗浄・消毒時 など

\* 使用状況に応じて、エプロンとガウンを使い分けます。  
ガウンは、主に

- 衣類の前腕部を汚染しやすい処置を行う場合
- 飛散する血液、体液が非常に多い場合
- 罹患した場合に重篤になる場合

- 感染力が強いノロウイルスや角化型疥癬の患者に接触する場合
- 医療従事者の制服のホコリが患者に対して完全遮断が必要な場合 など

## 注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、1回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、汚染部分に触れないように廃棄してください。
- 本品は未滅菌です。

## 着脱方法

### プラスチックエプロン(袖なし)〔例〕

#### 着け方



- ① 首の部分を持ってかぶる  
② 腰ひもを結ぶ


#### 外し方



- ① 首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る  
② エプロンの表側が内側になるようにして腰ひもの高さまで2つに折り込み、表側に触れないよう注意しながら両手でエプロンの裾をすくい上げる  
③ 表側が内側になるようまとめる  
④ 体の前方へ強く引いて腰ひもを切り、エプロンの表側に触れないよう注意しながら、廃棄する


### プラスチックガウン(袖つき)〔例〕

#### 着け方

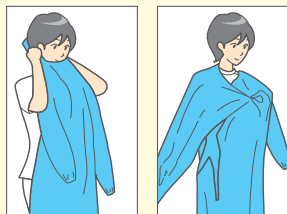


- ① 首の部分を持ってかぶる  
② 片腕をガウンの袖に通す

#### 外し方

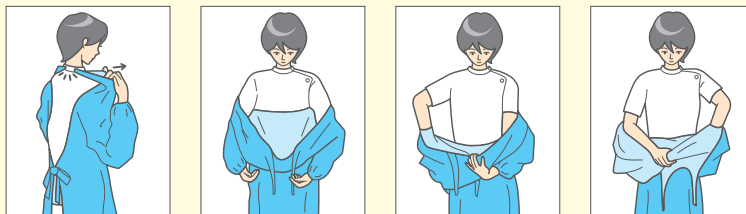

- ① 首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る  
② ガウンの表側に触れないよう注意し、裏返すようにして脱ぐ  
③ ガウンの裏側を持ち、片腕を抜く  
④ 反対側の腕も同様に抜く

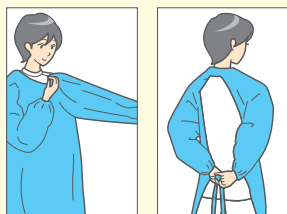

- ③ 反対の腕をもう片方の袖に通す  
④ 腰ひもを結ぶ



- ⑤ 表側が内側になるようまとめて体の前方へ強く引き、腰ひもを切る  
⑥ さらに小さくたたんで廃棄する

品名	内容量 / 規格	1コ標準価格(税抜)	1梱入数	JANコード
プラスチックエプロン 袖なし ブルー	50枚入/フリー	オープン価格	20	49-87696-51063-0
プラスチックエプロン 袖なし ピンク	50枚入/フリー	オープン価格	20	49-87696-51076-0
プラスチックエプロン 袖なし ホワイト	50枚入/フリー	オープン価格	20	49-87696-51077-7
プラスチックガウン 袖つき ブルー	15枚/フリー	オープン価格	10	49-87696-51064-7

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がりが上、現品と色合いが若干異なることがあります。

発売元

**SARAYA** サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

TEL.06-4706-3938

サラヤ株式会社 学術部  
(受付時間：平日 9:00~17:00)