




「サラヤ 針捨てBOX 1.4L」スライダーの使い方

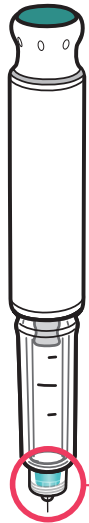

ペン型注入器用針を
外す際には、
BOX奥の
スライダーを
ご使用ください。

ペン型注入器用針

スライダー

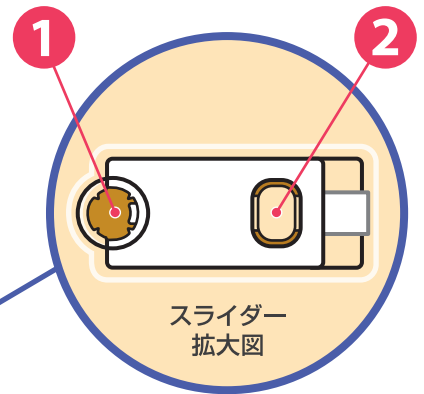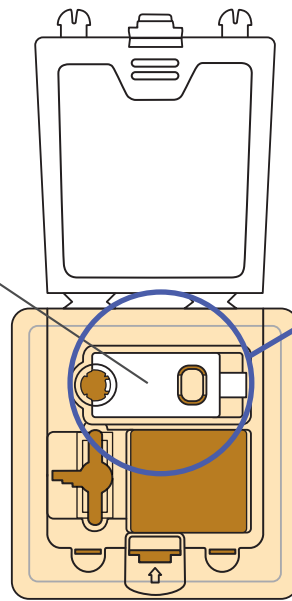


スライダー
拡大図







スライダーをご使用の際は、
手袋を着用してください。

ペン型注入器用針

針捨てBOX奥のスライダーをご使用ください。

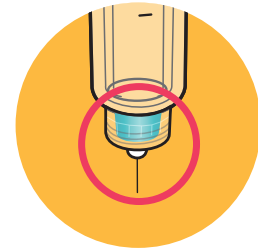


- 1 スライダーボタン②を
押しながら左に動かし、
針の外し口①を閉じま
す。
- 2 閉じた針の外し口①に
ペン型注入器の先端を
垂直にまっすぐ差し込
みます。
- 3 ペン型注入器を左回り
に回して、注射針を外し
ます。
- 4 スライダーボタン②を押
しながら右に引くと外し
口①が開き、針が針捨て
BOX内に落ちます。

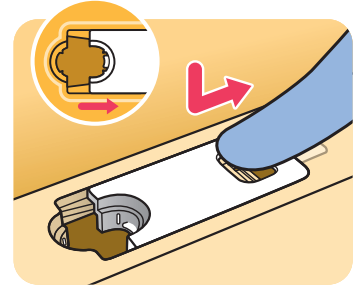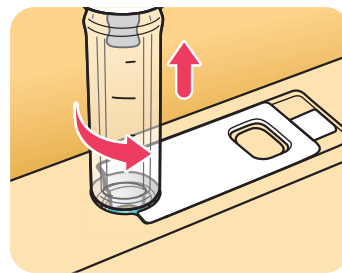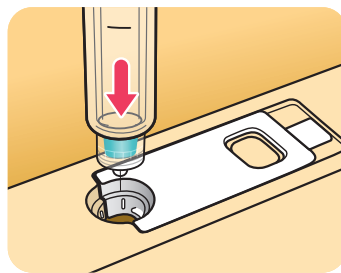
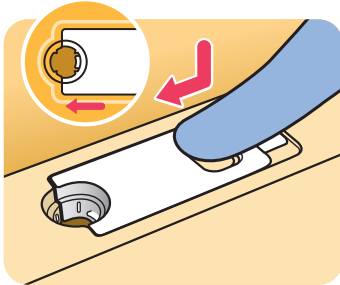


ペンニードル® プラスを使用される場合

スライダー外し口のツメ4点とペンニードル®プラス
の凹形状の溝(右記イラスト○印)が合うよう、ペン型
注入器本体を挿入してください。

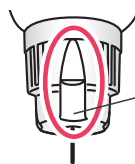

ペンニードル®
プラスの
凹形状の溝
4箇所

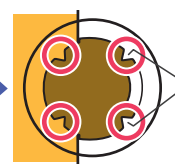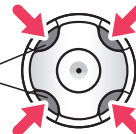

スライダー
外し口の
ツメ4点

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 (受付時間: 平日 9:00~18:00)

KAT/66-2848-01-M