

安全なエプロンの着け方と外し方 围裙的正确穿脱方法 Safe Donning and Removal of Apron


着け方 如何穿上 Donning



1 挂上头部

Put on the apron around the neck.

エプロンを首にかける

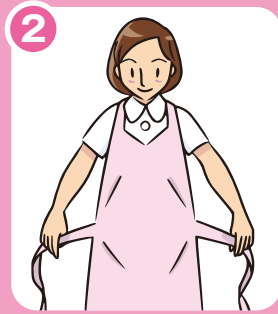

2 围住腰

Take the waist strings.

腰ひもを広げる



3 在腰后系上


Tie the strings in the back.

腰ひもを後ろで結ぶ

Key point 重点

- 新品のエプロンを使用する
- エプロンの表面に素手で触れないように外す
- エプロンを外した後、手指衛生を行うこと
- 毎次使用新品
- 脱下围裙时请不要接触围裙表面
- 脱下围裙之后请做手卫生消毒
- Always use a new apron.
- Do not touch the front surface of the apron with bare hands when removing the apron.
- Perform hand hygiene after removing the apron.

外し方 如何脱下 Removal

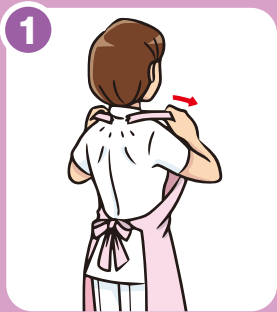

1 扯断套上头上的带子

Pull and tear off the neck string.

首ひもをちぎる



2 在腰部把污染面折进内侧

Fold the apron at the height of the waist, making the contaminated surface to be inside.

汚染面が内側になるよう腰のあたりで折りたたむ



3 整理成适当的大小

Fold up to the size easy to hold.

適当な大きさにまとめる



4 扯断系在腰上的带子并废弃

Pull and tear off the waist strings, then discard to the waste container.

腰ひもをちぎって外し、廃棄する