

安全なガウンの着け方と外し方

着け方

1



ガウンを首にかける

2



袖を通す

3



腰ひもを後ろで結ぶ

point

- 新品のガウンを使用する
- ガウンの表面に素手で触れないように外す
- ガウンを外した後、手指衛生を行うこと

外し方

1



首ひもをちぎる

2



汚染面が内側になるよう腰のあたりで折りたたむ

3



袖から両腕を抜く

4



適当な大きさにまとめ、腰ひもをちぎって外し、廃棄する