



サラヤプラスチック手袋 TPE



PLASTIC DISPOSABLE GLOVES

Personal Protective Equipment

特長

- 左右兼用タイプのため、ムダなく使えて経済的です。
- すべりにくいエンボス加工で、細かな作業に適しています。

食品衛生法適合品
(厚生省告示 第370号)

用途

おむつ交換

吸引処置

汚物・吐物の処理

施設内での作業、清掃

食品等の取り扱い



クリア
200枚入
サイズ/S・M・L

パウダーフリータイプのため、
粉による手荒れが気になる方にも安心です。

サラヤプラスチック手袋 TPE ブルー

- 異物混入しても発見しやすい青色手袋

ブルー
200枚入
サイズ/S・M・L



着脱方法

着け方

外し方

① 手首の部分をつかんで装着する

② 片方の手袋の袖口をつかむ

③ 手袋を裏表逆になるように外す

④ 裏表逆になるように外す

⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する

感染防御のポイント

- 手袋の表面に触れないように手袋を外しましょう。汚染されている可能性があります。
- 手袋を着ける前や、手袋を外した後は、必ず手洗いや手指消毒をしましょう。
- 血液や体液（唾液や排泄物など）に触れる作業前には、必ず手袋を装着しましょう。
- 手袋の使用は一回限りにしましょう。また、手袋を着用したまま手洗いをしたり手指消毒をすることは避けましょう。

手袋サイズ早見表

この表で手幅を計り手袋サイズの目安を出します

① 人差し指を青のラインに合わせ

② 右手の人差し指の付け根部分で重ね合わせる

S M L

手の甲の右はじと赤線が合った所がおおまかなサイズとなります。

※製品により多少誤差の出る場合があります。

使用上の注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、使用は一回限りとしてください。
- 品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

サイズ	S	M	L
全長(mm)±5mm	245	250	265
掌幅(mm)±5mm	100	105	125
中指の長さ(mm)±5mm	75	77	82

仕様

パウダーフリー

材質

ポリエチレン熱可塑性エラストマー(TPE)

サイズ

S・M・L

タイプ

パウダーフリー 左右兼用

カラー

クリア、ブルー

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤプラスチック手袋TPE クリア	200枚 / Sサイズ	30	50975	49-87696-50975-7
	200枚 / Mサイズ		50976	49-87696-50976-4
	200枚 / Lサイズ		50977	49-87696-50977-1
サラヤプラスチック手袋TPE ブルー	200枚 / Sサイズ	30	50971	49-87696-50971-9
	200枚 / Mサイズ		50972	49-87696-50972-6
	200枚 / Lサイズ		50973	49-87696-50973-3

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938

(受付時間：平日 9:00～18:00)