



サラヤニトリル検査検診用グローブLT

見分けやすいサイズ別カラーコード



カラー：ホワイ
サイズ：XS, S, M, L

PPEホルダー使用でさらに便利

PPEホルダーでのご使用例



**サラヤ
PPEホルダー**
(ステンレス製)
手袋・エプロン用
※ホルダーの裏には
強力マグネット付

商品コード:51088

サイズ(mm):W244×D105×H141
入数:12


仕 様

サイズ	XS	S	M	L
全長(mm)	≥240			
手のひら幅±5(mm)	76	86	98	107
厚み(mm)	指先:0.08±0.03			
	手のひら:≥0.05			
ピンホール品質基準	AQL 1.5			
引張り強度(MPa)	老化前≥18			
	老化後≥16			
最大伸長度(%)	老化前≥500			
	老化後≥400			

着脱方法


※手袋を外すときは、汚染面が素手に触れないように注意し、廃棄後は手指衛生をしっかりと行うことが重要です。

着け方

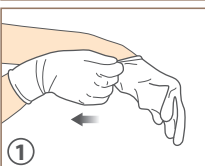


①
手首の部分を
つかんで装着する


外し方

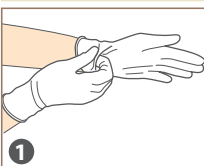


①
片方の手袋の
袖口をつかむ

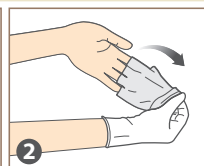


②
手袋を裏表逆に
なるように外す

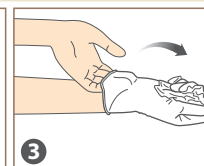

③
手袋を外した手を
反対の手袋の袖口に
差し込む

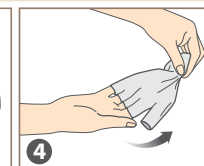

④
裏表逆になるように
外す

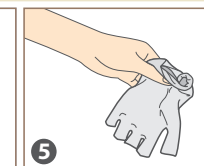

⑤
外した手袋はすぐに
廃棄する

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
ニトリル検査検診用グローブLT ホワイト	300枚入 / XS	10	51046	49-87696-51046-3
	300枚入 / S		51047	49-87696-51047-0
	300枚入 / M		51048	49-87696-51048-7
	300枚入 / L		51049	49-87696-51049-4

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/


お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)

NITRILE EXAMINATION GLOVES

サラヤニトリル検査検診用グローブ LT

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 届出番号：27B1X00120000201

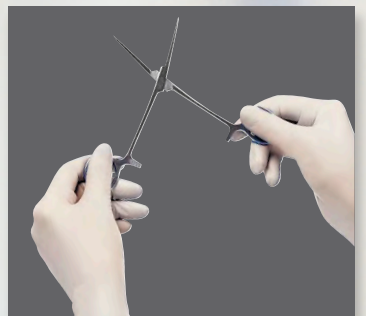


Personal Protective Equipment

作業性を考慮したフィット感とグリップ感に加え、
医療分野で求められる機能性を兼ね備えたニトリル手袋です。

- 優れたバリア性
(耐薬品性、血液不浸透性、抗がん剤耐性)
- パウダーフリー・ラテックスフリー
- 指先すべり止め加工
- めくり上がり防止カフ
- 未滅菌
- 左右兼用
- ディスポーザブル(単回使用)



滑り止め加工

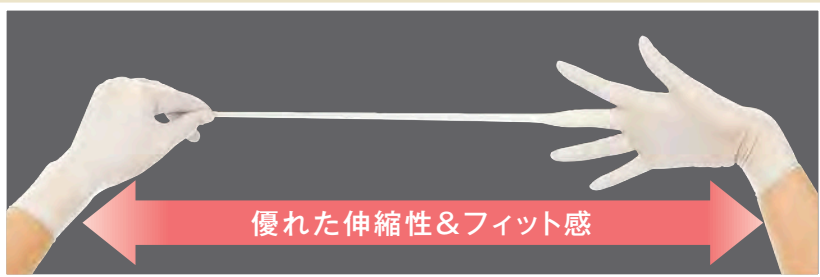

優れた伸縮性&フィット感


300枚入の大容量

当社従来品(200枚入): 個箱の厚さ75mm
本品(300枚入): 個箱の厚さ86mm
空き箱廃棄量が約30%削減され、箱の交換頻度も低減します。


※当社既存のPPEホルダーにも設置可能です。

取出しやすさの向上

1枚ずつ互い違いに手袋を重ねる梱包技術を採用(特許取得済)。
手袋同士が絡まり一度に複数枚まとまって出てきてしまう
可能性を低減しています。

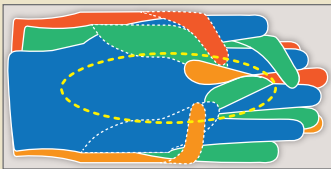

(従来品) 一方向重ね

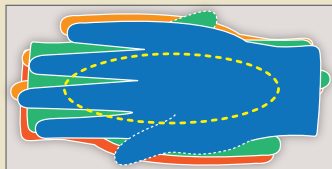


(本品) 互い違い重ね

人間工学に基づく取出口設計

手袋の残量に合わせて取出口の大きさを
選べます。



取出口の
大きさが
選べます

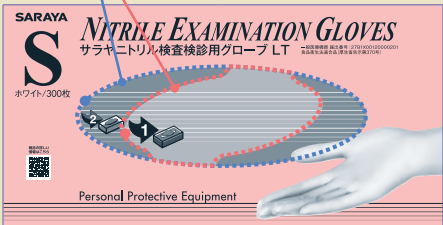

用途

湿性生体物質に接触する可能性のある場合や傷・粘膜に触れる場合など、さまざまな場面でお使いいただけます。

- 採血 ● 創傷処置 ● 注射剤のミキシング ● 汚物・吐物処理 ● 器材の洗浄・消毒
- 気管吸引 ● 環境整備



サラヤニトリル検査検診用グローブLT 物性データ (各サイズ共通)

バリア性

試験項目	評価結果
水酸化ナトリウム (40%) : EN374-3	>480 分
血液由来病原体透過性 : ASTM F1671	合格

抗がん剤耐性試験 : ASTM D6978-05

試験薬剤	濃度	透過時間
カルムスチン	3.3mg/mL	14.1 分
シスプラチン	1.0mg/mL	>240 分
シクロホスファミド	20.0mg/mL	>240 分
ダカルバジン	10.0mg/mL	>240 分
ドキシソルビシン塩酸塩	2.0mg/mL	>240 分
エトポシド	20.0mg/mL	>240 分
フルオロウラシル	50.0mg/mL	>240 分
メトトレキサート	25.0mg/mL	>240 分
マイトマイシン C	0.5mg/mL	>240 分
パクリタキセル	6.0mg/mL	>240 分
チオテパ	10.0mg/mL	24.5 分
ピンクリスチン硫酸塩	1.0mg/mL	>240 分

刺激と感作性 : ISO-10993-10

試験項目	評価結果
一次皮膚刺激 グローブが接触する皮膚への刺激評価	無刺激
感作性試験 グローブからの抽出物による、皮膚感作 (TypeIV: 遅延型過敏症免疫反応) について評価	目に見える変化なし