

医 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

サラヤ プラスチック手袋粉無

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、塩化ビニル樹脂を主材料とする、左右兼用タイプ使い捨て手袋である。パウダー無し、未滅菌である。

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm) ±5mm	240			
掌幅 (mm) ±5mm	75	85	95	105

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

【使用方法等】

個装箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

- 爪先、刃物等、尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 手袋の主材料である塩化ビニル樹脂は熱により破損するおそれがあるため、60℃以上の熱いものには触れないこと。
- 薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- 感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないこと。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- 植物油、灯油等油類がついた場合は早めに交換してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

使用期限

使用の期限は包装に記載する。(側面バーコード、EXP DATE)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サラヤ株式会社
所在地 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
電話番号 06-6797-2525