

サラヤ プラスチック手袋 EVA



PLASTIC DISPOSABLE GLOVES EVA

Personal Protective Equipment

- 柔軟性と弾力性に優れた素材です。
- 薄く、ひっぱると指先にフィットしますので、細かな作業にも使えます。
- 左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。

ひっぱると

指先にフィット



入数 / 200 枚入
サイズ / S・M・L

おむつ交換

汚物・吐物の処理

吸引処置


厨房での作業、清掃

などに。

食品衛生法適合品（厚生省告示 第370号）


着脱方法（例）

着け方

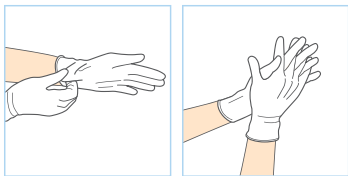

- ① 手首の部分をつかんで装着する
- ② 指先部分をフィットさせる。

外し方

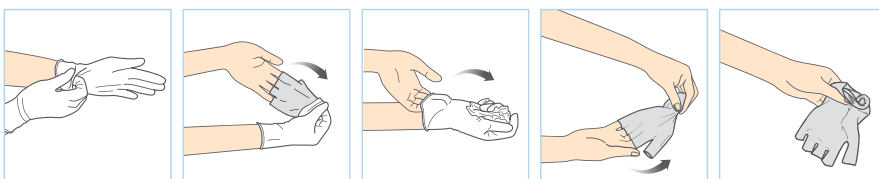

- ① 片方の手袋の袖口をつかむ
- ② 手袋を裏表逆になるように外す
- ③ 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む
- ④ 裏表逆になるように外す
- ⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する

手袋サイズ早見表

この表で手幅を計り手袋サイズの目安を出します

① 人さし指を青のラインに合わせ

② 右手の人差し指の付け根部分で重ね合わせる

S M L

手の甲の右はじと赤線が合った所がおおまかなサイズとなります。

※製品により多少誤差の出る場合があります。

手袋サイズ表

サイズ	S	M	L
全長(mm)±5mm	280		
掌幅(mm)±5mm	110	115	120
中指の長さ(mm)±5mm	75	81	85

仕様

- 【材 質】 ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体(EVA)
- 【サイズ】 S M L
- 【タイプ】 左右兼用
- 【カラー】 半透明

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤプラスチック手袋EVA	200枚 Sサイズ	20	53508	49-87696-53508-4
	200枚 Mサイズ	20	53509	49-87696-53509-1
	200枚 Lサイズ	20	53510	49-87696-53510-7

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2011年07月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日 9:00~18:00)

取扱店