

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



手術時手指消毒専用 ノータッチ式ディスペンサー TUD-1000

連続噴射機構のため、1回の吐出で
十分な量を供給できます



商品特徴

ラビング法による手術時手指消毒に最適

手のひらに受けやすく、肘への噴射にも配慮した設計です。



壁付型/卓上型
アルカリ乾電池

消毒
噴射

衛生面を考慮した設計

手や肘を差し出すとセンサーが自動感知、ノータッチで薬液を吐出します。

また、ディスポーザブルの専用チューブユニット※を採用したことにより、衛生的に手指消毒ができます。

※使用薬液に付属しています。

選べる薬液噴射量

連続噴射可能で、薬液噴射量を
約3mL、約5mL、約20mL(最大)※
から選べます。

※手や肘を離すと噴射が止まります。

様々な設置環境に対応

場所を取らず、作業の邪魔にならない
よう配慮したコンパクトなボディー
です。壁付け、据え置き、スタンドで
使用できます。

TUD-1000 使用薬液

- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。
他の薬液では思わぬトラブルが生じる恐れがあります。



医療用医薬品

液状



速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A0.5% 1L ポンプ付 TUD用

商品コード 41773

医療用医薬品

液状



速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A1.0% 1L ポンプ付 TUD用


商品コード 41774

チューブユニットの取り付け方




1

ボトルキャップをはずします

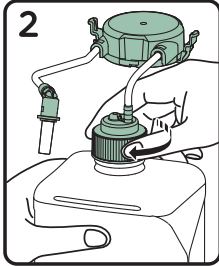


2

チューブユニットをボトルに取り付けます

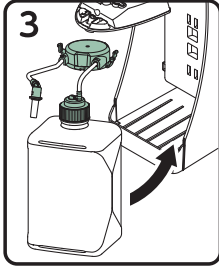


3

本体にセットします

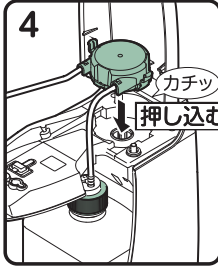


4

チューブユニットを“カチッ”と手応えがあるまで押し込みます

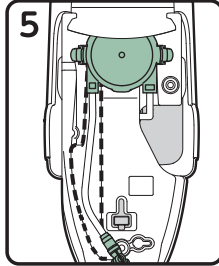

5


チューブを本体溝(破線部)に沿わせます

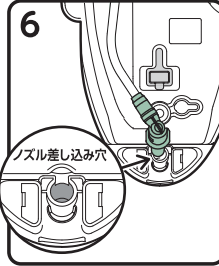

6

ノズルを本体穴に差し込みます

外寸図 (mm)

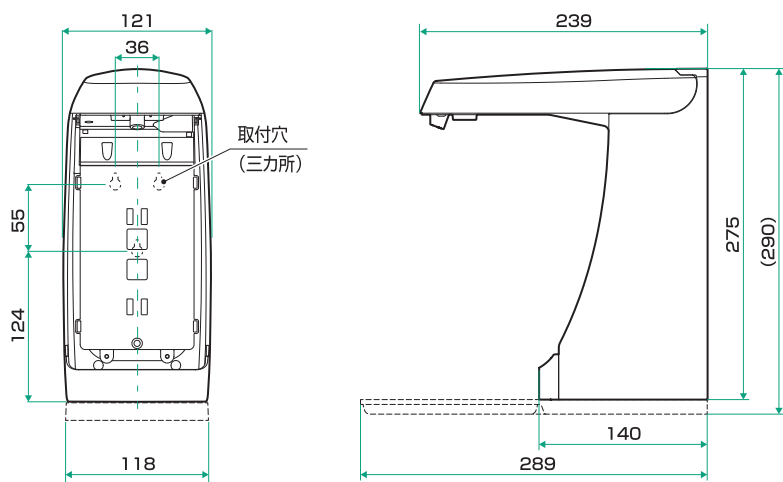

製品仕様

項 目	内 容
名 称	ノータッチ式ディスペンサー
型 式	TUD-1000
外形寸法	W121 × D239 × H275 mm
製品質量	約760g (梱包、付属品、取付板、電池、薬液を除く)
主な材質	カバー：PP ケース：PP 取付板：ABS
電 源	●単1アルカリ乾電池×4本 ●当社指定のACアダプター
使用環境温度	5～40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)
使用薬液	当社指定の薬液
吐 出 量	約3mL／回、約5mL／回、約20mL／回 (最大)
付 属 品	●取付板 ●取扱説明書 ●ねじセット ●火気厳禁ラベル

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー TUD-1000	本体	6	41772	49-87696-41772-4
トレイE型	—	12	41770	49-73512-41770-0
ヒビスコール液A0.5%1L P付TUD用	1Lポンプ付TUD用	10	41773	※
ヒビスコール液A1.0%1L P付TUD用	1Lポンプ付TUD用	10	41774	※
ACアダプター	—	1	47002	—

※「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要領」の一部改正に伴い、JANコードを削除し、GS1-Databarコードに切り替わります。



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。
指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2018年03月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>