SARAYA

パワークイック

用手洗浄 専用

酵素系用手洗浄剤中性

中性

プロテアーゼと界面活性剤が 汚れをしっかり 除去します。

特徵

- ●豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。
- ●抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が 維持できます。
- ●プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果による、 高い洗浄力を有しています。
- ●ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の 器具にも使用できます。



880mL

使用方法

- 1 適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。
- ② 泡立て、医療器具を用手洗浄してください。
- ③洗浄後は流水で十分にすすいで ください。



成 分

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、タンパク質分解酵素 (プロテアーゼ)、酵素安定化剤、防錆剤

使用上の注意

●用途以外には使用しない。●子どもの手の届かないところに保管する。●作業時は必ず手袋、マススエプロン、ゴーグルなどの防護具を着用する。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●他の容器に移し替えて使用しない。●倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。●直射日光を避けなるべく涼しい場所で保管する。●樹脂の種類やメッキ製品等金属の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●機械洗浄する場合は必ず器具をすすぐ。●本品に滅菌効果はありません。●経時的に変色することがありますが、性能に問題はありません。

応急処置

- ●目に入った場合は直ちに水洗いし、医師の処置を受ける。
- ●飲み込んだ場合は、直ちに医師の処置を受ける。
- ●皮ふについたときは水で洗い流す。

パワ-ワイック 酵素系用手洗浄剤 中性

中性で優れた洗浄力を実現

方 法

20gの水道水を含ませたスポ ンジに3gの洗浄剤を吐出して 使用することを想定して、洗浄 力を評価しました。13%に希釈 した各種洗浄剤に、洗浄評価 インジケーターTOSI®を20℃で 30分浸漬後、残留タンパク検 出液(サラヤ)で染色しました。

	洗浄後の写真
パワークイック 酵素系用手洗浄剤 中性	
他社品A	C BOTT OF
台所用洗剤B	

豊富な泡立ち

方 法

20gの水道水を含ませたスポ ンジに3gの洗浄剤を滴下し、 10回揉みました。この動作を 4回繰り返しました。

	はじめ	10回	20回	300	400
パワークイック 酵素系用手洗浄剤 中性		1	1		
他社品A		-OTTO	The second	700	(m)
台所用 洗剤B	1,10				

優れた防食性

方 法

20gの水道水を含ませたスポ ンジに3gの洗浄剤を吐出し て使用することを想定して、 防食性を評価しました。6種類 の金属テストピース (ステンレ ス3種、アルミニウム、銅、真鍮) を、13%に希釈した各種洗浄剤 に浸漬し、50℃で1週間保管し ました。

		SUS304	SUS420J2	SUS430	アルミニウム	銅	真鍮
	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
パワークイック 酵素系 用手洗浄剤 中性	写真						
台所用 洗剤B	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	濃い橙色	光沢のある黒色
	写真	100				1	

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JAN⊐−ド
パワークイック 酵素系用手洗浄剤 中性	880mL	12	50362	49-87696-50362-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年10月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8 https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938

(受付時間:平日 9:00~18:00)