



**滅菌製剤** 外用殺菌消毒剤

薬価基準収載

# エタノール8%添加 ベンザルコニウム塩化物0.1%液

販売名 ヤクゾールE液0.1

吸引カテーテル等の医療機器の浸漬消毒に

## 特徴

1. 院内製剤業務の省力化、  
計量・希釈ミスを防止します。
2. 実用濃度に希釈調製済みの滅菌製剤です。
3. グラム陽性菌、陰性菌及び真菌に  
対して消毒効果を示します。



原液 または 希釈 500mL



使用例：吸引カテーテルの浸漬消毒

- 1 吸引カテーテルの外側を消毒用エタノール含浸綿で清拭してください。
- 2 滅菌精製水(1) (左) を吸引カテーテルで吸引し、カテーテルの内腔を十分洗浄してください。
- 3 エタノール8%添加ベンザルコニウム塩化物0.1%液を吸引しながら液中に浸漬してください。
- 4 使用前に滅菌精製水(2) (右) を吸引し、消毒液を十分にすすいでから使用してください。

### 【取扱い上の注意】

- 滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用してください。
- 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。

■ 詳細は電子添文をご参照ください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード	
				販売包装単位コード (***** : 有効期限 %%%%) : 製造番号)	
ヤクゾールE液0.1	500mL	20	44916	(01)04987696100367	(01)14987696449166 (17)***** (10)%%%

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年4月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

製造販売元  
**ヤクハン製薬株式会社**  
〒061-1111 北海道北広島市北の里27番地

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00～18:00)