



ニトリルグローブ エクステンド

PPEホルダー使用でさらに便利

サラヤ PPE ホルダー (ステンレス製)
手袋・エプロン用

※ホルダーの裏には強力マグネット付



商品コード: 51088
サイズ (mm): W244 × D105 × H141
入数: 12

カラー



仕様

※ブルー・ホワイト共通

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm)	≥ 240			
手のひら幅 ±5 (mm)	75	85	95	105
厚み (mm)	指先: 0.10 ± 0.02			
	手のひら: 0.08 ± 0.02			
ピンホール品質基準	AQL 1.5			
引張り強度 (MPa)	老化前 ≥ 26			
	老化後 ≥ 24			
最大伸長度 (%)	老化前 ≥ 500			
	老化後 ≥ 400			

※パッケージに表記のある「XLサイズ」は海外向けの取扱いサイズとなります。ご了承ください。

着脱方法

※手袋を外すときは、汚染面が素手に触れないように注意し、廃棄後は手指衛生をしっかり行うことが重要です。



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤニトリルグローブエクステンド ブルー	200枚入 / XS	10	50966	49-87696-50966-5
	200枚入 / S		50967	49-87696-50967-2
	200枚入 / M		50968	49-87696-50968-9
	200枚入 / L		50969	49-87696-50969-6
サラヤニトリルグローブエクステンド ホワイト	200枚入 / XS		50945	49-87696-50945-0
	200枚入 / S		50946	49-87696-50946-7
	200枚入 / M		50947	49-87696-50947-4
	200枚入 / L		50948	49-87696-50948-1

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2024年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525


学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間: 平日 9:00~18:00)

ニトリルグローブ エクステンド

Nitrile Glove Extend

販売名: サラヤニトリルグローブエクステンド
一般医療機器 届出番号: 27B1X00120000202
非天然ゴム製検査・検診用手袋、歯科用手袋
食品衛生法適合品(厚生労働省告示第370号)

Nitrile Examination Gloves

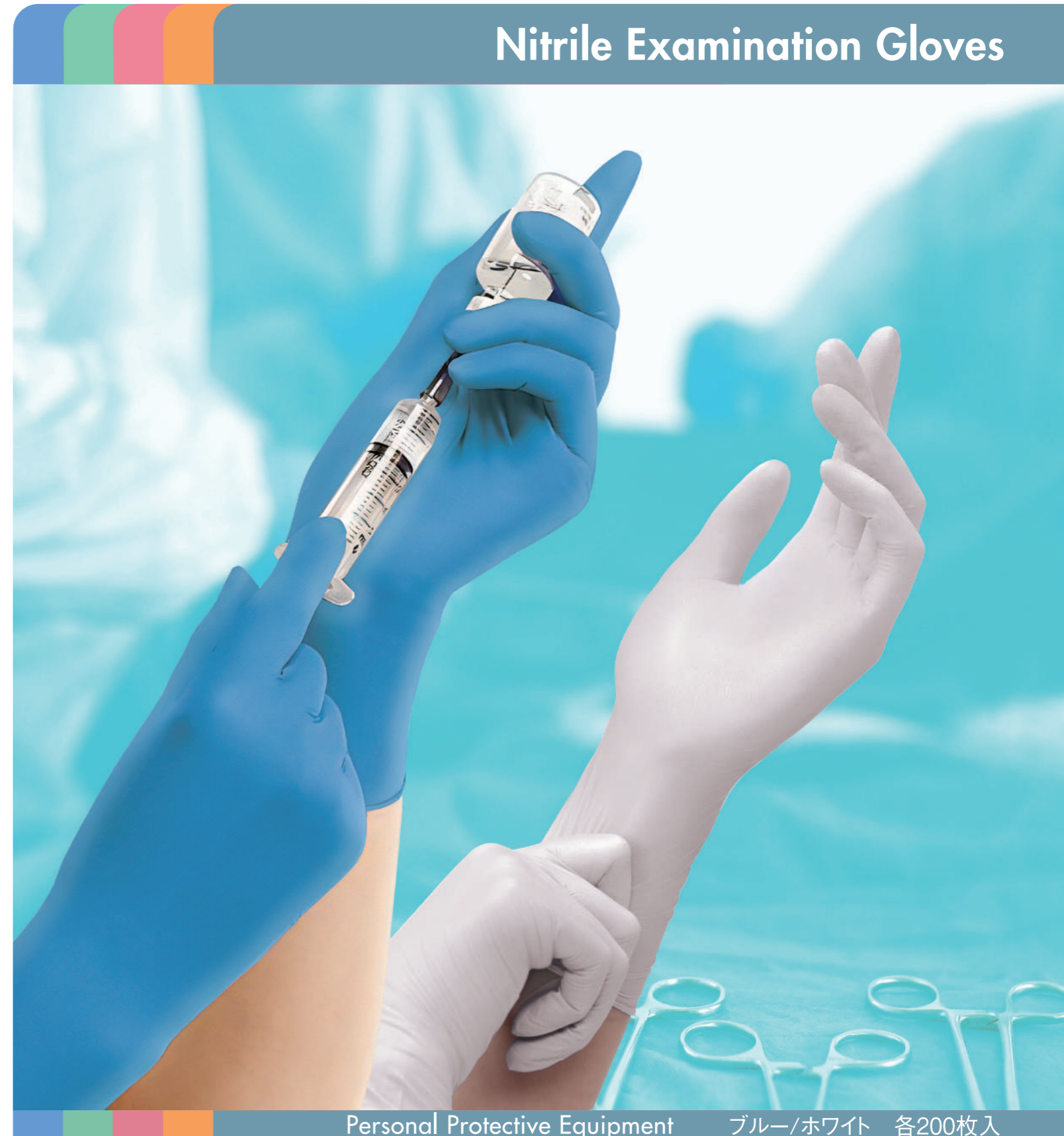

Personal Protective Equipment ブルー/ホワイト 各200枚入



優れた伸縮性&フィット感

- 優れたバリア性
(耐薬品性、血液不浸透性、抗がん剤耐性)
- パウダーフリー・ラテックスフリー
- 指先滑り止め加工
- めくれ上がり防止カフ
- 食品衛生法適合
- 未滅菌
- 左右兼用
- ディスポーザブル(単回使用)



用途

湿性生体物質に接触する可能性のある場合や傷・粘膜に触れる場合など、様々な場面でお使いいただけます。

- 採血 ●創傷処置 ●注射剤のミキシング ●汚物・吐物処理 ●器材の洗浄・消毒 ●気管吸引
- 環境整備 ●末梢血管カテーテル留置 ●尿道カテーテル挿入 ●検体の取り扱いなど

その他、介護現場、食品加工、化学実験など、様々な用途に適應します。



手袋を衛生的に取り出せる箱設計

手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。



サラヤニトリルグローブエクステンド 物性データ (各サイズ共通) バリア性

試験項目	評価結果
水酸化ナトリウム (40%) : EN374-3	>480 分
ホルムアルデヒド (37%) : EN374-3	>120 分
過酸化水素 (30%) : EN374-3	ブルー : 30 分 ホワイト : 10 分
血液由来病原体透過性 : ASTM F1671	合格

抗がん剤耐性試験 : ASTM D6978-05

試験薬剤	濃度	透過時間
カルムスチン	3.3mg/mL	ブルー : 6 分 ホホワイト : 5 分
シスプラチン	1.0mg/mL	>240 分
シクロホスファミド	20.0mg/mL	>240 分
ダカルバジン	10.0mg/mL	>240 分
ドキシソルピシン塩酸塩	2.0mg/mL	>240 分
エトポシド	20.0mg/mL	>240 分
フルオロウラシル	50.0mg/mL	>240 分
メトトレキサート	25.0mg/mL	>240 分
マイトマイシン C	0.5mg/mL	>240 分
パクリタキセル	6.0mg/mL	>240 分
チオテパ	10.0mg/mL	ブルー : 29 分 ホホワイト : 46 分
ピンクリスチン硫酸塩	1.0mg/mL	>240 分

刺激と感作性 : ISO-10993-10

試験項目	評価結果
一次皮ふ刺激 グローブが接触する皮ふへの刺激評価	無刺激
感作性試験 グローブからの抽出物による、皮ふ感作 (TypeIV: 遅延型過敏症免疫反応) について評価	目に見える変化なし

安心の
安定供給!

自社工場でのニトリル手袋の製造体制を構築。高い品質と安定供給を実現します。

自社工場の紹介動画はこちら




<当工場の特徴>

- ★製造機能に加え保管倉庫も隣接。急激な需要増にも対応します。
- ★排ガス・排水処理などに高性能設備を導入し、環境負荷の低減に配慮しています。

【製造ライン】



【検査場所】

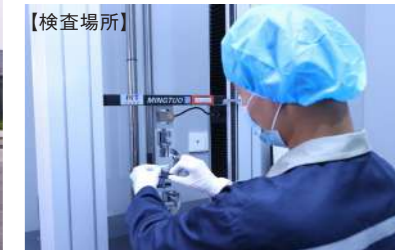

【自社工場外観図】