



サラヤ ジアクロス

含浸タイプ

環境表面を強力に除菌・洗浄

細菌・ウイルスを強力に除去

次亜塩素酸
ナトリウム
0.1%以上



取り出して
そのまま使える




製品特徴

1. 除菌成分として次亜塩素酸ナトリウムを配合
2. 相性の良い専用液とクロスの組み合わせで次亜塩素酸ナトリウムの長期安定性を実現
(使用期限:製造後18ヶ月間、使用開始2ヶ月間は有効塩素濃度:1,000ppm以上を維持)
3. 幅広い細菌・ウイルスに対して高い除去効果を発揮
(殺芽胞効果、ウイルス不活化効果)

80枚入容器


特許第6819974号

用途 環境表面・器具・物品などの除菌・洗浄に

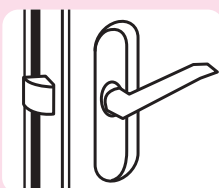

ドアノブ・手すりに

○ 使えるもの

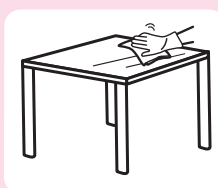


机・棚に

プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、
陶磁器、ステンレス製品



ベッド柵・オーバーテーブルに

× 使えないもの

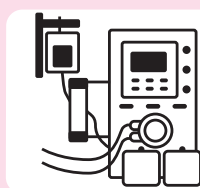

機器表面に



トイレまわりに

銅、鉄および真鍮の容器・用具、漆器、大理石、
色物・柄物の繊維製品(漂白されます)

環境表面を強力に除菌・洗浄 サラヤ ジアクロス


サラヤ ジアクロス 含浸タイプの安定性評価

方法

サラヤ ジアクロス 含浸タイプを未開封の状態ですべて常温保管しました。含浸直後および一定期間保管後の有効塩素濃度から残存率を求めました。

結果

サラヤ ジアクロス 含浸タイプは、含浸後18ヶ月でも、高い残存率(有効塩素濃度=1,000ppm以上)を維持しました。

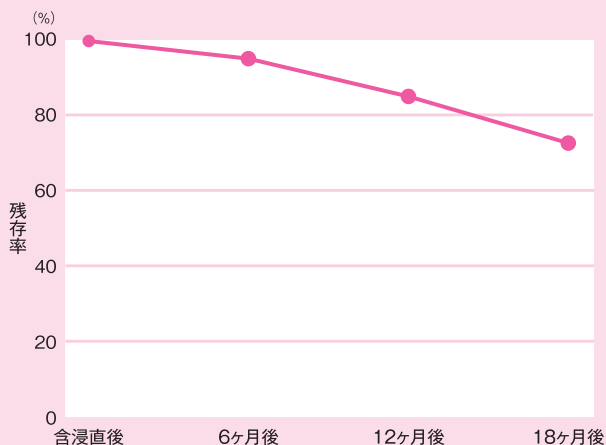


サラヤ ジアクロス 含浸タイプの殺芽胞効果

方法

供試芽胞液0.1mLに、サラヤ ジアクロス 含浸タイプの絞り液0.9mLを加え、20℃で一定時間作用させました。この作用液を不活化剤と混和して作用を停止させた後、培養し、生存菌数を求めました。

結果

サラヤ ジアクロス 含浸タイプの絞り液は4分で4Log以上の減少が確認され、供試芽胞液に対して高い殺芽胞効果を示しました。

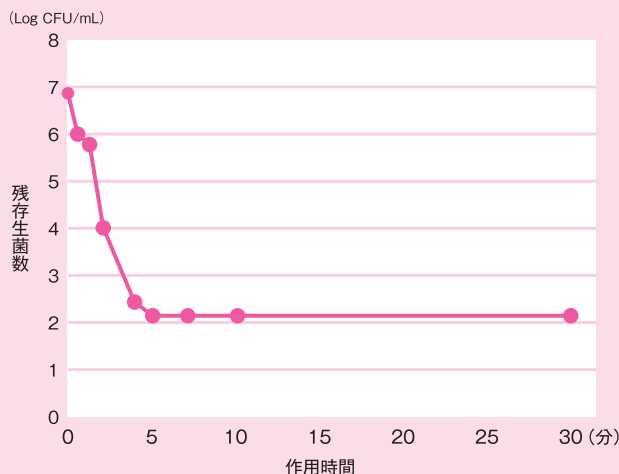

【使用上の注意】●乾燥を防ぐために使用後はフタをしっかりと閉めてください。●材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがありますので、目立たない部分で試してから使用してください。●機器などに使用のときは機器付属の「取扱説明書」をご覧ください。●この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。●体調の悪い時は使わないでください。●目・顔など人体や食品・食器などには使用しないでください。●作業時は、必ず保護メガネ、マスク、保護手袋などの保護具を着用してください。●用途以外に使用しないでください。●不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。●使用している不織布の性質上、経時的に不織布が変色することがありますが、使用上問題ありません。●表面がざらざらしている箇所や、凸凹している箇所には使用しないでください。●硬いゴミなどが不織布に付着した場合は、取り除いてから使用してください。そのまま使用すると表面を傷つけるおそれがあります。●不織布を取り出す際に、薬液が衣服に付着すると漂白するおそれがあります。●液がラベルに付着すると退色するおそれがあります。●金属表面など腐食が気になる部分を清拭する場合には、水拭きを行ってください。●すべての細菌・ウイルスを除去するわけではありません。

【保管上の注意】●熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざける。禁煙。●直射日光の当たらない、換気の良い涼しい場所で保管する。容器を密閉しておく。●小児や認知症の方の手の届かない所に保管する。

【応急処置】※診断時は必ず本品またはSDSを持参する。●万一塩素ガスを吸い込んだ場合、直ちに患者を風通しのよい場所に避難させ、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。●液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流す。●液が目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には眼科医の診断を受ける。●使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった場合は、使用をやめてその場から離れ、洗眼やうがいをする。

製品仕様

80枚入

1枚サイズ：140×210mm

80枚入
容器



フタに
開封日記録
シール付き

80枚入
詰替



詰替えるたびに
新しい取り出し口に
交換できます

| 品名 | 内容量 / 規格 | 1梱入数 | 商品コード | JANコード |
|-----------------|----------|------|-------|------------------|
| サラヤ ジアクロス 含浸タイプ | 80枚入容器 | 20 | 44181 | 49-87696-44181-1 |
| | 80枚入詰替 | 20 | 44182 | 49-87696-44182-8 |

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)