



ベッドパンウォッシャー用

アルカリ性洗剤

アルカリ性

尿器・便器の洗浄に

アルカリの作用で 尿器・便器に付着した 汚物を除去します。

特徴

- アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。
- 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。
- 様々なプラスチック素材に使用できます。
- 防錆剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。
- 保存安定性に優れています。



使用方法

- お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。

ベッドパンウォッシャー

推奨使用濃度：**0.2~0.4%**
(汚れの程度により0.2~0.4%の間で調整してください。)

〈自動注入の場合〉

- 自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっている。

成分

アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、防錆剤

使用上の注意

●用途以外には使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●作業時は、必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護着を着用する。●他の容器に移し替えて使用しない。●キャップを開けると、液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときはキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液が飛び跳ねて目や皮膚につく恐れがある。●樹脂の種類やメッキ製品など金属の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●換気の良い場所で作業し、ミストの吸入を避ける。●この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。●使用后、目・皮膚・のど・手をよく洗う。

応急処置

※診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。●目に入った場合、(コンタクトレンズは外し)直ちに流水で15分以上洗い流す。状態に変化が見られた場合、速やかに医師の診断を受ける。濃い液と多量に接触した場合は、手当てが遅れると失明することがある。●飲み込んだ場合、直ちに多量の水または牛乳や生卵を飲ませる(アレルギーの場合はこの限りでない)。意識のない場合には、口から何も与えない。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当てが遅れると生命にかかわる恐れがある。●皮膚についた場合、直ちに大量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は、直ちに脱ぐ。再使用する場合には洗たくする。手当てが遅れると炎症(熱症)を起こす恐れがある。

材質適合性

方法

各種テストピースをアルカリ性洗剤および他社品Aの実用液に浸漬し、50℃で7日間放置した後、テストピースの外観観察を行いました。

			SUS304	SUS420J2	SUS430	銅	真鍮	PE	PP
アルカリ性洗剤	0.2%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
	0.4%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
他社品A	0.2%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
	0.4%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
水道水	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり	変化あり	変化なし	変化なし	
	写真								

優れた安定性

方法

アルカリ性洗剤および他社品Aの実用液を、50℃で1ヶ月放置した後、外観観察を行いました。

	アルカリ性洗剤	他社品A
外観変化	浮遊物発生なし	浮遊物発生あり
写真		

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ベッド/パンウォッシャー用 アルカリ性洗剤	5L	4	50358	49-87696-50358-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)