

SARAYA


屋内用

サラヤPPEホルダー


取扱説明書

サラヤPPEホルダー 手袋／エプロン用
サラヤPPEホルダー マスク用
サラヤPPEホルダー ガウン／シールドマスク用


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。ご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。

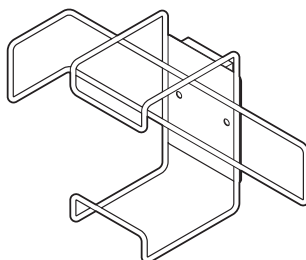

手袋／エプロン用
(W244 × D105 × H141mm)

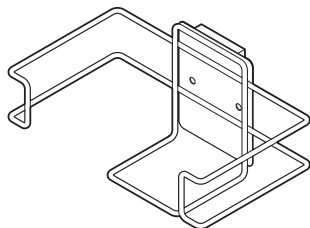

マスク用
(W203 × D125 × H104mm)

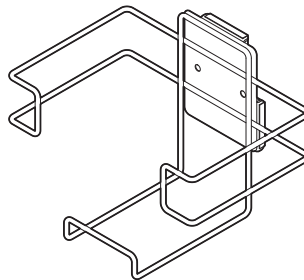

ガウン／シールドマスク用
(W198 × D137 × H151mm)

《使用上の注意》

- 本製品は磁石を使用しているため、下記内容に注意してください。
 - 磁石をパソコン・携帯電話・時計等の精密機器・電子機器に近付けないでください。
 - 磁石を心臓ペースメーカー等の医療機器に近付けないでください。
 - 磁石をクレジットカード・キャッシュカード・フロッピーディスク等に近付けないでください。
 - 金属アレルギー体質の方が磁石に触れた場合、肌が荒れたり、赤くなる恐れがあります。このような症状が現れた場合、磁石に触れないでください。
 - 他の物に吸着して（磁石同士の吸着も含む）強い衝撃が加わった場合、磁石が欠ける、割れる、表面処理が剥がれる、離せなくなるなどの可能性があります。
- 安易に放置すると、周囲の磁石製品や金属を勢いよく引き寄せる恐れがあります。
- ホルダーを磁石で吸着する物体に近づけた場合、間に指などを入れないでください。
- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
- その他ご不明の点はお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏面に記載）にご相談ください。

取付方法

【取り付け】

ホルダーを壁面に取り付けます。

※イラストはサラヤPPEホルダー 手袋/エプロン用で説明しています。他の2種も同様に取り付けてください。

注意




- 鉄製の壁面へ取り付けてください。
- 凹凸面やザラザラした壁面には取り付けられません。各種PPE製品を取り出すときにホルダーごと外れたりずれたりするとホルダーが落下し、事故や破損の原因になります。
- ホルダーを確実に取り付けることができない場合は、サラヤPPEホルダー取付ボード(別売品)を設置して取り付けてください。

【取り外し】

ホルダーを取り外す際は、右図のように片方を引いて、ホルダーの設置面(磁石)を浮かせてから取り外します。

注意

- 壁面よりホルダーを取り外すときは勢いよく引っ張らないでください。
- ホルダーの移動や方向を変える場合は、壁面またはボードよりホルダーを一度取り外し、再度取り付けてください。壁面上またはボード上を滑らすと、壁面またはボードを傷付ける恐れがあります。

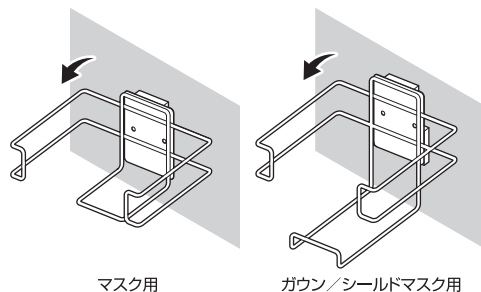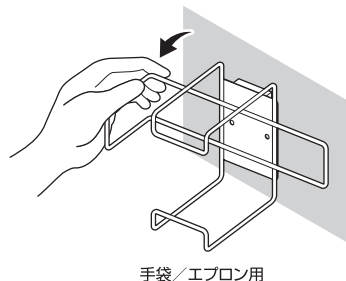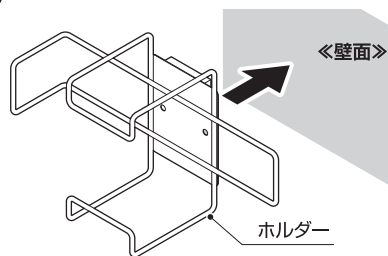


取付方法

PPE製品(別売品)をホルダーに装着し、使用します。

注意

- PPE製品(別売品)はホルダーから無理に引っ張らず、手を添えてゆっくり取り出してください。
- 当社指定のPPE製品以外は使用しないでください。ホルダーが落下し、事故や破損の原因になります。

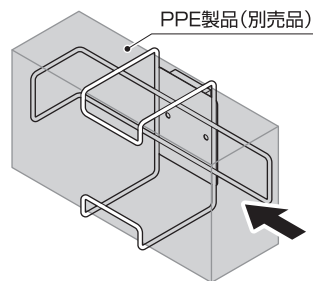

お問い合わせ窓口

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

TEL.06-6797-2525 URL.<https://www.saraya.com/>

電話受付:平日(土日および祝祭日、弊社休日を除く) 9:00~18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。