



手洗いの教育や定期的な手技の確認・評価に!


スタンド型 手洗いチェッカー BLB

手洗いチェッカーローションを手についた汚れに見立てて、
特殊ライトの下で光らせます。
洗い残した部分が光るため、
適切な手洗いが実施できているかをチェックできます。

明るい場所でも
見やすい!

多人数での 手洗い評価に最適です

ライトまわりに囲みのないスタンド型なので、多人数で手洗い評価ができます。
教育ツールとしても最適です。

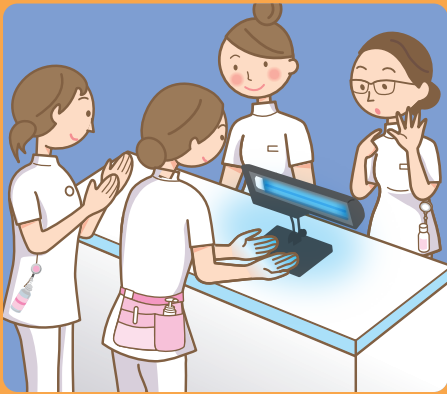

洗い残しが
光ります

スタンド型 手洗いチェッカーBLB の使用方法

※詳細は使用説明書をご参照ください。

1



適量(1プッシュ程度)を手まんべんなく塗り広げる。

2



石けんを用いて手洗いし、ペーパータオルで水分を拭き取る。

3



特殊ライトの下に手をかざす。

4



洗い残した部分が光るため、適切な手洗いができているかをチェック。

セット内容



スタンド型手洗いチェッカー本体
(1台)



原液

乳液状

弱酸性～中性

手洗いチェッカー専用ローション
(230mL×3本)

折りたたみ式で
コンパクト収納



仕 様	
項 目	内 容
名 称	スタンド型 手洗いチェッカー-BLB
本 体 外 寸	W295mm × D180mm × H200mm (梱包、付属品は除く)
製 品 質 量	約1,050g (梱包、付属品は除く)
材 質	本体 …… ABS樹脂
電 源	AC100V 50/60Hz 27W
紫外線ランプ電力	27W
紫 外 線 出 力	3.8W
セ ッ ト 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ● スタンド型手洗いチェッカー本体(1台) ● 手洗いチェッカー専用ローション(230mL×3本)

※手洗いチェッカー専用ローションにつきましては、別途単品の取り扱いもございます。

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
スタンド型 手洗いチェッカー-BLB	—	1	41127	49-87696-41127-2
[別売] 手洗いチェッカー専用ローション	230mL	20	41337	49-87696-41337-5



安全にご使用
いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬剤をご使用の際は、当社指定の薬剤をご使用ください。
指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)