



# 温められる ウェットタオル

おしり、身体、手足などの汚れを拭き取る、  
使い捨てタイプのウェットタオルです。



40枚入(1枚サイズ:200×300mm)  
※トイレに流せません

## 商品特徴

### 1 容器ごと温められる

冬場でもお肌が冷たないように電子レンジやタオルウォーマーで温めてご使用いただけます。また、容器ごと繰り返し温めることができます。(詳細は裏面をご参照)



### 2 お肌にやさしい

ふんわりとした素材でやさしい拭き心地です。皮膚刺激の少ないノンアルコール・パラベンフリーで、保湿成分としてヒアルロン酸を配合しています。お肌と同じ弱酸性で安心の全成分表示です。また、無香料のため、においが気になりません。



### 3 厚手・大判シート

厚手で破れにくく、1枚でしっかり拭ける大判タイプのため、様々な用途にご使用いただけます。



### 4 プラスチック製のフタ付き

フタはワンタッチで開けられるため片手でシートを取り出しやすく、使用後はフタを閉めることで乾燥を防ぎます。



### 5 衛生的な使い捨てタイプ

リユースタイプの清拭タオルやおしぼりの管理に伴う手間やコストの削減、感染リスクの低減につながります。持ち運びに便利です。



## 使用方法 (電子レンジで温める場合)

### 1 プラスチック製のフタを開けてから電子レンジに入れてください。

※フタを開けずに温めると容器が破裂する恐れがあります。  
※商品本体に貼っている密封シールも取ってください。

### 2 以下を目安として温めてください。

※連続して温める場合は中身が熱くなりますので、やけどに注意してください。

残枚数		40~31枚	30~21枚	20~11枚	10~1枚
温める時間	450W	約150秒	約120秒	約70秒	約40秒
	600W	約120秒	約100秒	約60秒	約20秒

### 3 電子レンジで温めた後、1枚ずつ取り出して使用してください。

※タオルウォーマーで温める場合、300Wで約8時間までの保管が目安です。  
それ以上の保管は乾燥の原因となりますのでお控えください。

### 4 乾燥を防ぐために使用後はフタをしっかりと閉めてください。



## 使用用途



おむつ交換時のおしりふきに



身体や手足の清拭に

その他、災害備蓄などに (未開封使用期限の目安は5年です)

## 個人防護具の着用例

	おむつ交換※1	身体清拭※2
マスク	○	
ゴーグル	○	
手袋	○	○
エプロン	○	○

※1 大量の下痢や陰部洗浄を同時に行う場合は、マスク・ゴーグルの着用を追加。

※2 陰部周囲の清拭や創傷、皮膚病変がある場合は、手袋・エプロンを着用。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ 温められるウェットタオル	40枚	24	42442	49-87696-42442-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年7月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00~18:00)