

サラヤ株式会社

●50370：潤滑・防錆・乾燥促進剤パワーミルクC | e a r 1 0 L

旧（現行品）

新（仕様変更品）

パワーミルク [メンテナンス剤]

SARAYA

潤滑・防錆・乾燥促進剤 **パワーミルクClear**使用
方法

- お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
- 自動供給装置のホースの先端が本剤に漬かっていることを確認してください。
- 本剤が直接肌に触れないように、注意してください。

中 性

※必ず使用前に「安全データシート(SDS)」と「使用上の注意」をお読みください。

〔品名〕潤滑・防錆・乾燥促進剤〔用途〕医療器具の潤滑・防錆・乾燥促進用〔液性〕中性
 〔成分〕非イオン界面活性剤、防錆剤（正味量）10L〔使用量の目安〕推奨使用濃度
 ジェット洗浄機：0.5%（10Lの水に対し50mL）、浸漬洗浄：0.5%（10Lの水に対し50mL）

〔使用上の注意〕●用途以外には使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●作業時は必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護着を着用する。●他の容器に移し替えて保管しない。●キャップを開けるとき、液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときはキャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が飛び跳ねて目や皮膚につく恐れがある。●ステンレス以外の金属器具および樹脂の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●洗浄液は最低1日に1回交換する。洗浄液の汚染が激しいときは、その都度交換する。●経時的に黄褐色になる場合がありますが、性能に問題はありません。●必要なとき以外は、環境への放出を避ける。●使用後の容器は洗浄処理する。●内容物や容器は、国や各自治体の規則に従って廃棄する。〔応急処置〕※診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。●目に入った場合、（コンタクトレンズは外し）直ちに流水で15分以上洗い流す。状態に変化が見られた場合、速やかに医師の診断を受ける。●飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には、口から何も与えない。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●皮膚についた場合、直ちに大量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は、直ちに脱ぐ。再使用する場合には洗たくする。手当てが遅れると炎症（熱症）を起こす恐れがある。〔保管上の注意〕●小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。●保管時は容器の口（キャップ）をしっかりと閉め、容器を密閉して換気の良いところで保管する。●直射日光を避け、なるべく涼しい場所で保管する。●倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。



ロット印字スペース



サラヤ株式会社
 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525
 MADE IN JAPAN

50370

業務用

10L

パワーミルク [メンテナンス剤]

SARAYA

潤滑・防錆・乾燥促進剤 **パワーミルクClear**使用
方法

- お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
- 自動供給装置のホースの先端が本剤に漬かっていることを確認してください。
- 本剤が直接肌に触れないように、注意してください。

中 性

※必ず使用前に「安全データシート(SDS)」と「使用上の注意」をお読みください。

〔品名〕潤滑・防錆・乾燥促進剤〔用途〕医療器具の潤滑・防錆・乾燥促進用〔液性〕中性
 〔成分〕非イオン界面活性剤、防錆剤、pH調整剤（正味量）10L〔使用量の目安〕ジェット
 洗浄機：推奨使用濃度0.5%（10Lの水に対して50mL）、使用濃度範囲0.1%～0.5%
 （10Lの水に対して10mL～50mL）、浸漬：推奨使用濃度0.5%（10Lの水に対して50mL）

〔使用上の注意〕●用途以外には使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●作業時は必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護着を着用する。●他の容器に移し替えて保管しない。●キャップを開けるとき、液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときはキャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が飛び跳ねて目や皮膚につく恐れがある。●ステンレス以外の金属器具および樹脂の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●洗浄液は最低1日に1回交換する。洗浄液の汚染が激しいときは、その都度交換する。●経時的に黄褐色になる場合がありますが、性能に問題はありません。●必要なとき以外は、環境への放出を避ける。●使用後の容器は洗浄処理する。●内容物や容器は、国や各自治体の規則に従って廃棄する。〔応急処置〕※診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。●目に入った場合、（コンタクトレンズは外し）直ちに流水で15分以上洗い流す。状態に変化が見られた場合、速やかに医師の診断を受ける。●飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には、口から何も与えない。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●皮膚についた場合、直ちに大量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は、直ちに脱ぐ。再使用する場合には洗たくする。手当てが遅れると炎症（熱症）を起こす恐れがある。〔保管上の注意〕●小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。●保管時は容器の口（キャップ）をしっかりと閉め、容器を密閉して換気の良いところで保管する。●直射日光を避け、なるべく涼しい場所で保管する。●倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。



危険

重篤な眼の損傷



サラヤ株式会社
 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525
 MADE IN JAPAN

50370

業務用

10L

●50370：潤滑・防錆・乾燥促進剤パワーミルク Clear 10LS

旧（現行品）

新（仕様変更品）

パワーミルク [メンテナンス剤]

SARAYA

潤滑・防錆・乾燥促進剤 **パワーミルク Clear**

使用方法

- お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
- 自動供給装置のホースの先端が本剤に漬かっていることを確認してください。
- 本剤が直接肌に触れないように、注意してください。

中性

※必ず使用前に「安全データシート(SDS)」と「使用上の注意」をお読みください。

〔品名〕潤滑・防錆・乾燥促進剤〔用途〕医療器具の潤滑・防錆・乾燥促進用〔液性〕中性
 〔成分〕非イオン界面活性剤、防錆剤〔正味量〕10L〔使用量の目安〕推奨使用濃度
 ジェット洗浄機:0.5% (10Lの水に対し50mL)、浸漬洗浄:0.5% (10Lの水に対し50mL)

〔使用上の注意〕●用途以外には使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●作業時は必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護着を着用する。●他の容器に移し替えて保管しない。●キャップを開けるとき、液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときはキャップをしっかりと閉める。●ステンレス以外の金属器具および樹脂の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●洗浄液は最低1日に1回交換する。洗浄液の汚染が激しいときは、その都度交換する。●経時的に黄褐色になる場合がありますが、性能に問題はありせん。●必要なとき以外は、環境への放出を避ける。●使用後の容器は洗浄処理する。●内容物や容器は、国や各自治体の規則に従って廃棄する。〔応急処置〕※診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。●目に入った場合、(コンタクトレンズは外し)直ちに流水で15分以上洗い流す。状態に変化が見られた場合、速やかに医師の診断を受ける。●飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には、口から何も与えない。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●皮膚についた場合、直ちに大量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は、直ちに脱ぐ。再使用する場合には洗たくする。手当てが遅れると炎症(熱症)を起こす恐れがある。〔保管上の注意〕●小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。●保管時は容器の口(キャップ)をしっかりと閉め、容器を密閉して換気の良いところで保管する。●直射日光を避け、なるべく涼しい場所で保管する。●倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。



警告



強い眼刺激



サラヤ株式会社
 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525
 MADE IN JAPAN

50371

業務用 10L

パワーミルク [メンテナンス剤]

SARAYA

潤滑・防錆・乾燥促進剤 **パワーミルク Clear**

使用方法

- お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
- 自動供給装置のホースの先端が本剤に漬かっていることを確認してください。
- 本剤が直接肌に触れないように、注意してください。

中性

※必ず使用前に「安全データシート(SDS)」と「使用上の注意」をお読みください。

〔品名〕潤滑・防錆・乾燥促進剤〔用途〕医療器具の潤滑・防錆・乾燥促進用〔液性〕中性
 〔成分〕非イオン界面活性剤、防錆剤、pH調整剤〔正味量〕10L〔使用量の目安〕ジェット
 洗浄機:推奨使用濃度0.5% (10Lの水に対して50mL)、使用濃度範囲0.1%~0.5%
 (10Lの水に対して10mL~50mL)、浸漬:推奨使用濃度0.5% (10Lの水に対して50mL)

〔使用上の注意〕●用途以外には使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●作業時は必ず保護メガネ、マスク、保護手袋、保護着を着用する。●他の容器に移し替えて保管しない。●キャップを開けるとき、液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときはキャップをしっかりと閉める。●ステンレス以外の金属器具および樹脂の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●洗浄液は最低1日に1回交換する。洗浄液の汚染が激しいときは、その都度交換する。●経時的に黄褐色になる場合がありますが、性能に問題はありせん。●必要なとき以外は、環境への放出を避ける。●使用後の容器は洗浄処理する。●内容物や容器は、国や各自治体の規則に従って廃棄する。〔応急処置〕※診断時は、必ず本品またはSDSを持参する。●目に入った場合、(コンタクトレンズは外し)直ちに流水で15分以上洗い流す。状態に変化が見られた場合、速やかに医師の診断を受ける。●飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には、口から何も与えない。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●皮膚についた場合、直ちに大量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は、直ちに脱ぐ。再使用する場合には洗たくする。手当てが遅れると炎症(熱症)を起こす恐れがある。〔保管上の注意〕●小児や認知症の方の誤飲などを防ぐため、置き場所に注意する。●保管時は容器の口(キャップ)をしっかりと閉め、容器を密閉して換気の良いところで保管する。●直射日光を避け、なるべく涼しい場所で保管する。●倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。



危険



重篤な眼の損傷



サラヤ株式会社
 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525
 MADE IN JAPAN

50371

業務用 10L