

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



手術時手指消毒専用 ノータッチ式ディスペンサー TUD-1000

連続噴射機構のため、1回の吐出で
十分な量を供給できます



商品特徴

ラビング法による手術時手指消毒に最適

手のひらに受けやすく、肘への噴射にも配慮した設計です。

衛生面を考慮した設計

手や肘を差し出すとセンサーが自動感知、ノータッチで使用液を吐出します。

また、ディスポーザブルの専用チューブユニット※を採用したことにより、衛生的に手指消毒ができます。

※使用液に付属しています。



壁付型/卓上型
アルカリ乾電池

消毒
噴射

SCAN ME

3Dで
見てみよう! >>>



スマートフォンのカメラでQRコードを読み取ってください


選べる噴射量

連続噴射可能で、使用液噴射量を
約3mL、約5mL、約20mL(最大)※
から選べます。

※手や肘を離すと噴射が止まります。

様々な設置環境に対応

場所を取らず、作業の邪魔にならない
よう配慮したコンパクトなボディ
です。壁付け、据え置き、スタンドで
使用できます。

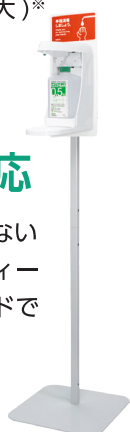

TUD-1000 使用液

- 使用液は、当社指定のものをお使いください。
他の液では思わぬトラブルが生じる恐れがあります。



環境
対応
減容容器

医療用医薬品

液状



専用チューブ
ユニットが同梱
されています。

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A0.5% 1L ポンプ付 TUD用

商品コード 41773

医療用医薬品

液状




専用チューブ
ユニットが同梱
されています。

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A1.0% 1L ポンプ付 TUD用

商品コード 41774


チューブユニットの取り付け方

1

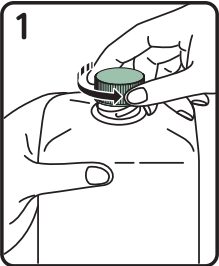


ボトルキャップをはずします

2

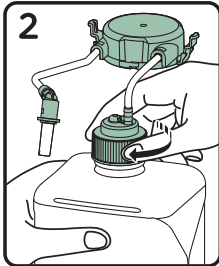


チューブユニットをボトルに取り付けます

3

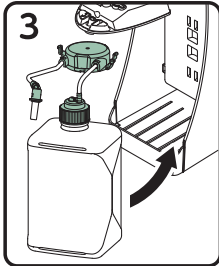


本体にセットします

4

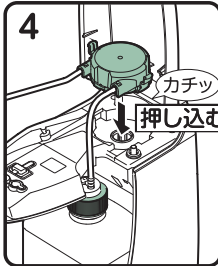


チューブユニットを「カチッ」と手応えがあるまで押し込みます

5

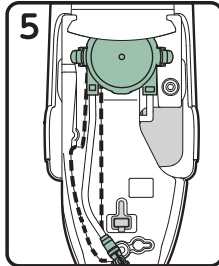


チューブを本体溝(破線部)に沿わせます

6

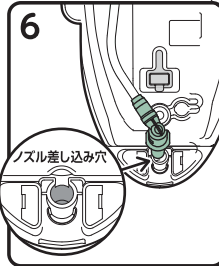

ノズルを本体穴に差し込みます

外寸図 (mm)

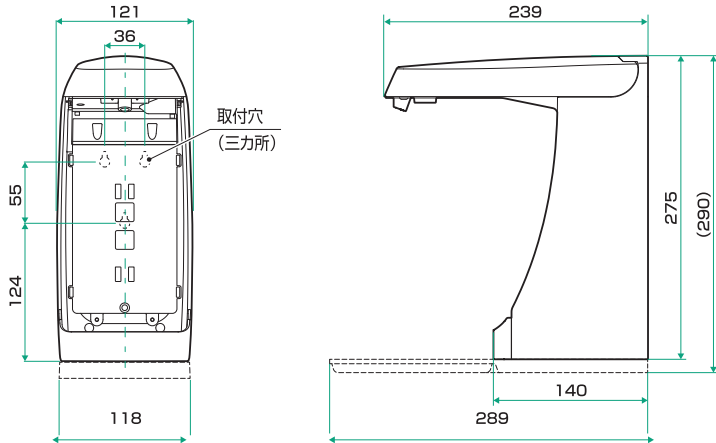

製品仕様

項目	内容
名称	ノータッチ式ディスペンサー
型式	TUD-1000
外形寸法	W121 × D239 × H275 mm
製品質量	約760g (梱包、付属品、取付板、電池、使用液を除く)
主な材質	カバー：PP ケース：PP 取付板：ABS
電源	●単1アルカリ乾電池×4本 ●当社指定のACアダプター
使用環境温度	5～40℃ (液剤に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)
使用液	当社指定の使用液
吐出量	約3mL／回、約5mL／回、約20mL／回 (最大)
付属品	●取付板 ●取扱説明書 ●ねじセット ●火気厳禁ラベル

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
TUD-1000	本体	6	41772	49-87696-41772-4
トレーE型	—	12	41770	49-87696-41770-0
ACアダプター	—	1	47007	—

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード
				販売包装単位コード (*****:有効期限 %%%%%%%%%:製造番号)
ヒビスコール液A0.5%	1Lポンプ付 TUD-1000用	10	41773	(01)04987696100459
				(01)14987696417738(17)***** (10)%%%%%%%%%
ヒビスコール液A1%	1Lポンプ付 TUD-1000用	10	41774	(01)04987696100466
				(01)14987696417745(17)***** (10)%%%%%%%%%



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の薬剤をご使用ください。
指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。 ■ 記載内容は2025年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/
お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525
学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)