

CLEANING PROCESS INDICATOR

洗浄工程インジケータ



インジケータを「選択」という新提案

機械洗浄では、部品の消耗や誤った洗剤の注入などにより、適切に洗浄できないことが起こりえます。適切に洗浄されていない器材は、次の工程に進めてはいけません。だからこそ、毎回の洗浄をモニタリングすることが重要です。

不具合を確実に検知するためには、それぞれの洗浄機やプログラムにあった最適なインジケータを選択することが重要です。

最適なインジケータで不具合を検知

それぞれのウォッシャーディスインフェクター(WD)やプログラムに適したインジケータを、5種から選択する唯一の洗浄工程インジケータです。スプレーアームの不具合や、誤ったプログラムの選択を検知します。予備洗浄で色落ちすることがなく、洗剤関連の不具合も見逃しません。マルチモデルは、複数のプログラムを1つのインジケータでモニタリングすることができます。

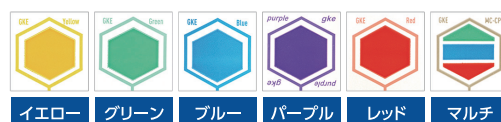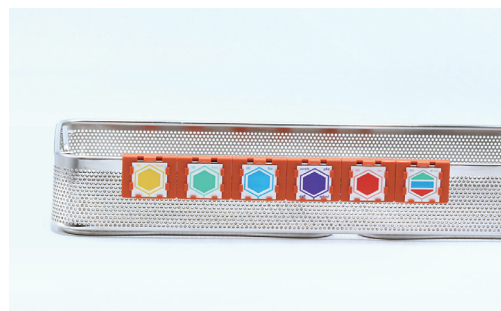

インジケータ選択方法

- WDの洗浄力に最も近い抵抗性を持つ
- 本洗浄でのみ色落ちする

2つのポイントに留意し、
5色のうち最後に落ちた色を選択します

例

右の洗浄結果では、本洗浄にて

の順で色落ち → を選択

色が完全に落ちたインジケータのうち、


最も耐性の高いモノを選択

※WD や洗浄プログラムによって、最適なインジケータは異なります。


詳しい
使用方法是こちら▶
(SALWAY HP)



洗浄前


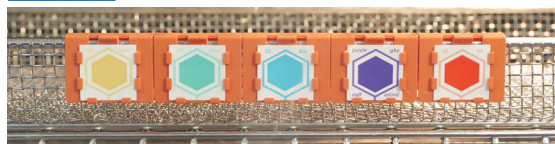


洗浄後

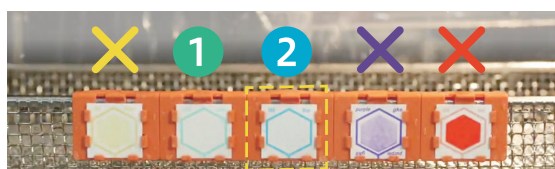


インジケータホルダー

洗浄工程インジケータを、バスケットに取り付けるためのプラスチック製ホルダーです。
一般的な洗浄バスケットの縁(上部フレーム) 約φ6.0mm の線径 にぴったりはめ込むことができます。

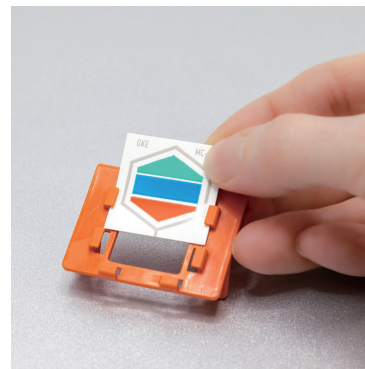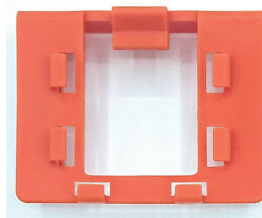

内腔洗浄フローPCD

チューブなどの内腔器材の洗浄工程を確認するためのフローPCDです。WDの洗浄ポートに接続して使用します。
内腔器材の内部まで洗浄できているかは、バスケットに設置されたインジケータでは確認することができません。
専用のフローPCDを使用して きちんとモニタリングすることが大切です。

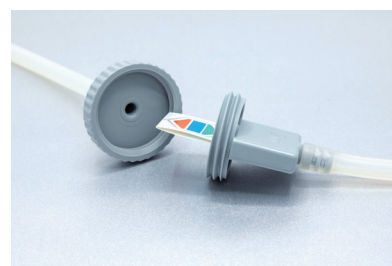

その他

詳細は営業担当者へお問い合わせください。



品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
洗浄工程インジケータ	イエロー	320枚入	73590	45-80199-00902-3
	グリーン	320枚入	73591	45-80199-00565-0
	ブルー	320枚入	73592	45-80199-00566-7
	パープル	320枚入	73593	45-80199-00968-9
	レッド	320枚入	73594	45-80199-00567-4
	マルチ	320枚入	73596	45-80199-00564-3
インジケータホルダー	—	10個	73595	45-80199-00560-5
内腔洗浄フローPCD	—	1組	73957	45-80199-00643-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2026年1月現在のものです。

製造販売

SALWAY

株式会社 名 優

〒276-0042
千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2
TEL 047-480-6161 FAX:047-480-6162

販売元

SARAYA サラヤ株式会社

ホームページ <https://www.saraya.com/>
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部
TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日 9:00～17:00)