


SARAYA

Product Catalog for Central Sterile Supply Department

滅菌供給部門向け製品カタログ

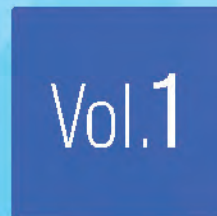


患者、医療従事者双方の安全のために 医療器具の再生処理をトータルサポート

使用済み医療器具

洗浄エリア

回収、洗浄、乾燥
～不潔ゾーン～

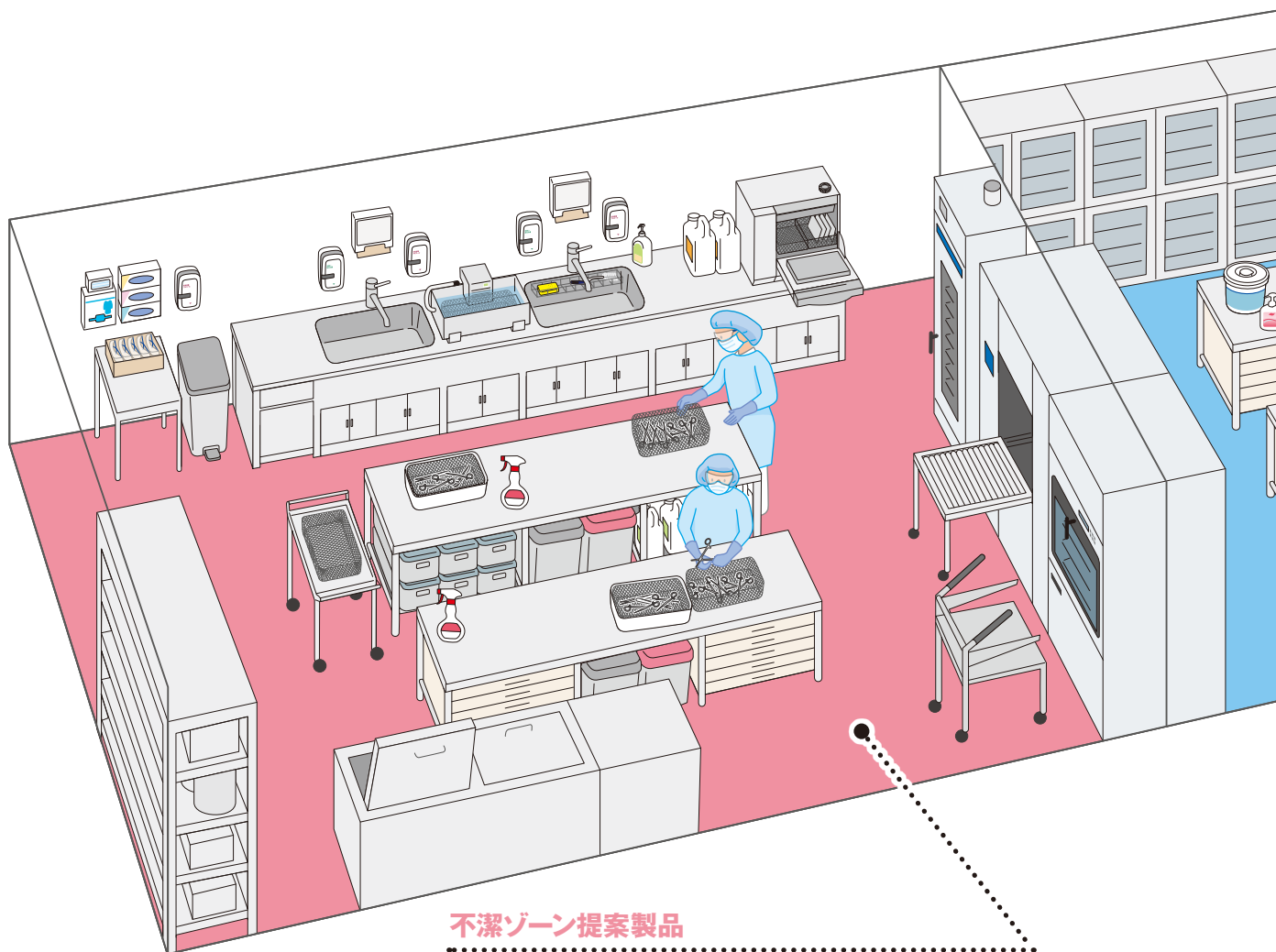

不潔ゾーン提案製品

- 医療器具用洗浄剤 パワーquickシリーズ ▶P.5 ～
- 恒温浸漬槽 TB-35 ▶P.9
- 個人防護具 各種
(キャップ、ゴーグル、マスク、ガウン、手袋) ▶P.25 ～
- 環境用除菌クロス ▶P.27


TOPICS

Anniversary
20th

医療器具用洗浄剤 パワーquickシリーズ 発売20周年

2005年の発売以来、18製品展開しており、
医療器具・内視鏡の洗浄剤開発に
取り組んでいます。



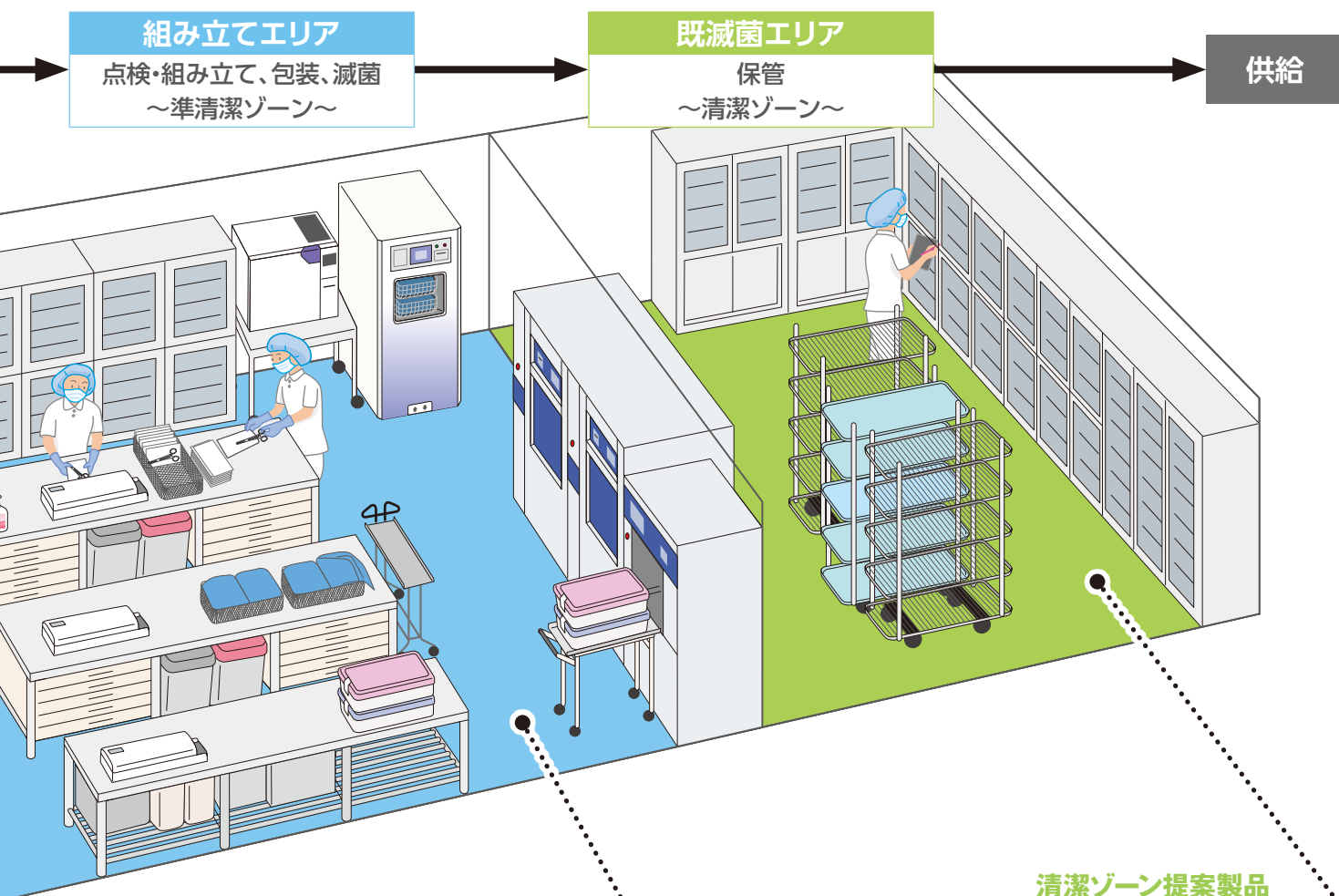

準清潔ゾーン提案製品

- 卓上型高圧蒸気滅菌器 AC-17 ▶P.19
- 過酸化水素ガス滅菌器
ステリエース100 SA-100 ▶P.21
- 化学的インジケータ ステラワン ▶P.23
- 个人防护具 各種
(キャップ、マスク、手袋) ▶P.25 ~
- 環境用除菌クロス ▶P.27

清潔ゾーン提案製品

- 个人防护具 各種
(キャップ、マスク) ▶P.25
- 環境用除菌クロス ▶P.27

『ソホロ』 医療器具用洗浄剤への応用



ソホロ[※]は、植物を原料とし、酵母で発酵させた天然由来の界面活性剤のひとつで、優れたすすぎ性と安全性を兼ね備えています。

※ソホロは、ソホロースリピッド(一般名称)の原料としての名称

▶P.6

サポートツールの充実

中材および手術室業務担当者向け情報誌「Supplysm」の定期発行、不定期でのWebセミナー開催等、現場で活用いただける情報発信を行っています。

▶P.29





器具洗浄

Medical Instrument Cleaning

医療器具再生処理のための標準予防策

医療器具の再生処理（洗浄・消毒・滅菌）は感染対策において非常に重要であり、確実に実施することで患者や医療従事者の安全を守ることにつながります。医療器具の再生処理方法は、器具の使用目的によって決定するス波尔ディングの分類を参考にします（図）。どの分類においても、消毒・滅菌に先立ち、十分に洗浄を行うことが必要です。



図 医療器具の再生処理の流れ

洗浄の重要性

上記の通り、再生処理の一連の流れの中で、確実な消毒・滅菌を行うためには、あらかじめ十分な洗浄による汚れの効果的な除去が大切です。

洗浄不良のリスク

- 消毒効果の減弱
- 滅菌不良
- サビ、腐食の発生 など

また、血液などの汚れが乾燥・固化すると、洗浄が困難な状態となってしまいます。汚染直後に洗浄することが望ましいですが、すぐに洗浄できない場合には乾燥を防ぐ必要があります。

乾燥対策例

- 予備洗浄スプレーの使用
- 酵素系洗浄剤への浸漬 など

台所用洗剤での代用はNG!

台所用洗剤と医療器具用洗浄剤は、対象とする汚れが異なります。台所用洗剤は油脂汚れを、医療器具用洗浄剤は血液や体液等の汚れ（タンパク質、脂質汚れ）を落とすことを目的に作られています。医療器具の洗浄には医療器具専用のもので、器具の材質や洗浄方法に適した洗浄剤を選ぶことが重要です。



洗浄の種類

種 類		方 法
用 手 洗 浄		ブラシやスポンジを使用して物理的に汚れを除去する方法
浸 漬 洗 浄		対象物全体を洗浄液中に一定条件で浸し、主に洗浄剤の化学的作用により汚れを除去する方法
機 械 洗 浄	超 音 波 洗 浄 機	装置内でキャビテーション*を発生させ、対象物に物理的な力を与えることにより汚れを剥離する方法
	ウォッシャーディズインフェクター (WD)	シャワーリング効果による洗浄やすすぎ、熱水消毒、乾燥などの工程を全自動で行うことができる機械による洗浄方法
	減 圧 沸 騰 式 洗 浄 機	加熱および急激な圧力変化により洗浄液を沸騰や突沸させることで汚れを除去する洗浄方法

*キャビテーション：超音波の振動により水中に小さな真空の空洞が発生する現象のこと。超音波洗浄機ではこの空洞が破裂する際に発生するエネルギーを利用している。


洗浄剤の種類と特徴

種 類	酸性洗浄剤	酵素系洗浄剤 中性～弱アルカリ性	アルカリ性洗浄剤
特 徴	● 錆、熱ヤケなどの除去に適している ● 金属への腐食性があるため、注意が必要 ● 皮ふや粘膜への影響が強い	● 40～50℃で使用することで酵素が活性化し洗浄効果が高くなる ● アルカリ性洗浄剤よりも洗浄力は劣る ● 材質への影響が少ない ● 皮ふや粘膜への影響が少ない	● 洗浄性に優れており、洗浄温度が高いほど洗浄効果が高い ● 金属への腐食性があるため、注意が必要 ● 皮ふや粘膜への影響が強い
用 途	サビ、熱ヤケ、尿石、スケール等、無機物の除去	血液、体液、脂肪等の除去	



✓check 内視鏡の再生処理 —すばやく確実な処理を—

内視鏡は、複数の患者に繰り返し使用されるため、確実な再生処理を行わないと病原微生物を次の患者に伝播させる危険性があります。実際に内視鏡を介した細菌、HBVやHCVなどの肝炎ウイルスによる感染が確認されています¹⁾。消化器内視鏡においては、国内のガイドラインで、内視鏡を介したさまざまな感染を防止するため、洗浄から消毒までの実践的な概要が示されています。

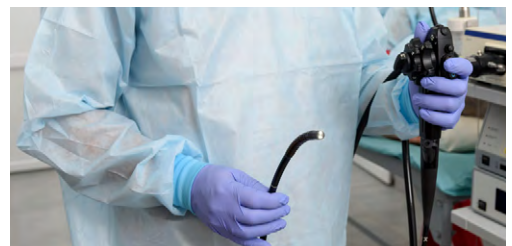

消化器内視鏡の洗浄・消毒の流れ²⁾



機械洗浄・消毒前の予備洗浄

消毒効果を高めるためには、消毒を行う前に、十分な洗浄により内視鏡に付着した汚れを落とし、微生物類を可能な限り減少させる必要があります。


内視鏡洗浄に適した用手洗浄剤

● 酵素系洗浄剤

ガイドライン²⁾にて中性～弱アルカリ性酵素系洗浄剤の使用が明記されています。体液・血液などのタンパク質を効率よく除去できます。

● 洗浄除菌剤

ヨーロッパの内視鏡洗浄ガイドライン³⁾では、作業者の感染の危険性を考慮し、除菌成分を配合した洗浄剤を使用することが推奨されています。

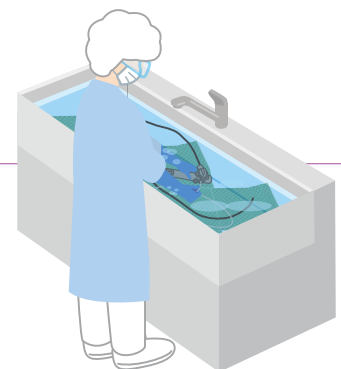

参考

1) 島崎 豊, 吉田 葉子. 医療器材の洗浄から滅菌まで. ヴァンメディカル. 2013.

2) 日本消化器内視鏡学会, 日本環境感染学会, 日本消化器内視鏡技師会. 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド改訂版. 2013.

3) U. Beilenhoff, et al. ESGE-ESGENA guideline: Cleaning and disinfection in gastrointestinal endoscopy-Update 2008.

PQ* パワーウィックシリーズによる医療器具再生処理システム

使用済み医療器具

乾燥・固化防止

使用後すぐにスプレーすることで、血液や体液等の乾燥・固化を防止し、その後の洗浄効果が向上。

中性

スプレー



すぎ
不要

予備洗浄スプレー ▶P.7

洗 浄

用手洗浄

中性



酵素系用手洗浄剤
▶P.7

浸漬洗浄

機械洗浄 前の
予備洗浄にも

中性



酵素系
浸漬洗浄剤
▶P.7

超音波洗浄 に使用可能



酵素系浸漬洗浄剤
<低起泡性> ▶P.8

弱
アルカリ
性



4種の
酵素
多酵素
浸漬洗浄剤
▶P.8



除菌効果
酵素系
浸漬洗浄除菌剤
▶P.8



洗浄剤
1本化
マルチ用途
酵素系洗浄剤
▶P.8

機 械 洗 浄

ジェット洗浄 に使用可能

中性



ジェット洗浄機用
洗浄剤
▶P.10

アルカリ
性



防食性
ジェット超音波
両用洗浄剤S
▶P.10



洗浄剤
1本化
弱
アルカリ
性
マルチ用途酵素系洗浄剤
▶P.8

超音波洗浄 に使用可能



超音波洗浄機用
洗浄剤
▶P.11

潤滑・防錆・乾燥促進

器具の表面に保護被膜を形成し、サビの発生を防止。乾燥時間を大幅カットし、作業時間を短縮。

中性

浸漬使用

ジェット洗浄



潤滑・防錆・乾燥促進剤
パワーミルクClear
▶P.11

滅 菌

必要に応じたメンテナンス

器具の機能低下や破損につながる恐れがある、くもりや変色(熱ヤケ)、腐食(サビ)から器具を守ります。



熱ヤケ除去剤
▶P.11



サビ除去剤S
▶P.12



サビ除去剤
▶P.12



洗浄評価

残留タンパク検出液
▶P.12

✓check 『ソホロ』 医療器具用洗浄剤への応用


ソホロ[※]は、植物油（パーム油）と糖を原料に、天然酵母による発酵技術から作り出されるバイオサーファクタント（天然由来の界面活性剤）で、優れたすずぎ性、安全性、洗浄力もち、汚れの再付着を防止します。

※ソホロは、ソホロースリピッド（一般名称）の原料としての名称。

バイオサーファクタントは生分解性が高く、環境にやさしい界面活性剤として、サラヤはいち早く着目し、独自技術でソホロの大量生産に成功、パワーquickシリーズの一部やささまざまな分野で製品展開しています。

また、TASS（中毒性前眼部症候群）症例の原因として、すずぎ不足による洗浄剤

残留の疑い例が報告されており、近年複雑な構造の器具も多い中、医療器具用洗浄剤を選ぶうえで、洗浄力だけでなく、すずぎ性や安全性も、選定の重要なポイントになります。

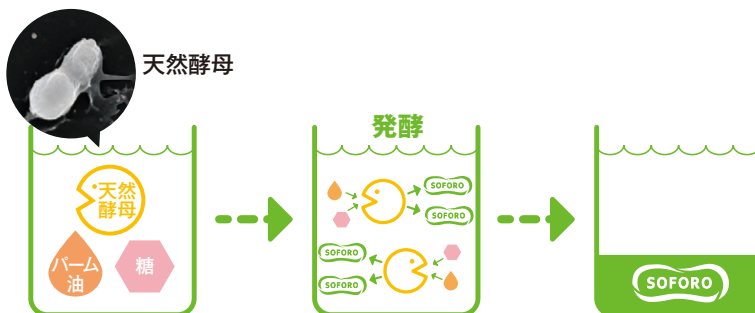


優れたすずぎ性

ブタ皮膚切片を各種界面活性剤水溶液に浸漬したのち水道水ですずぎ、その吸着率を染色定量した結果、ソホロの残留性が最も低いことがわかりました。

（試験に用いられた界面活性剤）

SL:ソホロ、AES:ポリオキシエチレンドデシルエーテル硫酸ナトリウム、SDS:ドデシル硫酸ナトリウム、SP:石けん

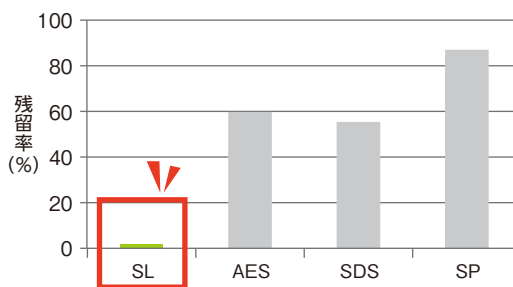

極めて高い安全性

ヒト子宮頸部由来上皮癌細胞（HeLa細胞）とウサギ角膜上皮由来細胞（SIRC細胞）を用いて細胞毒性試験を行った結果、ソホロは他の合成界面活性剤よりも極めて安全性が高いことがわかりました

ソホロは、化粧品や細胞保存液など幅広い製品に使用されています。



	IC ₅₀ [※] (mg/L)		
	SL	AES	SDS
HeLa細胞	2500	150	<10
SIRC細胞	1636	41	98

※IC₅₀（半数阻害濃度）＝標的の半数（50%）の働きを阻害する濃度。数値が大きいくほど細胞毒性が低く、安全性が高い。

十分な洗浄力

各種界面活性剤（0.01%）およびタンパク質分解酵素であるプロテアーゼ（0.05%）を含む水溶液に洗浄インジケータTOSI[®]を投入し、40℃で30分浸漬洗浄した結果、ソホロはプロテアーゼ共存下において他の界面活性剤と同等以上の洗浄力があることがわかりました。

サラヤは、洗浄工程・目的に合わせ、ソホロを医療器具用洗浄剤に応用するなど、洗浄力だけでなく、すずぎ性、安全性などに考慮した製品開発を行っています。

参考：サラヤ株式会社バイオケミカル研究所. 天然洗浄成分ソホロリピッドを配合した医療器具用洗浄剤の応用. 第50回洗浄に関するシンポジウム記念大会2018年.
サラヤ株式会社バイオケミカル研究所. 超低刺激洗浄剤の安全性およびすずぎ性の検証. 第91回日本医療機器学会大会2016年.



マークを掲載した製品に、ソホロを配合しています。

研究実績の
詳細はこちら▶



乾燥・固化防止剤

パワーquick 予備洗浄スプレー



使用後の器具にスプレーすることで、血液など汚染物の乾燥防止効果・静菌効果が3日以上持続（密閉時）します。

- 湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、本洗浄の効果を高める。
- 無泡性のため、すすぎ不要でそのまま洗浄機にセット可能。

吐出量=約0.9mL/回

500mLスプレー付



■使用方法と推奨濃度

スプレー 原液

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50330	500mLスプレー付	12	1,380円

✓check 長時間放置による汚れの乾燥・固化が、その後の消毒・滅菌効果に影響

現場での一次処理廃止に伴い、外来・病棟などで発生した汚染器具が回収・処理されるまで、長時間放置せざるを得ない場合があります。血液やタンパク質は、長時間放置することにより、乾燥・固化し、汚れが落ちにくくなります。

使用後すぐに予備洗浄スプレーを使用することで、血液・体液などの汚れの乾燥・固化を防止し、本洗浄の効果を高めます。また、血液に含まれる塩素イオンによるステンレススチールへの腐食等の悪影響を低減します。



用手洗浄剤

パワーquick 酵素系用手洗浄剤



希釈不要の原液タイプで、泡立ちが良い用手洗浄剤です。

- プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で優れた洗浄効果を発揮。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を維持。
- 希釈不要の原液タイプ。

吐出量=約3mL/回

880mLポンプ付



■使用方法と推奨濃度

用手洗浄 原液

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50362	880mLポンプ付	12	1,800円

浸漬・用手洗浄剤

パワーquick 酵素系浸漬洗浄剤



泡立ちが良く、浸漬だけでなく用手洗浄にも最適です。

- プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で優れた洗浄効果を発揮。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を長期間維持。
- 泡立ちが良く、用手洗浄にも最適。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

浸漬洗浄 1.0% (0.5~2.0%)

用手洗浄 1.0% (0.5~2.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50334	4L	3	12,550円
50333	1L	6	3,480円

浸漬・用手／機械洗浄剤

パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 <低起泡性>



抗菌剤配合で、微生物の増殖を抑制します。

- プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で優れた洗浄効果を発揮。
- 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止し、低起泡性ですすぎ性に優れている。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を長期間維持。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

浸漬洗浄	1.0%(0.5～2.0%)
用手洗浄	1.0%(0.5～2.0%)
超音波洗浄	1.0%(0.5～2.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50332	4L	3	12,550円
50331	1L	6	3,480円

パワークイック 多酵素浸漬洗浄剤



4種の酵素と弱アルカリ性で、強力な洗浄効果を発揮します。

- 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止し、低起泡性ですすぎ性に優れている。
- 特許処方により、高い洗浄力・優れた防食性を持ちながら、弱アルカリ性環境下で高い酵素安定性を実現。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

浸漬洗浄	1.0%(0.5～2.0%)
用手洗浄	1.0%(0.5～2.0%)
超音波洗浄	1.0%(0.5～2.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50336	4L	3	14,560円
50335	1L	6	4,040円

パワークイック 酵素系浸漬洗浄除菌剤



高い洗浄力に、除菌効果をプラス。浸漬液中の微生物に高い除菌効果を発揮します。特許取得の独自技術により、血液・タンパク質汚れを固化させることなく、洗浄・除菌が同時にできます。

- プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で優れた洗浄効果を発揮。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を長期間維持。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

浸漬洗浄	1.0%(0.5～2.0%)
用手洗浄	1.0%(0.5～2.0%)
超音波洗浄	1.0%(0.5～2.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	×
真鍮	○
アルミニウム	×

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50361	4L	3	15,240円
50360	1L	6	4,370円

パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤



1本で、浸漬・用手から機械洗浄まで、幅広い洗浄方法に対応します。

- 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止し、低起泡性ですすぎ性に優れている。
- プロテアーゼと弱アルカリ性の相乗効果で優れた洗浄効果を発揮。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を長期間維持。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄	0.5%(0.2～0.5%)
超音波洗浄	1.0%(0.5～1.0%)
浸漬洗浄	1.0%(0.5～1.0%)
用手洗浄	1.0%(0.5～1.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50356	10L	1	31,920円
50354	4L	3	13,440円

恒温浸漬槽

恒温浸漬槽 TB-35

卓上型
100V



制御ユニット

制御ユニットは取り外し可能で、設置場所に合わせて配置できます。



付属品



洗浄ポケット

計量カップ

恒温・攪拌機能により、酵素系浸漬洗浄剤の効果を引き出します。

- 浸漬液を40℃まで加温・恒温。
- 攪拌機能で、浸漬液の温度をムラなく均一化。
- 電源スイッチONで自動運転を開始。
- 鋼製小物や用具置きとして使用できる洗浄ポケットと、計量カップが付属。

サイズ(mm): (浸漬槽) W422×D650×H230
(制御ユニット) W170×D182×H225
(洗浄ポケット) W170×D125×H140

※浸漬槽に制御ユニットを設置するには上記サイズに加え、W63mm、H89mm程度のスペースが必要です。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50319	本体	1	173,800円

サラヤ キャスターラック

設置に便利な可動式ラック。洗浄剤や備品の整理整頓にも。



サイズ(mm) : W553×D733×H800


イメージ

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50329	—	1	66,000円

✓check 酵素を最大限に活かす！効果的な浸漬洗浄

医療器具用の用手・浸漬洗浄剤には、血液や体液など医療器具ならではの汚れに対応するため、酵素が配合されています。界面活性剤が汚れを浮かし、酵素が分解します。

酵素は一般的に、40～50℃付近で最も活性が高まるため、水温が高すぎても、低すぎてもいけません。浸漬時は水温を40℃付近に保ち、適切な温度管理を行うことが重要です。

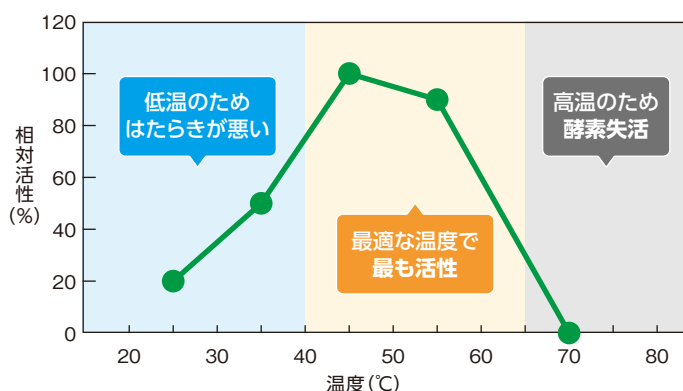

図：一般的な酵素の相対活性と温度の関係

恒温槽の活用で、
効果的な浸漬洗浄を！



恒温浸漬槽 TB-35
▶P.9

機械洗浄剤

パワークイック 洗浄機用洗浄剤M



硬度や水質の影響を受けにくい処方で、RO水使用のジェット洗浄機にも対応します。

- プロテアーゼが血液・タンパク質汚れを強力に分解・除去。
- 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止し、低起泡性ですすぎ性に優れている。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を長期間維持。



4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄	0.5% (0.2~0.5%)
超音波洗浄	1.0% (0.5~2.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	×

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50363	10L	1	28,960円
50357	4L	3	12,210円

パワークイック 洗浄機用洗浄剤



中性、低起泡性タイプのベーシックな洗浄剤です。

- プロテアーゼが血液・タンパク質汚れを強力に分解・除去。
- 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止し、低起泡性ですすぎ性に優れている。
- 酵素安定性が高く、高い洗浄力を長期間維持。



4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄	0.5% (0.2~0.5%)
超音波洗浄	1.0% (0.5~2.0%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	×

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50351	10L	1	28,900円
50364	10L*	1	29,860円
50337	4L	3	12,210円

*マークの10L規格は、特定の洗浄機に対応した仕様です。

パワークイック ジェット洗浄機用洗浄剤



CJDプリオン対策に適応します。

- アルカリの作用で、血液・体液等のタンパク質や脂質を速やかに除去。
- キレート剤が洗浄水を軟水化し、洗浄効率を高める。



4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄	0.5% (0.2~0.5%)
--------	-----------------

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	×
真鍮	×
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50352	10L	1	26,440円
50365	10L*	1	27,280円
50338	4L	3	11,160円

*マークの10L規格は、特定の洗浄機に対応した仕様です。

パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S



特殊界面活性剤の配合により、タンパク質汚れ混在下での過剰な泡立ちを制御。器具の構造に関わらず、安定した、高い洗浄力を発揮します。

- アルカリの作用で、血液・体液等のタンパク質や脂質を速やかに除去。



4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄	0.5% (0.2~0.5%)
超音波洗浄	0.5% (0.2~0.5%)

汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50368	10L	1	28,000円
50367	4L	3	12,120円

パワーquick 超音波洗浄機用洗浄剤



スケール(白残り)が発生しない、すすぎ性の良い洗浄剤です。

- アルカリの作用で、血液・体液等のタンパク質や脂質を速やかに除去。
- キレート剤が洗浄水を軟水化し、洗浄効率を高める。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

超音波洗浄 0.5% (0.2~0.5%)
汚れの程度により()内の濃度でお使いください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	×
真鍮	×
アルミニウム	×

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50339	4L	3	9,750円

メンテナンス剤 等

パワーquick 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear



乾燥時間を短縮し、乾燥ムラを形成しません。器具表面に均一な保護皮膜を形成し、サビを防止、保護します。器具にべたつきが残りにくく、より泡立ちを抑えた処方です。

- 乾燥時間が短縮され、作業効率がアップ。
- 優れた潤滑性、防錆性を発揮。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄 0.5%
浸漬使用 0.5%
洗浄後の器具に使用し、使用後はすすぎ、乾燥させてください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50370	10L	1	25,760円
50371	10L*	1	26,490円
50369	4L	3	10,890円

*マークの10L規格は、特定の洗浄機に対応した仕様です。

パワーquick 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク



乾燥時間を短縮し、乾燥ムラを形成しません。器具表面に均一な保護皮膜を形成し、サビを防止、保護します。

- 乾燥時間が短縮され、作業効率がアップ。
- 優れた潤滑性、防錆性を発揮。

環境
対応
減容容器
4L



■使用方法と推奨濃度

ジェット洗浄 0.5%
浸漬使用 0.3~0.5%
洗浄後の器具に使用し、使用後はすすぎ、乾燥させてください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	○
真鍮	○
アルミニウム	○

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50353	10L	1	25,760円
50366	10L*	1	26,490円
50340	4L	3	10,890円

*マークの10L規格は、特定の洗浄機に対応した仕様です。

パワーquick 熱ヤケ除去剤



短時間で熱ヤケによるくもり・変色を除去し、ステンレス本来の光沢ある表面に戻します。

- 主成分は、食品添加物として認可された無機・有機化合物。
- においを抑えた処方。



■使用方法と推奨濃度

浸漬使用 軽い熱ヤケ：5%に5分程度浸漬
ひどい熱ヤケ：原液に30秒程度浸漬

■対応材質

ステンレス	○
銅	×
真鍮	×
アルミニウム	×

洗浄後の器具に使用し、浸漬後は、流水で十分にすすいでください。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50341	1L	6	3,330円

パワークイック サビ除去剤S



1L

視認性に優れ、サビ除去時に液色が紫色に変化します。

- ステンレス器具についた強固なサビを短時間で除去。



■使用方法と推奨濃度

浸漬使用 50% (10%～原液)
サビの程度により()内の濃度でお使いください。
洗浄後の器具に使用し、浸漬後は、流水で十分にすすいでください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	×
真鍮	×
アルミニウム	×

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50355	1L	6	3,360円

パワークイック サビ除去剤



環境
対応
減容容器
4L

刺激臭がほとんどなく、快適な作業環境を保ちます。

- 弱酸性の環境下における無機・有機キレート剤の相乗効果により、ステンレス器具のサビを速やかに分散・溶解。



■使用方法と推奨濃度

浸漬使用 50% (20%～原液)
サビの程度により()内の濃度でお使いください。
洗浄後の器具に使用し、浸漬後は、流水で十分にすすいでください。

■対応材質

ステンレス	○
銅	×
真鍮	×
アルミニウム	×

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50342	4L	3	11,200円


パワークイック 残留タンパク検出液



250mL

洗浄後の器具に残留したタンパク質を青色に着色し、清浄度を評価します。

- 成分は、食品添加物を使用。
- においを抑えた処方。

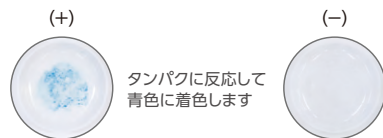

タンパクに反応して
青色に着色します



■使用方法と推奨濃度

滴下使用 原液
水で軽くすすぎ結果を確認した後、洗浄剤で洗浄してください。

■対応材質

あらかじめ試してお使いください。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50343	250mL	12	オープン


パワークイック 4Lボトル用ポンプ



パワークイックシリーズの4Lボトルに装着し、簡単に使用液を計量できます。

- ※再度吐出する際は、押し切ったポンプを手で引き上げてください。

吐出量=25mL/回

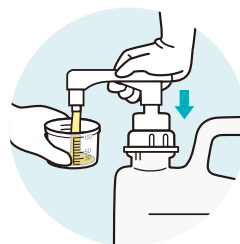

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
65059	—	15	オープン

拭き取り検査機器

ルミテスター Smart



医療現場の汚れ(血液、体液、排泄物、微生物等)に存在する、ATP、ADP、AMPの量を測定できる、拭き取り検査機器です。

- ATP、ADP、AMPの量が多ければ洗浄不足、少なければ洗浄良好と判断でき、鋼製小物や消化器内視鏡の洗浄評価、手指や環境の衛生チェックに最適。
- 専用アプリとの連動で、測定値を自動で管理、分析が可能。

サイズ(mm) : W65×D40×H176
アルカリ単3電池 2本付き

携帯型
アルカリ
乾電池



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
74534	本体	1	99,800円

ルシパック A3



ATP+ADP+AMPを検出できる検査試薬。
Surfaceは拭き取り検査試薬、Waterは水・液体用検査試薬。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
74560	(Surface) 100本入	1	24,000円
74559	(Surface) 40本入	1	12,000円
74561	(Water) 100本入	1	24,000円

ルシスワブ ES



内視鏡チャンネルの拭き取りに適したルシパック試薬専用の拭き取りスワブ。
ルシパック試薬と一緒にお使いください。

個包装40袋入り(40本入)。

全長(mm) : 約2,500

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
—	2.0-2.2 40回用	1	15,600円
—	2.8-3.2 40回用	1	15,600円
—	3.7-4.2 40回用	1	15,600円

✓check 定期的な洗浄評価で、洗浄の質をチェック！

洗浄後の器具は、本当にキレイですか？

医療器具再生処理工程において、「洗浄」は重要なステップであり、非常に高いレベルが求められています。
正しく洗浄できていることを確認するためにも、定期的に洗浄評価を行いましょう。

洗浄評価のご提案

洗浄評価サービスや、評価ツールをご用意しております。詳しくは、担当営業にお問い合わせください。


日常的に実施

1日1回や毎週など施設で判断

色素染色法

タンパク質を試薬で染色して判定

パワーウィック
残留タンパク検出液
▶P.12

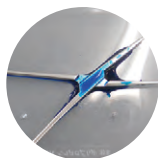

拭き取り法

蛋白質やATPなど指標物質を綿棒で拭き取り
試薬と反応させて判定

ルミテスター Smart
▶P.13



年1回以上実施


- OQ、PQ、適格性の再確認時
- 洗浄プログラムの設定・変更時
- 洗浄剤の変更、洗浄機の修理後 など

OQ : 装置を操作手順に従って運転した時、定めた限度内での装置
作動結果が得られることを確認し、記録すること
PQ : 設備やシステムが適正な性能を維持し、期待される結果が
得られることを確認し、記録すること

抽出定量法

直接
判定法
臨床使用された器具を
用いる

間接
判定法
疑似汚染物を塗布した
テストデバイスを
用いる

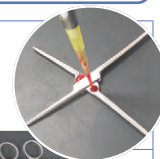

洗浄評価サポートサービス ▶P.14

参考：一般社団法人日本医療機器学会. 医療現場における滅菌保証のガイドライン2021.

サラヤの洗浄評価サポートサービス

サラヤでは、安心・安全な医療提供に貢献するため、洗浄の質の保証をサポートします。

直接判定法

実際に洗浄した後の医療器具の清浄度評価

簡単・すぐに
結果がわかる

パワーフイック残留タンパク検出液を用いた色素染色法

パワーフイック残留タンパク検出液を洗浄後の医療器具に滴下するだけで、医療器具にタンパク質が残留していないかを目視でチェックできます。日常的な清浄度チェックに適しています。


パワーフイック残留タンパク検出液を用いた清浄度確認の手順



洗浄後の医療器具にパワーフイック残留タンパク検出液を滴下します。



30秒間放置します。

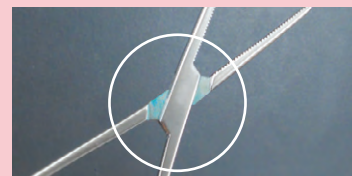

水で軽くすすいでください。タンパク質が残っている場合、明青色に染まります。

タンパク質量
を数値化

BCA(ビシンコニン酸)試薬を用いた抽出判定法

洗浄後の医療器具に残存したタンパク質を専用抽出液で完全に抽出し、BCA法により測定します。タンパク質量を数値化できるため、より高いレベルでの清浄度管理につながります。

BCA法を用いた残留タンパク質量測定の手順



専用抽出液を用いて洗浄後の医療器具に残存したタンパク質を完全に抽出します。



抽出液をBCA試薬と反応させます。



吸光度を測定してタンパク質量を算出します。

間接判定法

疑似汚染物を用いた洗浄力評価と適切な洗浄工程の確認


洗浄システムの
検証やWDの
バリデーション
の一部※に

洗浄評価用テストデバイスを用いた洗浄評価


医療現場で発生する汚染状況を想定し、決められた一定の条件で作製した洗浄評価用デバイスを用いて行います。現状の洗浄システムや新たな洗浄システムの検証、WDの洗浄工程バリデーションとして活用いただけます。

※このテストデバイスを用いた評価は日本医療機器学会「医療現場における滅菌保証のガイドライン2021」でWDのバリデーションの一部として洗浄器の性能確認用に用いることが推奨されています。

医療機関における洗浄力評価の手順

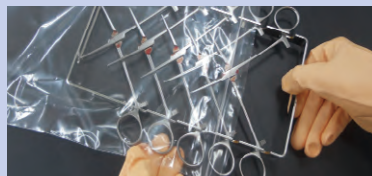

パックされたテストデバイスを開封します。

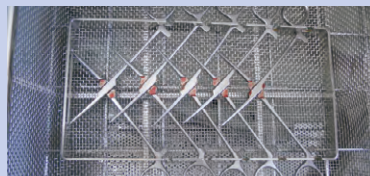

バスケットにセットし、洗浄→乾燥を行います。



抽出判定法(BCA法)にて評価します。

結果報告

洗浄評価後、試験結果報告書を提出いたします



用途	液性	品名 (規格)	特徴	使用方法				
				ジェット 洗浄	超音波 洗浄	浸漬洗浄	用手洗浄	その他
洗 浄 剤	アルカリ性	 4L パワーquick ジェット洗浄機用洗浄剤 (4L/10L/10L*) ▶P.10	無泡性 プリオン対策	●				
		 4L パワーquick ジェット超音波両用洗浄剤S (4L/10L) ▶P.10	無泡性	●	●			
		 4L パワーquick 超音波洗浄機用洗浄剤 (4L) ▶P.11	無泡性		●			
	弱アルカリ性	 4L パワーquick マルチ用途酵素洗浄剤 (4L/10L) ▶P.8	低起泡性 ソホロ配合	●	●	●	●	
		 4L パワーquick 多酵素浸漬洗浄剤 (1L/4L) ▶P.8	低起泡性 ソホロ配合 4種の酵素		●	●	●	
		 4L パワーquick 酵素系浸漬洗浄除菌剤 (1L/4L) ▶P.8	起泡性 除菌効果		●	●	●	
	中 性	 4L パワーquick 洗浄機用洗浄剤M (4L/10L) ▶P.10	低起泡性 ソホロ配合 RO水対応	●	●			
		 4L パワーquick 洗浄機用洗浄剤 (4L/10L/10L*) ▶P.10	低起泡性 ソホロ配合	●	●			
		 4L パワーquick 酵素系浸漬洗浄剤<低起泡性> (1L/4L) ▶P.8	低起泡性 ソホロ配合		●	●	●	
		 4L パワーquick 酵素系浸漬洗浄剤 (1L/4L) ▶P.7	起泡性			●	●	
		 880mL パワーquick 酵素系用手洗浄剤 (880mL) ▶P.7	起泡性				●	
		 500mL パワーquick 予備洗浄スプレー (500mL) ▶P.7	無泡性					スプレー (すぎ不要)
		 4L パワーquick 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear (4L/10L/10L*) ▶P.11	低起泡性	● (すぎ不要)		● (すぎ不要)		
メン テ ナ ン ス 剤	弱酸性	 4L パワーquick 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク (4L/10L/10L*) ▶P.11	低起泡性	● (すぎ不要)		● (すぎ不要)		
		 1L パワーquick サビ除去剤S (1L) ▶P.12	低起泡性			●		
	酸性	 4L パワーquick サビ除去剤 (4L) ▶P.12	低起泡性			●		
		 1L パワーquick 熱ヤケ除去剤 (1L) ▶P.11	無泡性			●		
		 250mL パワーquick 残留タンパク検出液 (250mL) ▶P.12	無泡性					滴下

*マークの規格は、特定の洗浄機に対応した仕様です。

推奨使用濃度	備 考	対応材質			
		ステン レス	銅	真鍮	アルミ
0.5% (水10Lに対し50mL)	汚れの程度により 0.2～0.5% (水10Lに対し20～50mL)	○	×	×	○
0.5% (水10Lに対し50mL)	汚れの程度により 0.2～0.5% (水10Lに対し20～50mL)	○	○	○	○
0.5% (水10Lに対し50mL)	汚れの程度により 0.2～0.5% (水10Lに対し20～50mL)	○	×	×	×
ジェット洗浄 : 0.5% (水10Lに対し50mL) 超音波洗浄 : 1.0% (水10Lに対し100mL) 浸漬・用手洗浄 : 1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により ジェット洗浄 : 0.2～0.5% (水10Lに対し20～50mL) 超音波洗浄・浸漬 : 0.5～1.0% (水10Lに対し50～100mL)	○	○	○	○
1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により 0.5～2.0% (水10Lに対し50～200mL)	○	○	○	○
1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により 0.5～2.0% (水10Lに対し50～200mL)	○	×	○	×
ジェット洗浄 : 0.5% (水10Lに対し50mL) 超音波洗浄 : 1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により ジェット洗浄 : 0.2～0.5% (水10Lに対し20～50mL) 超音波洗浄 : 0.5～2.0% (水10Lに対し50～200mL)	○	○	○	×
ジェット洗浄 : 0.5% (水10Lに対し50mL) 超音波洗浄 : 1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により ジェット洗浄 : 0.2～0.5% (水10Lに対し20～50mL) 超音波洗浄 : 0.5～2.0% (水10Lに対し50～200mL)	○	○	○	×
1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により 0.5～2.0% (水10Lに対し50～200mL)	○	○	○	○
1.0% (水10Lに対し100mL)	汚れの程度により 0.5～2.0% (水10Lに対し50～200mL)	○	○	○	○
原液		○	○	○	○
原液		○	○	○	○
0.5% (水10Lに対し50mL)		○	○	○	○
ジェット洗浄 : 0.3～0.5% (水10Lに対し30～50mL) 浸漬使用 : 0.5% (水10Lに対し50mL)		○	○	○	○
50% (水500mLに対し500mL)	サビの程度により 10% (水900mLに対し100mL)～原液	○	×	×	×
50% (水500mLに対し500mL)	サビの程度により 20% (水800mLに対し200mL)～原液	○	×	×	×
5% (水4Lに対し200mL)	ひどい熱ヤケの場合、原液	○	×	×	×
原液		あらかじめ試してお使いください。			



医療器具の消毒¹⁾

消毒とは、生存する微生物の数を減らすために用いられる処理方法で、必ずしも微生物をすべて殺滅したり除去するものではありません。

分類	定義	処理	一般細菌	真菌 ※1	結核菌	ウイルス (エンベロープ)		芽胞	サラヤ提案製品（例）
						有	無		
消毒	高水準	過酢酸(5分間) グルタラル (30分～1時間) フタラル(5分間) 熱水消毒 (80℃・10分間)	○	○	○	○	○	○ ※2	アセサイド6%消毒液 ▶P.24
	中水準	次亜塩素酸ナトリウム アルコール ポビドンヨード	○	○	○	○	△	× ※3	ヤクラックスD液1% 消毒用エタノール 消エタサラコール
	低水準	第四級アンモニウム塩 クロルヘキシジングル コン酸塩 両性界面活性剤	○	○	×	○	×	×	ヤクゾールE液0.1 サラヤ塩化ベンザルコニウム 10%液

○：有効 △：一部有効または効果が劣る ×：無効

※1 糸状菌を除く ※2 フタラルは、バチルス属の芽胞を除いて有効 ※3 次亜塩素酸ナトリウムは、殺芽胞効果を示す

高水準消毒の特徴²⁾

消毒薬	消毒に要する時間※	利点	欠点	備考
過酢酸	5分間	殺菌力が強い	材質を傷めることがある 刺激臭が強い	10分間を超える浸漬を避ける
グルタラル	10分間	材質を傷めにくい 比較的安価	刺激臭が強い	0.05ppm以下の環境で用いる (換気に特に留意する)
フタラル	10分間	材質を傷めにくい 緩衝化剤の添加が不要	汚れ(有機物)と強固に結合する	すすぎが行いにくいいため、内視鏡自動 洗浄・消毒装置での使用が望ましい

※添付文書に記載の「消毒に要する時間」は、過酢酸で5分間以上、グルタラルで30分間以上、フタラルで5分間以上。グルタラルおよびフタラルでの消毒時間は、本ガイドラインと添付文書では異なる。本ガイドラインでは、種々の実験データや英米での現状を勘案して消毒時間を決定。

参考：1) 大久保憲，尾家重治，金光敬二．2025年版消毒と滅菌のガイドライン．へるす出版．2025．

2) 日本消化器内視鏡学会，日本環境感染学会，日本消化器内視鏡技師会．消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド改訂版．2013．より一部改変

医療器具の滅菌

滅菌とは、一般細菌から芽胞まで、すべての微生物を死滅させることをいいます。

分類	定義	処理	一般細菌	真菌	結核菌	ウイルス (エンベロープ)		芽胞	サラヤ提案製品 (例)
						有	無		
滅菌	すべての微生物を死滅させる	過酸化水素ガス滅菌 過酸化水素ガスプラズマ滅菌 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ) 低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌 エチレンオキシドガス滅菌 化学的滅菌(過酢酸10分間、グルタラール 3~6時間)	○	○	○	○	○	○	 卓上高圧蒸気滅菌器 AC-17 ▶P.19  過酸化水素ガス滅菌器 ステリエース100 SA-100 ▶P.21  アセサイド 6%消毒液 ▶P.24

○：有効

✓check 化学的インジケータによる滅菌効果の確認

滅菌の工程が正しく実施されたかを確認する指標の一つである化学的インジケータ (Chemical Indicator : CI) は、用途や性能別に6つのタイプに分類されています。推奨される頻度で、正しく使用することが重要です。

分類	名称	用途・特徴
タイプ1	プロセス・インジケータ	滅菌工程を通過したか確認する 使用頻度：すべての包装に必ず使用
タイプ2	特定の試験のためのインジケータ	真空脱気式蒸気滅菌器の空気除去を確認するためのインジケータで、ポウイー・ディックテストパックとも呼ばれる 使用頻度：必ず毎日の暖機運転のあと、運転開始前に使用し、合格を確認  ステラワン ポウイー・ディックテストパック ▶P.23
タイプ3	シングルバリアブル・インジケータ	1つの重要プロセス変数*に反応するインジケータ
タイプ4	マルチバリアブル・インジケータ	2つ以上の重要プロセス変数に反応するインジケータ
タイプ5	インテグレーティング・インジケータ	すべての重要プロセス変数に反応し、指標菌の死滅曲線と関連するインジケータ
タイプ6	エミュレーティング・インジケータ	すべての重要プロセス変数に反応するインジケータで、最も精度が高い

包装内部用インジケータ

*重要プロセス変数：滅菌方法ごとに定められている滅菌条件のこと 例) 高圧蒸気滅菌【温度、時間、飽和蒸気】、過酸化水素ガス滅菌【温度、時間、ガス濃度】

包装内部用インジケータ

滅菌物個々の包装内部がタイプごとに指定された滅菌条件の規定値 (SV値) を通過したことを確認するために用いられます。なお、ガイドラインでは、2つ以上の滅菌条件を指標とする、**タイプ4～6**のいずれかを、すべての包装に使用することが推奨されています。



切って使ってはいけない？

タイプ4～6のCIは、仕様上、メーカーの指示がない箇所で分割して使用すると、滅菌剤の浸透性が変わる可能性があり、CIの結果にも影響が出ると考えられます。コスト削減等で、**分割して使用したい場合は、切り離し可能な製品を選びましょう。**



滅菌包装物の大きさによりハサミ等で分割可能なインジケータ
ステラワン AC-500 / EO-500 ▶P.23

参考：一般社団法人日本医療機器学会. 医療現場における滅菌保証のガイドライン2021.

高圧蒸気滅菌器

卓上高圧蒸気滅菌器 AC-17

管理医療機器

卓上型
1P 200V



医療機器認証番号：305ADBZX00023000

医療機器クラス分類：クラスⅡ／特定保守管理医療機器

ヨーロッパ規格のEN13060に準拠した、最高水準クラスBの卓上高圧蒸気滅菌器です。

- シンプルな器材から複雑な形状の器材まで、幅広く対応。
 - 視認性・操作性に優れた4.2インチの液晶ディスプレイを採用。グローブを着用したまま操作可能なタッチスクリーン。
 - 滅菌の記録は、画面上で直近の運転内容を確認できる他、必要に応じて用紙やラベルへの出力、メモリーへの記録が可能。
- ※水道水は使用できません。精製水をご使用ください。

サイズ(mm)：W500×D665×H430

チャンバー寸法(mm)：Φ248×350

チャンバー内容積：17L


電源：AC200V(単相) 50/60Hz

商品コード	規格	入数	1台標準価格(税別)
45359	本体	1	880,000円

付属品




排水チューブ

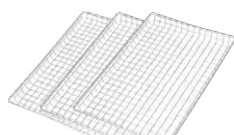

トレイ×3



トレイハンドル

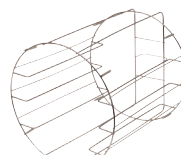

トレイラック



電源コード



タッチスクリーン

視認性・操作性に優れた4.2インチ液晶ディスプレイを採用。グローブを着用したまま操作可能。

内部



電源スイッチ

ボタン電池カバー

プリンター

SDカードポート

排水タンク排水口

給水タンク排水口

3Dで
見てみよう!

SCAN ME



スマートフォンのカメラでQRコードを読み取ってください

滅菌工程サイクル	所要時間	工程内容
スタンダード B 134℃・4分	45分	ハンドピース、ピンセット、鋼製小物などの一般的な医療器具用のサイクル 包装条件：非包装／一重包装／二重包装
スタンダード B 121℃・20分	60分	繊維、プラスチックなど 134℃のサイクルに耐えられない医療器具用のサイクル 包装条件：非包装／一重包装／二重包装
クイック S 134℃・4分	30分	繊維製品以外の処理を行う短時間のサイクル 包装条件：非包装／一重包装
プリオン 134℃・19分	60分	滅菌時間を延長した一般的な医療器具用のサイクル 包装条件：非包装／一重包装／二重包装
B-D / Helix テスト	30分	ボウイー・ディックテストなどで蒸気の浸透性を検証するサイクル
バキュームテスト	20分	チャンバー内の気密性を確認するサイクル

※被滅菌物の積載量や包装条件により滅菌トータル時間は異なります。

ステラワン ボウイー・ディックテストパック



色の変化が分かりやすく、判定しやすい化学的インジケータ。

ISO11140-1 Type2に準拠した、ボウイー・ディック試験用のパック。

▶P.23



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
41989	30個入	4	13,440円

ステラワン AC-500



色の変化が分かりやすく、判定しやすい化学的インジケータ。

オートクレーブ滅菌用。121℃ 20分、134℃ 4分以上で反応。

▶P.23



滅菌包装物の大きさによりミシン目に沿って、ハサミ等で3つに切り離し可能

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
42114	500枚入	50	6,000円

滅菌精製水



薬価収載医薬品

商品コード	規格	入数
44915	500mL	20

プリンター用紙



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45275	11m×5巻	20	4,480円

AC-17用ラベル用紙



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45370	1巻	50	2,800円

設置に便利な、「サラヤ キャスターラック」もございます(▶P.9)。

check 小型高圧蒸気滅菌器の活用

小型高圧蒸気滅菌器とは、容量が60L未満の蒸気滅菌器です。小型高圧蒸気滅菌器は、ヨーロッパの規格である、EN13060で3つのクラスに分類されています。

クラス分類	空気排除方式	滅菌バッグ(包装)	固形の器具 鋼製小物など	多孔性の器具 リネン類など	中空の器具 ハンドピースなど
クラス N	重力置換式	×	○	×	×
クラス S	製品により異なる	△	○	△	△
クラス B	プレバキューム式	○	○	○	○

クラスN…包装されていない固形の器具のみ滅菌が可能。滅菌後はすぐに使用しなければならない。

クラスS…クラスNに加え、滅菌器の製造業者が指定した器具および包装の物が滅菌可能。

クラスB…包装された固形、多孔性、中空の器具が滅菌可能。

※ハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ滅菌(可能ならばクラスB)することが強く勧められています。

ご提案例

- 大型の滅菌器を設置するスペースがない
- 滅菌器のサイズダウンを検討している
- 病棟や手術室で緊急に滅菌する必要性がある

クラスBに準拠



卓上高圧蒸気滅菌器
AC-17 ▶P.19

参考：高階雅紀. 医療現場の滅菌 改訂第5版. へるす出版. 2020.

大久保憲, 尾家重治, 金光敬二. 2025年版消毒と滅菌のガイドライン. へるす出版. 2025.

日本歯科医学会 厚生労働省委託事業. 一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版). 2019.

過酸化水素ガス滅菌器

ステリエース100 SA-100

管理医療機器 床置型
3P 200V

医療機器認証番号: 228ADBZX00109000

医療機器クラス分類: クラスⅡ/ 特定保守管理医療機器

過酢酸を含有した過酸化水素ガスにより、安全で低コスト・ハイスピードな低温滅菌処理を実現しました。

サイズ(mm): W760×D980×H1,720

電源: AC200V(三相) 24A(50/60Hz)



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45287	本体	1	15,000,000円



● 滅菌剤管理システム

滅菌剤の使用期限、滅菌剤残量を自動感知・管理する安全設計。



● 大型タッチスクリーン

日本語で分かりやすく表示される、簡単操作。



● 広く出し入れしやすいチャンバー

作業効率を高める大容量で、実用性を考慮した設計。



● プリンター搭載

滅菌履歴を印刷し、運用状況の確認や管理に。



● プラズマ

プラズマを使い、滅菌剤の成分を確実に分解し、残留リスクを低減。



● フットスイッチ

器材を持ったまま手を使わずにチャンバードアの開閉が可能。



安全性

過酸化水素に過酢酸を含有することで、過酸化水素の低濃度化を図り、高い殺菌力を維持しつつ滅菌処理後の残留リスクを低減します。ハイブリッドクリーンシステムによって、使用後の過酸化水素水溶液を速やかに分解することで、人体と環境に配慮しています。



ハイスピード

効率の良い器材運用が可能です。
スタンダードサイクル: 約47分
クイックサイクル: 約30分



低コスト

過酸化水素の低濃度化により、低コストを実現しました。

Low Cost

ステリエース100での1回の滅菌にかかるコスト試算

電気代 70円
滅菌剤 1,680円

1回の滅菌で 約 **1,750** 円と経済的。

電気代: ステリエース100でスタンダードサイクルを選択。単価29.8円/kWh(東京都(23区)の電気料金で算出。
滅菌剤: ステリリキッド 定価8,400円/本

ステリエース100 SA-100 消耗品・別売オプション品

※当社指定のものをお使いください。
他のものでは、思わぬトラブルが生じる恐れがあります。

ステリリキッド



原液 液状 医薬用外劇物

ステリエース専用の滅菌剤。
5回分/本

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45279	75mL × 2本入	8	16,800円

ケミカルインジケータ



ステリエース専用Cl。
過酸化水素ガスに反応して色が変わる。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45280	250枚入	5 × 20	7,840円

バイオロジカルインジケータ



ステリエース専用BI。
24時間培養後、培養液の色で判定。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45296	30本入	10	26,210円

BIインキュベーター




卓上型
100V

ステリエース専用BIの培養装置。


商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45286	—	1	74,800円

ピンマット

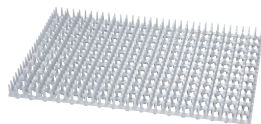

器材同士の接触を防止。

サイズ(mm) : W160×D240×H25

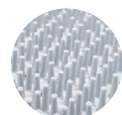

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45274	—	10	8,400円

プリンター用紙



滅菌履歴印刷用紙。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
45275	11m × 5巻	20	4,480円

メンテナンスのご案内

ステリエースを安心してご使用いただくために、ご施設のニーズに合わせたメンテナンスプランをご用意しています(ステリエースは、年2回の定期メンテナンスが必要です)。

フルメンテナンス契約	定期点検契約	スポット点検
- 年2回の点検作業(すべての点検項目) - 定期的な交換推奨部品の交換 - 故障時対応(部品代、出張費、技術料を含む)	- 年2回の点検作業(すべての点検項目) - 定期的な交換推奨部品の交換 ※故障時の部品代、出張費、技術料は別途	- 点検作業 - 定期的な交換推奨部品の交換 ※故障時の部品代、出張費、技術料は別途

詳しくは、担当営業にお問い合わせください。


化学的インジケータ 色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。

ステラワン ボウイー・ディックテストパック



ISO11140-1 Type2に準拠した、ボウイー・ディック試験用のパックです。


使用後は、パッケージ裏の「使用済み」サインが変色し、簡単に確認できます。

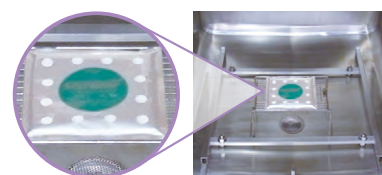

使用済み → 使用済み

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
41989	30個入	4	13,440円

ステラワン AC-500

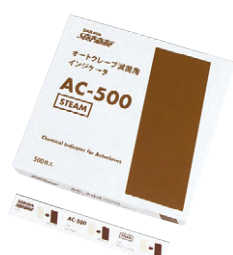

オートクレーブ滅菌用。

- 温度・時間・蒸気に反応する化学的インジケータ (121℃ 20分、134℃ 4分以上)。
- 3つに切り離して使用可能(最大1,500回分)。



滅菌包装物の大きさによりミシン目に沿って、ハサミ等で3つに切り離し可能。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
42114	500枚入	50	6,000円

ステラワン EO-500



エチレンオキシドガス滅菌用。

- EO混合ガス(EO 20%、CO₂ 80%)を使用するポンベ式滅菌器専用の化学的インジケータ。
- 3つに切り離して使用可能(最大1,500回分)。



滅菌包装物の大きさによりミシン目に沿って、ハサミ等で3つに切り離し可能。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
42113	500枚入	50	7,000円

ステラワン CI-S-134-8 / CI-S-134-18

ISO11140-1 Type6に準拠した、オートクレーブ滅菌用化学的インジケータ。

- 134℃ 8分、18分のラインアップ。
- 優れた耐水性で、ドレーンによる影響を低減。
- プリオン対策の一環としても使用可能。




CI-S-134-8



CI-S-134-18

赤い点が消えていくように見えるため、判定しやすい。

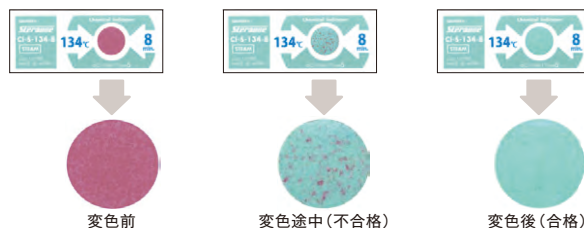

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
41988	(CI-S-134-8) 250枚入	10	5,600円
41987	(CI-S-134-18) 250枚入	10	5,600円

過酢酸製剤 化学的滅菌・殺菌消毒剤

アセサイド6%消毒液

希釈 液状 劇薬 医療用医薬品



500mL×2

過酢酸の持つ殺菌力(消毒:5分間、化学的滅菌:10分間)を維持し、かつ、実用液の安定性を高め、過酢酸が実用下限濃度(0.2%)以上あれば、繰り返し使用可能な医療器具専用の化学的滅菌・殺菌消毒剤です。

- 芽胞をはじめ、広範囲の微生物に有効。
- 常温下、短時間で高水準消毒や化学的滅菌が可能。
- タンパク汚れを固着させない。
- 使用後の廃液は、速やかに分解される。

■効能・効果

医療器具の化学的滅菌又は殺菌・消毒

- 使用上の注意等詳細は、電子添文をご参照ください。

■使用方法

浸漬使用



アセサイド6%消毒液の調製使用量

実用量	アセサイド6% 消毒液使用量	使用浸漬槽
10L	精製水9Lに 500mL 1セット	10L浸漬槽 AS-10
5L	精製水4.5Lに 250mL 1セット	10L浸漬槽 AS-10
3L	精製水2.7Lに 75mL 2セット	3L浸漬槽 AS-3
1.5L	精製水1.35Lに 75mL 1セット	3L浸漬槽 AS-3



250mL×2



75mL×2

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
42292	500mL×2	6	9,680円
42291	250mL×2	6	6,050円
42293	75mL×2	8	1,940円

アセサイド専用浸漬槽

卓上型



AS-10(10L浸漬槽)



AS-3(3L浸漬槽)

アセサイド実用液の調製時や使用中、過酢酸蒸気の拡散を防ぐための専用浸漬槽。

- 5分消毒、10分滅菌のタイマー付き。浸漬時間をアラームでお知らせ。
- トレイ付き。
- 10Lには廃液ホース、3Lには小物バスケット付き。



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
42223	AS-10(10L浸漬槽)	1	13,000円
42251	AS-3(3L浸漬槽)	1	オープン

アセサイドチェッカー


要冷蔵保存商品

アセサイド実用液の過酢酸が、実用下限濃度(0.2%)以上であることを確認するための専用試験紙。

使用期限：開封前 1年半
開封後 半年



反応領域がすべて黒くなれば有効、少しでも白い箇所があれば無効
判定例(除液後7秒後)

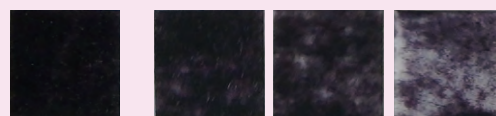

有効

無効


商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
42232	100枚入	100	3,000円

個人防護具

洗浄エリアでは、血液や体液等の湿性生体物質で汚染されており、感染の危険性があるため、作業従事者が安全に作業できるよう、個人防護具を着用し、曝露防止対策を行うことが重要です。また、組み立て・既滅菌エリアでは、洗浄・滅菌後の器具や環境汚染防止のために着用します。

各作業エリアごとのPPE着用例

洗浄エリア (不潔ゾーン)	キャップ、ゴーグル、マスク、ガウン、手袋
組み立てエリア (準清潔ゾーン)	キャップ、マスク、手袋
既滅菌エリア (清潔ゾーン)	キャップ、マスク

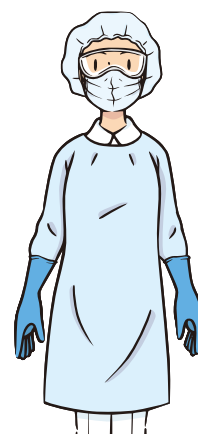

サラヤ サージカルマスク



ASTM F2100 LEVEL 2適合

細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布三層構造。

- ノーズピースはくせづけしやすいアルミニウム板を使用。
- 耳紐は痛くなりにくい平ゴムを採用。

1枚サイズ(mm) : 175×95

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50094	ブルー フリーサイズ 50枚入	10	オープン

サラヤ シールドマスク




ASTM F2100 LEVEL 2適合

アイシールド一体型のサージカルマスク。

1枚サイズ(mm) : 302×175

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51108	ブルー 25枚入	6	オープン

サラヤ ゴーグル

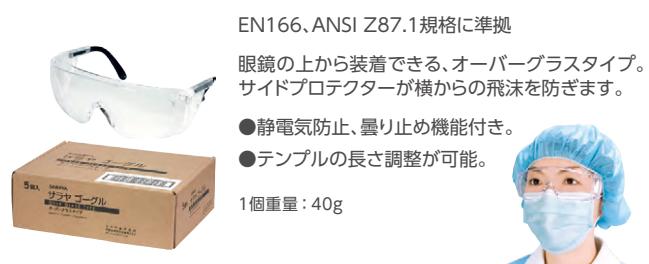

EN166、ANSI Z87.1規格に準拠

眼鏡の上から装着できる、オーバークラスタイプ。サイドプロテクターが横からの飛沫を防ぎます。

- 静電気防止、曇り止め機能付き。
- テンプルの長さ調整が可能。

1個重量 : 40g

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51098	オーバークラスタイプ	5×6	オープン

サラヤ フェイスシールド




軽量のPET素材で、顔全体をカバー。

- 額部分はスポンジ付きで、快適な装着感。
- 防曇加工で曇りにくく、クリアな視界。

1枚サイズ(mm) : 220×330

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50979	25枚入	4	オープン

サラヤ ヘアキャップ

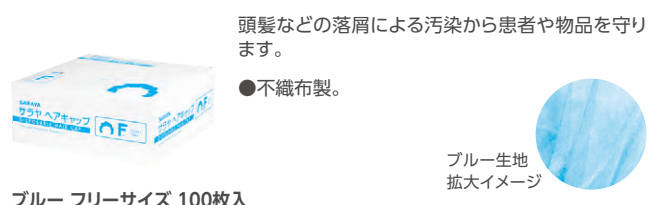

頭髮などの落屑による汚染から患者や物品を守ります。


- 不織布製。

ブルー生地
拡大イメージ

ブルー フリーサイズ 100枚入

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51112	ブルー フリーサイズ 100枚入	6	オープン
51113	ピンク フリーサイズ 100枚入	6	オープン
51114	ホワイト フリーサイズ 100枚入	6	オープン

サラヤ シューズカバー

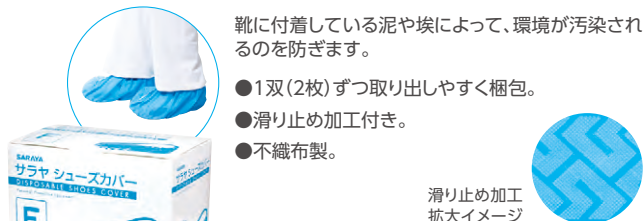

靴に付着している泥や埃によって、環境が汚染されるのを防ぎます。

- 1双(2枚)ずつ取り出しやすく梱包。
- 滑り止め加工付き。
- 不織布製。

滑り止め加工
拡大イメージ

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51101	フリーサイズ 100枚入	3	オープン

サラヤニトリル検査検診用グローブ

一般医療機器



ブルー Sサイズ 200枚入


一般医療機器 届出番号: 27B1X00120000200
非天然ゴム製検査・検診用手袋: JMDN 70976000
医療機器クラス分類: クラスI

しなやかなフィット感で作業がしやすく、耐久性、耐薬品性に優れた高いバリア性能を兼ね備えたニトリル手袋。

- 1枚ずつ互い違いに梱包し、少なくとも取り出しやすい箱設計。
- パウダーフリー、ラテックスフリー。
- 食品衛生法適合品。



滑り止め加工

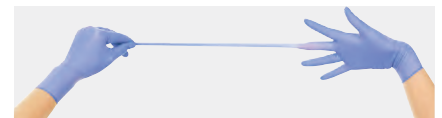

優れた伸縮性&フィット感

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51080	XSサイズ ブルー 200枚入	10	オープン
51081	Sサイズ ブルー 200枚入	10	オープン
51082	Mサイズ ブルー 200枚入	10	オープン
51083	Lサイズ ブルー 200枚入	10	オープン

ホワイトもあります。

ニトリルロング手袋400

一般医療機器



ブルー Sサイズ 50枚入

一般医療機器 届出番号: 27B1X00120000800
非天然ゴム製検査・検診用手袋: JMDN 70976000
医療機器クラス分類: クラスI
抗がん剤耐性試験: ASTM D6978-05 取得済

長さ400ミリのスーパーロングタイプのニトリル手袋。

- 優れた伸縮性とフィット感で、洗浄作業に最適。
- 指先と手のひらに滑り止め加工付き。
- パウダーフリー、ラテックスフリー。
- 食品衛生法適合品。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
50937	Sサイズ 50枚入	10	オープン
50938	Mサイズ 50枚入	10	オープン
50939	Lサイズ 50枚入	10	オープン

サラヤ プラスチックエプロン(袖なし)



ブルー フリーサイズ 50枚入

防水性の高いポリエチレン製で、血液・体液等の湿性生体物質を通しません。

1枚サイズ(mm): 総丈約1,250

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51063	ブルー フリーサイズ 50枚入	20	オープン
51076	ピンク フリーサイズ 50枚入	20	オープン
51077	ホワイト フリーサイズ 50枚入	20	オープン

サラヤ プラスチックエプロン ワイド(袖なし)



ピンク フリーサイズ 70枚入

防水性の高いポリエチレン製で、血液・体液等の湿性生体物質を通しません。

- 首回りが大きく開かず、肩周りまで幅があり、背中上部までカバー。

1枚サイズ(mm): 総丈約1,200
身幅約720

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51196	ブルー フリーサイズ 70枚入	24	オープン
51197	ホワイト フリーサイズ 70枚入	24	オープン
51198	ピンク フリーサイズ 70枚入	24	オープン

サラヤ プラスチックガウン(袖つき)



(ゴム袖式)
ブルー フリーサイズ 15枚入

防水性の高いポリエチレン製で、血液・体液等の湿性生体物質を通しません。

- 袖口の形状は、ゴム袖式と親指フック式の2タイプ。

1枚サイズ(mm):
(ゴム袖式 フリー) 総丈約1,300、袖丈約750
(ゴム袖式 XL) 総丈約1,540、袖丈約830
(フック式 フリー) 総丈約1,300、袖丈約790

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51096	(ゴム袖式)ブルー フリーサイズ 15枚入	10	オープン
51061	(ゴム袖式)ブルー XLサイズ 12枚入	10	オープン
51109	(フック式)ブルー フリーサイズ 15枚入	10	オープン

サラヤ プラスチックガウン ライト(袖つき)



(フック式)
ブルー フリーサイズ 30枚入

防水性の高いポリエチレン製で、血液・体液等の湿性生体物質を通しません。

- 首回りが大きく開かず、背面もしっかり防護。
- たたまれた状態からすばやく装着可能。
- 袖口の形状は、ゴム袖式と親指フック式の2タイプ。

1枚サイズ(mm):
(フック式) 総丈約1,100、袖丈約930
(ゴム袖式) 総丈約1,100、袖丈約840

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51105	(フック式)ブルー フリーサイズ 30枚入	10	オープン
51107	(ゴム袖式)ブルー フリーサイズ 30枚入	10	オープン

環境用除菌クロス

作業環境の感染対策には、あらかじめ薬液を含浸させた、環境用除菌クロスの活用で、すばやく適切に清拭することができます。

サラヤ エタノールクロス80	日常の環境整備、物品の清浄に 80vol%アルコールを含浸した、速乾性のある除菌クロス。 除菌成分残留の心配がない。
サラサイド除菌クロス	日常の環境整備に 洗浄と除菌が同時にできる除菌クロス。 ノンエンベロープウイルスを含む、幅広い抗微生物スペクトルを発揮。
サラヤ ジアクロス 含浸タイプ	血液・体液処理、芽胞対策 等に 除菌成分に次亜塩素酸ナトリウムを配合(1,000ppm以上)し、 細菌・ウイルスを強力に除去。



取り出して
すぐに使用できる



ピローホルダー(別売)
の活用でアクセス向上

環境用除菌クロスは、この他にも製品ラインアップがございます。詳しくは、担当営業にお問い合わせください。

サラヤ エタノールクロス80



高濃度エタノール(80vol%)を含有しています。

- 除菌成分残留の心配がない。
- 速乾性。
- 体温計や聴診器などの除菌・清拭に。

1枚サイズ(mm) : 480枚 150×250
250枚 150×300
80枚 140×210
80枚ピロー 200×200

80枚入容器

250枚入、80枚入

480枚入



詰替タイプには容器フタが付属し、
詰替えるたびに新しい取り出し口に交換できます。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
44143	480枚入容器	4	オープン
44160	250枚入容器	6	5,940円
44162	80枚入容器	20	オープン
44187	80枚入ピロータイプ	30	500円

容器タイプは、詰替規格もあります。

サラサイド除菌クロス



第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤の相乗効果で、ノンエンベロープウイルスを含む幅広い抗微生物スペクトルを発揮。

- タンパク汚れ、脂質汚れにも優れた洗浄効果を発揮。

1枚サイズ(mm) : 480枚 150×250
250枚 150×300
80枚 140×210
80枚・30枚ピロー 175×200

80枚入容器

250枚入、80枚入

480枚入



詰替タイプには容器フタが付属し、
詰替えるたびに新しい取り出し口に交換できます。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
51673	480枚入容器	4	オープン
51684	250枚入容器	6	オープン
51681	80枚入容器	20	560円
51686	80枚入ピロータイプ	30	オープン
44186	30枚入ピロータイプ	54	350円

容器タイプは、詰替規格もあります。

サラヤ ジアクロス含浸タイプ



製造後18カ月間、使用開始後2カ月間は有効塩素濃度1,000ppm以上を維持し、幅広い細菌・ウイルスに対して高い除去効果を発揮します(殺芽胞、ウイルス不活化効果)。

- 血液・体液汚染時の処理に最適。
- 液の調製や含浸不要で、取り出してすぐに使用できる。

1枚サイズ(mm) : 140×210

80枚入容器



酸性タイプ
と併用不可



詰替タイプには容器フタが付属し、
詰替えるたびに新しい取り出し口に交換できます。

商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
44181	80枚入容器	20	1,400円
44182	80枚入詰替	20	1,250円

その他ラインアップ

✓check 手荒れを諦めない！感染対策としてのハンドケア

医療従事者にとって、手荒れは深刻な問題であり、個人的な素因だけではありません。業務上必要な感染対策のための、頻回の手洗いや手指消毒も、手荒れ発症の原因の一つです。



手荒れがもたらす 問題点

- 細菌の温床となる
- 乾燥した皮ふがはがれ落ち、環境を汚染する
- 角層バリア機能が低下することで、血液媒介ウイルスなどに感染する危険性が増加する
- 手指衛生遵守率の低下を招く

対策のポイント

- ✓ 自分の手肌に合ったハンドソープ、手指消毒剤を選ぶ
- ✓ ペーパータオルの材質や拭き方に注意する（強く擦らず、押しあてるように水分を拭き取る）
- ✓ 温水を使用しない

✓ ハンドローションを効果的に使用する

保湿・保護成分が配合されており、バリア機能を補完するものを選びましょう。

保湿成分が水分保持能を高め、保護成分やエモリエント成分が皮ふ表面の水分蒸発を抑えることで、皮ふの乾燥を防ぐことができます。

ハンドローション使用例



ハンドケア

プライムバリアローション



保湿・保護成分をダブルで配合し、手肌の水分量を保ちながら、角層バリア機能を補います。

- 手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影響を与えない。
- さらっとした使用感。
- 無香料、無着色。

300mLポンプ付吐出量=約0.4mL/回

300mLポンプ付

原液 乳液状 弱酸性 無香料 化粧品



商品コード	規格	入数	1コ標準価格(税別)
52108	300mLポンプ付	20	3,590円
52107	60mL	30	810円

サラヤのサポートツール

サラヤでは、滅菌供給部門業務ご担当者向けの情報提供や各種コンテンツの公開をしています。情報のアップデートや職員教育等に、ぜひご活用ください。

情報誌

中材・手術室業務担当者のための情報誌 「Supplysm」(サプライズム) (年2回発行)

感染対策を前提とした再生処理に関して、正確な情報や最新情報、器具の具体的な洗浄方法などとともに、各病院の取り組みを詳しくご紹介します。また、手術室における感染対策について、SSI対策や啓発など、さまざまな角度からテーマを取り上げています。



Web セミナー

医療・福祉施設で求められる感染症情報や効果的な対策など、役立つ情報をご提供します。著名な先生方を講師としてお招きし、全国での感染対策セミナーやWebセミナーを開催しています。(不定期)



情報サイト



サラヤの医療・介護関係者向けサイト MedicalSARAYA

Medical SARAYA

検索



<https://med.saraya.com/>



製品情報をはじめ、感染対策に関する学術情報、セミナー・展示会情報などをご紹介します。施設での啓発や教育にお役立ていただける、各種会員コンテンツが充実しています。

おすすめコンテンツ(一例)

啓発ポスター 手順パネル



理解度チェック WEB STUDY



教育用動画



情報誌「Supplysm」 バックナンバー



各種ツール、コンテンツの公開・更新情報等は、サイトや会員様向けメールマガジンでお知らせします。

関連施設のご案内



サラヤメディカルトレーニングセンター

サラヤでは機器を用いた効果的な研修と、知識の向上を促す場を提供することを目的にSMTC(サラヤメディカルトレーニングセンター)を開設しています。

Seminar

大型スクリーンを設置しており、感染対策セミナーやフォローアップセミナー等を実施(不定期)。



Training

セミナー時に各種製品をご覧いただける他、安心して機器を導入いただけるよう、弊社カスタマーサポート担当が実機を用いて現場を想定したトレーニングを実施。



名称：医療研修施設 SMTC サラヤメディカルトレーニングセンター
住所：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目6番4号本町ガーデンシティ4F
収容人数：セミナールーム 72名



電車でのアクセス

新幹線「新大阪」よりお越しの際は、Osaka Metro御堂筋線で11分
JR「大阪」よりお越しの際はOsaka Metro御堂筋線「梅田」より5分
Osaka Metro御堂筋線「なんば」より4分
Osaka Metro「本町」7号出口直結
エレベーターで4Fまでお越しください



お車でのアクセス

- ・梅田方面よりお越しの際は、御堂筋をなんば方面に進み「瓦町3」で側道へ「備後町3」の信号を左折
一筋目を右折いただき直進、本町通を渡りそのまま直進してください
- ・なんば方面よりお越しの際は、堺筋を北へ「本町1」を左折
そのまま直進し、左手に見える「つるやゴルフ」を左折してください
- ・ビルの駐車場、もしくは近隣の駐車場をご利用ください

COMING
SOON

2025年夏

常設ショールーム開設予定

in SMTCTレーニングルーム内



洗浄機・滅菌器の
実機体験

医療施設向け
製品の展示



課題に合わせた
製品・サービスの
ご提案

詳細は決まり次第、ホームページ等でご案内いたします。

サラヤは、患者、医療従事者双方の安全のために 医療器具の再生処理をトータルサポートします。

豊富な品揃えで 様々なニーズに対応

医療器具の再生処理のみならず、
手指衛生や个人防护具、環境整備等、
幅広い製品をご提案します。



医療器具の 再生処理を トータルサポート

高品質な製品を 安定供給

国内4カ所と海外10カ所の自社工場によって、
高品質な製品を安定的に供給します。



関東第一工場



ニトリル手袋工場

多様な情報提供

最新の感染症情報や効果的な対策
など、役立つ情報をご提供します。

- ・全国で感染対策セミナーやWebセミナーを開催
- ・教育用動画、情報誌、啓発ポスターの提供



セミナーの様子



安心の サポート体制

全国に営業担当、テクニカルサポート担当が
駐在する他、ご購入機器について、カスタマー
サポートセンターが営業と連携して最適な
ご提案をいたします。



医療・介護関係者向けサイト Medical SARAYA

- ・製品情報(製品紹介・電子添文等)・情報誌バックナンバー
- ・各種ガイドライン紹介・セミナー・学会展示・展示会情報

医療・介護関係者向けサイト
Medical SARAYAへは
こちらから▶



<https://med.saraya.com/>

お問い合わせ窓口

tel.06-6797-2525

製品に関する学術的なご質問にお答えします

サラヤ株式会社 学術部

tel.06-4706-3938

東京サラヤ株式会社

本 社：〒140-0002 東京都品川区東品川1-25-8

サラヤ株式会社

本 社：〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>