

SARAYA

すべて揃う!

クリニックに「欠かせない」 感染対策用品

手指衛生 / 環境衛生 / 個人防護具 / 医療器具洗浄 / 外皮用殺菌消毒剤



医療施設における感染対策



医療施設として、院内の感染対策に必要な備品はそろっていますか？
 また、手指衛生や個人防護具の使用方法は正しく認識、遵守されていますか？
 全ての患者と医療従事者を感染の危険から守るためには、標準予防策（スタンダードプリコーション）を徹底することが最も重要です。

■ 感染対策の基本的な考え方

標準予防策（スタンダードプリコーション） ※米国疾病管理予防センター（CDC）が提唱

感染症の有無に関わらず、全ての人に対して、汗を除く全ての血液、体液、分泌物、排泄物、損傷のある皮膚、粘膜などの湿性生物物質は、感染の危険性があるとみなして対応する方法

■ 標準予防策の具体例

手指衛生 ▶P.5,6

適切なタイミングで確実な手指衛生を実践することが大切です。



図：患者ケア時における手指衛生の5つのタイミング


WHO "My 5 Moments for Hand Hygiene" より改変 URL:<https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906>

環境衛生 ▶P.7,8


環境からの感染の多くは手指を介して伝播するため、ドアノブや電灯のスイッチなど、医療従事者や患者が直接接触する機会が多い部分は、高頻度に清掃、消毒を行う必要があります。



！ やってはいけない感染対策

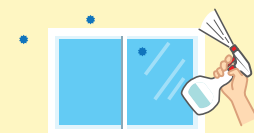

空間への薬液噴霧は効果が不確実な上、薬液を吸い込む危険性があるのでやめましょう。

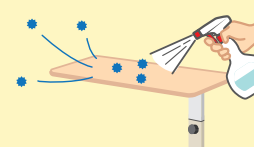

対象物に薬液を直接スプレーすると、微生物が周囲へ飛び散る危険性があります。布などにスプレーしてから清拭しましょう。

個人防護具 PPE: Personal Protective Equipment ▶P.9

PPEを正しく取り扱うことは、使用者自身の安全を守るために非常に重要です。

PPE取り扱いのポイント

✓ 適切なPPEの選択

防水性・耐久性（消毒薬や抗がん剤などの耐薬品性）に優れ、フィットするものを選びましょう。

✓ 原則、使い捨て

使用後は、病原体が付着している可能性があります。再使用することで感染拡大と曝露の両方のリスクを伴います。

✓ 使用後は正しく廃棄

使用後、汚染面に触れないように汚染面を内側にして、すみやかに廃棄しましょう。

✓ 外した後は、手指衛生

外す際に手指が汚染される可能性があります。PPEの着用を過信せず、必ず手指衛生を行いましょう。




患者ケアに使用した器材 ▶P.10

消毒や滅菌に先立ち、医療器具用洗浄剤を用いて有機物を除去しましょう。

用手洗浄

汚染器材の量が少ない場合や微細な器材の洗浄に

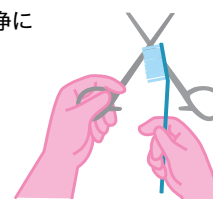

浸漬洗浄

酵素系洗浄剤を使用する場合、40℃程度で使用することで高い洗浄力が得られます



！ 曝露防止のための感染対策

使用済みの医療器具は湿性生物物質に汚染されているため、感染の危険性があります。汚染のレベルに応じて手袋、ガウンなどのPPEを着用しましょう。

エリア別商品提案

新型コロナウイルス感染症は、2024年現在も依然として流行が続いており、感染力が強い新たな変異株の出現も懸念されています。また、インフルエンザの感染者数も増加しており、重症化リスクが高い高齢者・基礎疾患がある患者への感染拡大を防ぐことが重要です。

サラヤでは、幅広い製品、情報提供を通じて、患者と医療従事者が安心できる院内環境づくりをお手伝いします。

- 手指衛生用品
- 環境衛生用品
- 個人防護具
- 医療器具洗浄
- 外皮用殺菌消毒剤

トイレ

- UD-9600RS ▶P.5
- ホイップウォッシュ 無香 ▶P.5
- ペーパータオル バルビュア ▶P.5
- ペーパータオルホルダー PH-400N ▶P.5
- SC-460R ▶P.8
- 便座きれいくん NV ▶P.8

受付・待合室

- サニサーラ Aqua Light ▶P.5
- プロテクト UD-300T ▶P.6
- サラサイド除菌クロス ▶P.7
- エアリアコンパクト ▶P.7
- サラヤサージカルマスク・サージカルマスク Ex ▶P.9

玄関

- UD-9600RA ▶P.5
- ウィル・ステラ V ▶P.5
- IS-2020 ▶P.6
- プロテゲートスマート ▶P.6

スタッフルーム

- サニサーラ Aqua Light ▶P.5
- プライムバリアローション ▶P.6
- プロテクト UD-300T ▶P.6
- サラサイド除菌クロス ▶P.7
- サラヤサージカルマスク・サージカルマスク Ex ▶P.9
- サラヤプラスチックガウン・プラスチックエプロン ▶P.9

処置室


- UD-9600RS ▶P.5
- ホイップウォッシュ 無香 ▶P.5
- サラヤアルコール含浸綿 ▶P.8
- サラヤターニケット ▶P.8
- サラヤ針捨てBOX ▶P.8
- サラヤサージカルマスク・サージカルマスク Ex ▶P.9
- サラヤニトリルグローブエクステンド ▶P.9
- サラヤプラスチックガウン・プラスチックエプロン ▶P.9
- パワークイック予備洗浄スプレー ▶P.10
- パワークイック酵素系浸漬洗浄剤 中性 ▶P.10
- サラヤ消毒用エタノール ▶P.10

診察室

- サニサーラ Aqua Light ▶P.5
- プロテクト UD-300T ▶P.6
- サラヤエタノールクロス 80 ▶P.7
- サラヤアルコール含浸綿 ▶P.8
- サラヤサージカルマスク・サージカルマスク Ex ▶P.9
- サラヤニトリルグローブエクステンド ▶P.9

啓発ポスター

医療従事者向け、来院者向けの各種感染対策ポスター等をご用意しております。

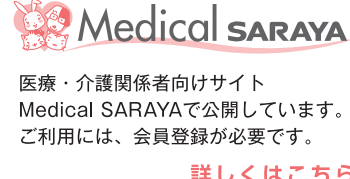

手指消毒剤 携帯用ツール

手指消毒剤を携帯して、いつでもどこでも手指消毒！
撥水素材のため、アルコール含浸綿や薬液含浸クロスで清拭可能で衛生的に管理できます。

撥水ポシェット



98467

撥水ウエストポーチ



98507

98506

撥水ベルト



98508

98483

手指衛生



目に見える汚れがある場合
石けん + 流水で手洗い



目に見える汚れがない場合
アルコール製剤で手指消毒



手指衛生の徹底

医療関連感染は手を介して伝播されることが多く、手指衛生は感染対策の基本です。
より衛生的に手指衛生を実施するために、ノータッチ式ディスペンサーの活用をおすすめします。



ノータッチ式ディスペンサー

UD-9600R

手を触れなくてもセンサー感知で石けん液、消毒液を自動吐出します。

※電池・使用液は付属していません。
※アルカリ乾電池単2型4本使用。



石けん
泡状/液状

UD-9600RS

商品コード 41635
規格 本体
1コ標準価格 12,000円
(1ケース入数 6)



消毒
噴射/ジェル状/泡状

UD-9600RA

商品コード 41634
規格 本体
1コ標準価格 12,000円
(1ケース入数 6)



手指衛生の手順はこちらから

玄関消毒で水際対策

玄関は、患者、医療従事者、来訪者など様々な人が出入りする場所のため、感染源を「持ち込まない」「持ち込ませない」ための環境整備が非常に重要です。

顔認証手指衛生管理システム

プロテゲートモニター

表面温度の測定とマスク着用の確認、ノータッチ式ディスペンサーが一体となった手指衛生システムです。

※使用液は付属していません。

商品コード 41719
規格 本体
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 1)
サイズ W305×D319×H1,460mm



表面温度の測定

スタンド型
100V

ディスペンサー用スタンド

IS-2020

啓発パネル付きディスペンサー用スタンド。場所を選ばず、どこにでも設置できます。

※ディスペンサー、使用液は付属していません。

商品コード 41804
規格 本体
1コ標準価格 9,350円
(1ケース入数 1)
サイズ W350×D350×H1,390mm



スタンド型
電源不要

▶ P.5

UD-9600RAを設置できます

使用液

手洗い用石けん
ホイップウォッシュ 無香



泡状
ティスホソザル 減容容器
商品コード 41995
規格 600mL 9600RS用
1コ標準価格 1,210円
(1ケース入数 6)

手指消毒剤
ウィル・ステラV



液状
ティスホソザル 減容容器
商品コード 41950
規格 600mL 9600RA用
1コ標準価格 2,830円
(1ケース入数 6)

手指消毒剤
サニサーラ Aqua Light



ジェル状
ティスホソザル 減容容器
商品コード 41738
規格 600mL 9600RA用
1コ標準価格 2,630円
(1ケース入数 6)

手洗い用石けん (医薬部外品)

ホイップウォッシュ 無香

泡のキメ・泡質にこだわり、手肌のうるおいを守りながらしっかり洗浄します。

有効成分：イソプロピルメチルフェノール



無香料
泡状
環境対応
減容容器

商品コード 23406
規格 500mL泡ポンプ付
1コ標準価格 1,020円
(1ケース入数 12)

手指消毒剤 (第3類医薬品)

ウィル・ステラV

ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲のウイルス・細菌に効果的です。3種類の保湿成分配合で手荒れにも配慮しています。

有効成分：エタノール76.9~81.4vol%



液状
環境対応
減容容器

商品コード 42427
規格 1L噴射ポンプ付
1コ標準価格 4,140円
(1ケース入数 10)

手指消毒剤 (第3類医薬品)

サニサーラ Aqua Light

繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で手袋装着や次の作業がスムーズに。

有効成分：エタノール76.9~81.4vol%



ジェル状
商品コード 42140
規格 60mL
1コ標準価格 340円
(1ケース入数 48)

ジェル状
商品コード 42139
規格 250mLポンプ付
1コ標準価格 1,340円
(1ケース入数 10)

▶ P.4



手指消毒剤
携帯用ツールに対応

感染対策のためのハンドケア

手荒れは細菌の温床となりやすく、手指衛生遵守率の低下につながるなど院内全体の感染対策に影響します。ハンドローションを使用するなど、日頃から手荒れ対策に取り組むことが重要です。

ハンドケア

プライムバリアローション

保湿と保護、ダブルの作用で手肌にうるおいを与えます。

約4時間おきに(業務開始前、休憩後など)ご使用ください。

無香料

商品コード 52108
規格 300mLポンプ付
1コ標準価格 3,590円
(1ケース入数 20)



ノータッチ式ディスペンサー

プロテクト UD-300T

センサー感知で自動吐出します。設置場所を選ばない小型タイプ。

※電池、使用液は付属していません。
※アルカリ乾電池単3型4本使用。

商品コード 41790
規格 ピンク
1コ標準価格 3,300円
(1ケース入数 12)
サイズ W90×D104×H205mm
ホワイトもあります。



壁付型/卓上型
アルカリ乾電池

▶ P.5



手指消毒剤
サニサーラ Aqua Light
250mLにも対応

手洗い関連用品

ペーパータオル パルピュア

バージンパルプ100%原料です。

商品コード 51864
規格 200枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 49袋)
1枚サイズ 220×160mm



手洗い関連用品

ペーパータオルホルダー PH-400N

ペーパータオルを400枚セットできます。

商品コード 51871
規格 -
1コ標準価格 1,980円
(1ケース入数 4)



環境衛生

便利な薬液含浸クロスでウイルス対策を

環境からの感染拡大を防ぐため、高頻度接触表面のこまめな清拭が重要です。

除菌クロス

サラサイド除菌クロス

油脂汚れ、タンパク汚れを除去する洗浄効果と高い除菌効果を発揮します。ノンエンベロープウイルスなど幅広い微生物に効果が期待できます。



環境用除菌
クロスの選び方は
こちらから



第四級
アンモニウム塩と
エタノール配合



商品コード 51684
規格 250枚入 容器
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 6)
1枚サイズ 150×300mm
詰替もあります。



商品コード 51681
規格 80枚入 容器
1コ標準価格 560円
(1ケース入数 20)
1枚サイズ 140×210mm
詰替もあります。



商品コード 51686
規格 80枚入 ピロータイプ
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 30)
1枚サイズ 175×200mm

除菌クロス

サラヤ エタノールクロス80

エタノールと精製水のみを含有した、即効性と速乾性のある除菌クロスです。薬剤残留の心配がないため、待合室の子どものおもちゃの清拭におすすめです。

高濃度
エタノール
80vol%配合



商品コード 44160
規格 250枚入 容器
1コ標準価格 5,940円
(1ケース入数 6)
1枚サイズ 150×300mm
詰替もあります。



商品コード 44162
規格 80枚入 容器
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)
1枚サイズ 140×210mm
詰替もあります。



商品コード 44187
規格 80枚入 ピロータイプ
1コ標準価格 500円
(1ケース入数 30)
1枚サイズ 200×200mm

除菌クロス

サラヤ ジアクロス

次亜塩素酸ナトリウム配合の専用液を含浸させて使用する清拭クロスです。血液・汚物等の処理に。

次亜塩素酸
ナトリウム
0.1%以上



商品コード 42386
規格 80枚入 容器
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)
1枚サイズ 140×210mm
詰替もあります。



商品コード 42385
規格 230mL 専用液
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)

製品紹介動画は
こちらから



安心できる空気環境の提供を

待合室や診察室の空気清浄におすすめです。

空気循環式紫外線清浄機

床置型
100V

エアリア コンパクト

取り込んだ空気を内蔵の紫外線ランプにより除菌し清潔な空気を送り出します。フィルター掃除の手間がなく、ランプの交換だけで運用ができます。

※交換用ランプについて詳しくはお問い合わせください。

商品コード 73016
規格 本体
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 1)
サイズ W300×D300×H806mm



- 強力な除菌力を発揮します
本機中に取り込んだ空気を内蔵の紫外線(UV-C)ランプにより除菌し、清潔な空気を送り出します。
- ランニングコストに優れています
紫外線ランプは連続使用で8000時間(約1年)と長寿命。
- 人体に対して影響がありません
人に直接紫外線が当たらないので安全です。

トイレによる感染拡大を防ぐために

トイレの便座は、大腸菌やノロウイルスなど、様々なウイルスや細菌の温床です。これらの病原体は、使用者間で伝播し、感染症を引き起こす可能性があります。トイレ周りの感染対策と清潔な環境維持のために、便座除菌クリーナーの活用がおすすめです。



便座クリーナー用ディスペンサー

SC-460R

レバーを押して液をトイレトペーパーにふきつけて使用します。

※使用液は付属していません。

壁付型
電源不要
噴射



商品コード 41753
規格 本体
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 1)
サイズ W102×D88×H242mm
カートリッジボルト付

使用液

便座除菌クリーナー 液状

便座きれいくん NV

ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮する便座クリーナーです。便座の材質への影響にも配慮しています。

商品コード 50295
規格 420mL SC-460R用
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 12)



消毒剤
消毒剤
消毒剤

商品コード 50292
規格 5L
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 3)



処置室で使える感染対策用品

ディスポーザブルの駆血帯や針刺し切創防止用の廃棄容器の活用をおすすめします。

外皮用消毒剤

指定医薬部外品

サラヤアルコール含浸綿

アルコールと精製水のみを含有した含浸綿です。手指・皮ふの洗浄、消毒にご使用いただけます。



商品コード 44152
規格 100包(1枚包装)
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 40)
1枚サイズ 40×40mm

駆血帯(ディスポーザブル)

サラヤ ターニケット

幅広サイズで、患者への負担を減らすことができます。ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。



商品コード 45320
規格 1巻(25本分入)
1コ標準価格 680円
(1ケース入数 20)
1本サイズ 25×450mm



すべりにくい
エンボス加工

ミシン目で
切り離して使用

巻き方の動画は
こちらから



医療廃棄物回収容器

サラヤ 針捨てBOX

針や鋭利物を取り扱う医療従事者のために、CDC(米国疾病管理予防センター)のNIOSHが求める機能性、アクセスの容易さ、視認性、便宜性が考慮された、針刺し切創防止用の廃棄容器です。



商品コード 45327
規格 1L
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 60)
サイズ W110×D110
×H133mm



商品コード 45335
規格 1.5L
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 30)
サイズ W150×D151
×H137mm



商品コード 45368
規格 3.2L
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)
サイズ W256×D136
×H194mm
回転タイプもあります。

注射針取り外し
方法は
こちらから



※本カタログ記載の標準価格は、すべて消費税抜きの価格です。

個人防護具

個人防護具(PPE)の適正使用

標準予防策では、医療従事者と患者を感染症病原体から守るため、必要な状況に応じて個人防護具(PPE)を着用することが求められています。PPEは作業内容や汚染リスクに合わせて適切に選び、正しく着脱することが重要です。



マスク

サラヤ サージカルマスク

細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布三層構造です。ASTM F2100規格 レベル1適合

商品コード 51118
規格 ホワイト フリーサイズ 50枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)
1枚サイズ 175×95mm
Sサイズ、ピンクもあります。



マスク

サラヤ サージカルマスクEx

形状工夫によるフィット性の向上と肌荒れに配慮した素材を採用し、素肌にやさしく呼吸がしやすい着心地を実現しました。JIS T 9001規格 クラスII適合

商品コード 51055
規格 ホワイト フリーサイズ 50枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)
1枚サイズ 165×85mm



手袋

一般医療機器

サラヤ ニトリルグローブエクステンド

バリア性に優れ、滑らかで伸びのいい着用感の手袋。ラテックスフリー。粉なし。食品衛生法適合。一般医療機器 届出番号27B1X00120000202 非天然ゴム製検査・検診用手袋、歯科用手袋

商品コード 50968
規格 ブルー Mサイズ 200枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 10)
サイズ XS、S、M、L
ホワイトもあります。



手袋

サラヤ プラスチック手袋E

ポリ塩化ビニル製。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮しています。薄手で経済的です。粉なし。

商品コード 53515
規格 Mサイズ 100枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 10)
サイズ S、M、L、XL



ガウン

サラヤ プラスチックガウン

防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。

商品コード 51096
規格 ブルー フリーサイズ 15枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 10)
1枚サイズ 総丈約1,300×袖丈約750mm
XLサイズもあります。



エプロン

サラヤ プラスチックエプロン

防水性の高いポリエチレン製の使い捨てエプロンです。

商品コード 51063
規格 ブルー フリーサイズ 50枚
1コ標準価格 オープン
(1ケース入数 20)
1枚サイズ 総丈約1,250mm
ピンク、ホワイトもあります。



作業別のPPE着用例

PPE	手袋	マスク	エプロン・ガウン
使用シーン	湿性生体物質に触れる可能性がある場合は、必ず着用	バリア性能とフィット感がある医療用マスクの着用	腕まで汚染する可能性がある場合は、ガウンを着用
採血・血管確保	○	必要に応じて	必要に応じて
呼吸器症状のある患者のケア	必要に応じて	○	必要に応じて
口腔・気管内吸引 ※ゴーグルやフェイスシールドの着用も必要	○	○	○
嘔吐物・排泄物の処理	○	○	○
医療器材の洗浄・消毒 ※ゴーグルやフェイスシールドの着用も必要	○	○	○

医療器具洗浄

医療器具の再生処理

医療器具の再生処理(洗浄・消毒・滅菌)は正確な手順で確実に実施することが重要です。有機物が付着しているとき消毒薬の効果が減弱したり、滅菌不良の原因になったりするため、消毒や滅菌の前には十分に洗浄しましょう。



医療器具用前処理剤 無泡性 液状 中性

パワーquick 予備洗浄スプレー

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続します(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。

商品コード 50330
規格 500mLスプレー付
1コ標準価格 1,380円
(1ケース入数 12)



医療器具用メンテナンス剤 低起泡性 液状 中性

パワーquick 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear

浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成し、器具のサビを防止し保護します。

商品コード 50369
規格 4L
1コ標準価格 10,890円
(1ケース入数 3)



医療器具用洗浄剤 液状 中性 発泡性

パワーquick 酵素系用手洗浄剤

プロテアーゼと界面活性剤が、汚れをしっかりと除去。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。

商品コード 50362
規格 880mLポンプ付
1コ標準価格 1,800円
(1ケース入数 12)



医療器具用洗浄剤 液状 中性 発泡性

パワーquick 酵素系浸漬洗浄剤

プロテアーゼと界面活性剤が汚れを分解・除去。1本で浸漬と用手洗浄に使用できます。

商品コード 50334
規格 4L
1コ標準価格 12,550円
(1ケース入数 3)
1Lもあります。
低起泡性もあります。



外皮用殺菌消毒剤

手指、皮ふの消毒や医療機器の消毒に

外皮用殺菌消毒剤 (薬価収載医薬品)

サラヤ消毒用エタノール

日局 消毒用エタノール

禁忌(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するため)

●使用上の注意等詳細は、電子添文をご参照ください。



商品コード 44105
規格 500mL
(1ケース入数 20)

外皮用殺菌消毒剤 (薬価収載医薬品)

消エタサラコール

エタノールにイソプロパノールを添加した製剤。

禁忌(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用があるため)

●使用上の注意等詳細は、電子添文をご参照ください。




商品コード 44108
規格 500mL
(1ケース入数 20)

外皮用殺菌消毒剤 (薬価収載医薬品)

ヤクラックスD液1%

次亜塩素酸ナトリウム
抗微生物スペクトルが広く、一般細菌や真菌、ウイルスに有効です。

●使用上の注意等詳細は、電子添文をご参照ください。

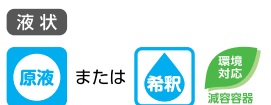

商品コード 44043
規格 5kg
(1ケース入数 2)

サラヤは、医療現場での課題解決につながる製品とサービス、
情報提供によりすべての人の健康と安全・安心をサポートします。

豊富な品揃えで 様々なニーズに対応

診察室、処置室などの作業場所や作業内容に
応じて、幅広い感染対策用品をご提案します。



高品質な製品を 安定供給

国内4カ所と海外10カ所の自
社工場によって、高品質な製
品を安定的に供給します。



医療現場の 感染対策を トータルサポート

多様な情報提供

最新の感染症情報や対策方法など、
役立つ情報をご提供します。

- ・全国で感染対策セミナーやWebセミナーを開催
- ・教育用動画、情報誌、啓発ポスターの提供



セミナーの様子



安心の サポート体制

お客様のニーズに合った製品選びや
感染対策に関する専門的なご質問な
ど、専属スタッフがサポートします。



感染対策に関する様々なコンテンツをお届け

医療・介護関係者専用サイト



Medical SARAYA



サラヤの最新情報をプッシュ通知でお知らせ

医療・福祉向けスマートフォンアプリ



SARAYA
Medical & Welfare



お問い合わせ窓口

tel.06-6797-2525

感染対策に関する専門的なご質問にお答えします

サラヤ株式会社 学術部

tel.06-4706-3938

(2024年3月作成)

東京サラヤ株式会社

本 社：〒140-0002 東京都品川区東品川1-25-8

サラヤ株式会社

本 社：〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>