



Compleo-PRO 管理画面

バッジから収集した情報を集計・解析することが可能。
感染対策委員会等の資料作成にもご活用いただけます。

- 取り込んだデータは、グラフや表で表示
- 個人、グループ、部署ごとの手指衛生遵守状況が確認可能
- 個人遵守率のランキング等も表示可能で、効果的なフィードバックをサポート
- 目標を設定することで、医療従事者のモチベーション向上に貢献

イメージ図



品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
コンプレオプロ バッジ	本体	—	42184	49-87696-42184-4
コンプレオプロ ビーコン	本体	—	42186	49-87696-42186-8
コンプレオプロ ノータッチ式ディスペンサー	本体	—	42187	49-87696-42187-5
コンプレオプロ 据置型ホルダー	本体	—	42188	49-87696-42188-2
コンプレオプロ アクセスポイント	本体	—	42189	49-87696-42189-9

**安全にご使用
いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。
指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2023年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

手指衛生モニタリングシステム

Compleo-PRO

コンプレオ・プロ

医療従事者の手指衛生遵守率の指標となる直接観察を自動化
作業者の労力・時間の軽減と、手指衛生コンプライアンスの向上に
お役立ていただけます



Compleo-PRO 手指衛生遵守率の指標 となる直接観察を自動化

Compleo-PRO(コンプレオプロ)は、ワイヤレスデバイスとの組み合わせによって、ベッド周辺における手指衛生遵守状況を把握し、記録を保存します。

■ バッジで個人を認証し、いつ どこで だれが、手指衛生を実施したかを的確に把握

腰元にバッジを装着することで、個人のデータ管理が可能になりました。

■ 手指衛生が必要なタイミング※で実施できていない場合、リアルタイムで警告

患者のベッドに設置したビーコンが位置情報を感知し、手指衛生機会を検知。

手指衛生を実施できていない場合は、遵守不良と判定しバッジが振動。リアルタイムで警告します。

※WHOが示している患者ケアにおいて、手指衛生が必要な5つのタイミングのうち ①患者に触れる前 ④患者に触れた後 を検出

■ 記録データは Compleo-PRO管理画面に自動アップロード

簡単な操作で各種資料作成が可能

バッジがアクセスポイントに近づく、自動的にデータがサーバーにアップロードされるため、データ保存などの手間が一切かかりません。勤務時間に左右されず、個人の手指衛生遵守状況を確認できます。



バッジ

サイズ mm
W55×D55×H7
腰ポケット等に装着して
使用します。
※ACアダプターについては
担当営業にお問い合わせ
ください。

携帯型
充電電池

手指衛生モニタリングシステム Compleo-PRO の概要

ビーコン


●患者のベッドに設置。
バッジの位置情報を
特定し、データを
送信。

ノータッチ式 ディスペンサー

●吐出実績を検知し、
バッジにデータを
送信。

バッジ

●各医療従事者が装着。
個々の手指衛生遵守
状況の記録。
個人認証とデータの
一時保存。

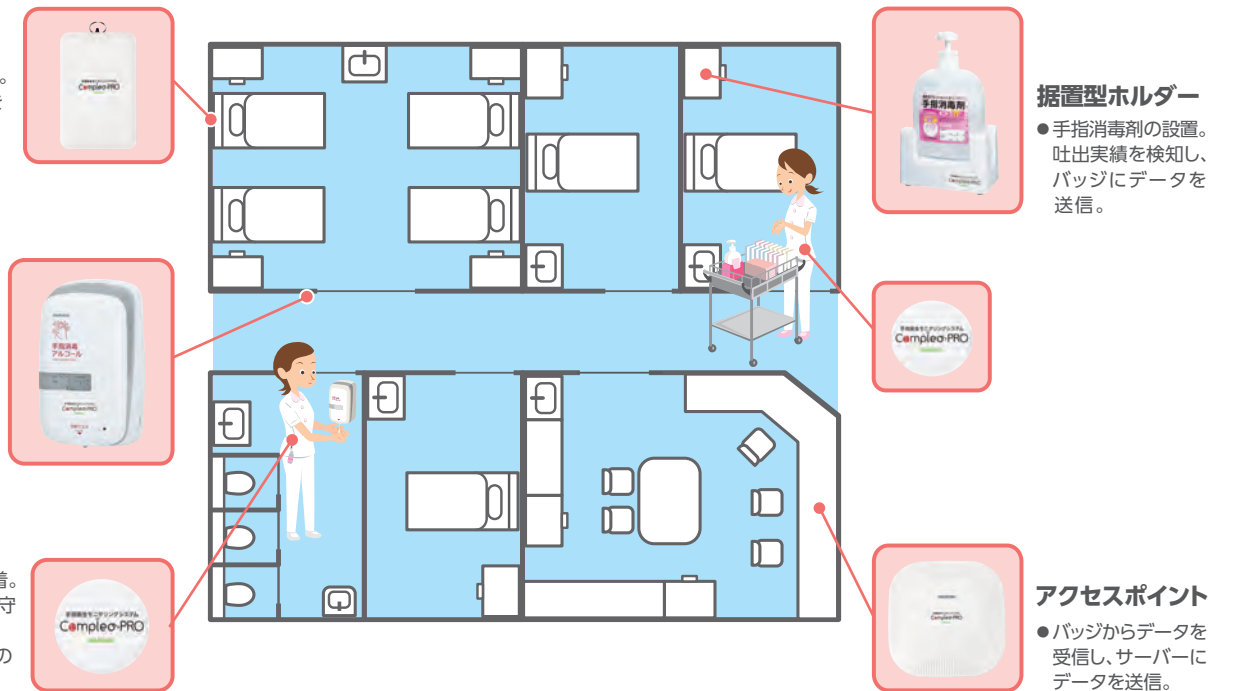

据置型ホルダー

●手指消毒剤の設置。
吐出実績を検知し、
バッジにデータを
送信。

アクセスポイント

●バッジからデータを
受信し、サーバーに
データを送信。

Compleo-PRO 使用イメージ


バッジを腰ポケット等に装着



ノータッチ式ディスペンサーまたは据置
型ホルダーが手指消毒剤の吐出実績を
バッジに送信



ビーコンが接近したバッジを検出し、
位置情報をバッジに送信

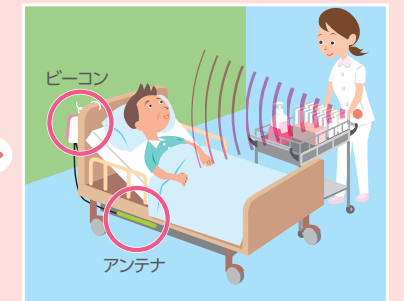

ベッド周辺での滞在時間により、ビーコン
が医療行為の有無(手指衛生機会の発生)
を判定



バッジに手指消毒の記録があれば手指
衛生遵守と判定
記録がなければバッジが振動し警告



バッジがアクセスポイントに接近すると、
データをアクセスポイントが回収。回収し
たデータはサーバーに自動アップロード



ノータッチ式 ディスペンサー

サイズ mm
W142×D101×H248
アルカリ単2乾電池×4本
で使用できます。
※乾電池は付属しておりません
ので別途お買い求めください。
※ACアダプターでも使用できま
す。担当営業にお問い合わせ
ください。

壁付型
センサー
アルカリ
乾電池



据置型ホルダー

サイズ mm
W142×D90×H91
アルカリ単3乾電池×
2本で使用できます。
取付金具を使うことで
手摺にも設置できます。
※乾電池は付属しておりま
せんので別途お買い求め
ください。

卓上型/手摺型
アルカリ乾電池



ビーコン

サイズ mm
W96×D27×H156
(リング、アンテナを含まない)
アルカリ単3乾電池×
4本で使用できます。
※乾電池は付属しておりま
せんので別途お買い求め
ください。

吊下型
アルカリ
乾電池

1ベッドに1台設置

アクセスポイント

サイズ mm
W190×D190×H40
※ACアダプターについては
担当営業にお問い合わせ
ください。

卓上型
100V