

## CCステップス 検体採取用メンブレンシート

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

受付時間：9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

#### 【形状・構造及び原理等】

本製品は 50mm×50mm、厚み 0.1～0.16mm のニトロセルロースのメンブレンシートである。  
検体（バイオフィルム）をメンブレンシートで採取する。  
個包装と共に滅菌処理済み。

#### 【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取することを目的とした器具

#### 【使用方法等】

個包装の封を開けて、精製水、生理食塩水、水道水のいずれかを滴下する  
濡らしたメンブレンシートを約 10 秒間創傷面に当てて、試料を採取する。

#### 【使用上の注意】

- 本製品の使用は 1 回限りで、再使用・再滅菌はしないこと。
- 本製品は包装後滅菌済みの製品なので、包装に破損があった場合には使用しないこと。
- 使用目的以外に使用しないこと。
- 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- 包装を開封後は速やかに使用し、試料採取後は速やかに検査に供すること。
- 本製品はガンマ線照射滅菌処理を施しており、照射の影響で一部着色している場合があるが、性能等に問題はない。
- 使用中に破損した場合は、速やかに使用を中止し、新しいものを使用すること。
- 凍結や加熱をしないこと。
- スタンダードプリコーション（標準予防策）に従い、検体の採取および取扱いには適切な防護具（保護手袋・保護メガネ・保護衣等）を着用すること。
- 検体採取終了後は手をよく洗うこと。
- 使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。

#### \*\*【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

水にぬれないよう注意し、直射日光を避けて室温で保存すること。

##### \*\*有効期間

\*\*36ヶ月〔自己認証による〕

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サラヤ株式会社  
所在地 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

お問い合わせ先  
サラヤ株式会社 学術部  
TEL: 06-4706-3938