



さっと素早く！ 取り付け簡単！

サラヤQシート (ベッドパン用)

ベッドパンに装着して使用する
使い捨ての汚物吸収
シートです。



商品特徴

1

感染防止対策に

ベッドパン使用時における汚物の液漏れや飛散を軽減します。使用後は汚物を内側に閉じ込めることで、汚物からの感染リスクや搬送経路での曝露リスクを防止します。

2

装着や廃棄が簡単で衛生的

手で整えるだけで簡単に装着でき、使用後は取り外して廃棄できます。
ベッドパンに直接汚れが付着しないため、洗浄作業の労力を軽減します。

3

素早くたっぷり汚物を吸収

高分子吸収ポリマー配合で1枚あたり約600mL*吸水できます。

*ベッドパンにセットした状態での目安です。

4

尿量測定に

小さく丸めた状態の重さを測ることで尿量を測定できます。

5


やさしい肌ざわり

ベッドパンが直接お肌に触れず、冬場でも冷たくありません。
また、柔らかくやさしい肌ざわりです。


シートを広げ、そのまますぐに装着可能！

使用方法

- 1** シートを広げ、ベッドパンをシールしていない開口部から奥まで差し込みます。

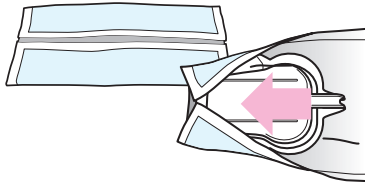

- 2** ベッドパンの窪みまで手でしっかり敷き詰め整えます。

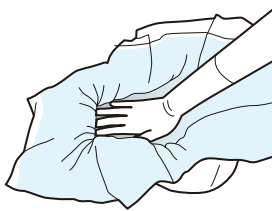


- 3** シートがずれないように注意して、ベッドパンを腰の下にセットします。




廃棄のポイント

- 1** 使用後は汚れた部分を内側に丸め、排泄物が漏れないように捨ててください。

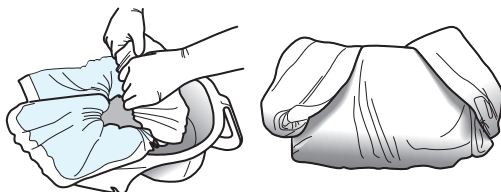

- 2** ベッドパンは使用後ベッドパンウォッシャー等で洗浄・消毒してください。

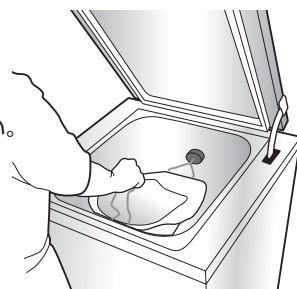

こんな時にも

● 腸管感染症患者の排便に

ノロウイルス感染症、C.difficile感染症患者等の感染拡大防止に

● 化学療法中の患者の排尿・排便に

抗がん剤投与後、一定期間排出される抗がん剤による医療従事者の曝露防止に

● 防災備蓄に

水を使用しないため、断水時でも使用可能
排便による環境汚染防止に

汚物処理時の 个人防护具の着用例

防護具	着用例
マスク	○*
ゴーグル	○*
手袋	○
エプロン	○

*大量の下痢などの場合、必要に応じてマスク・ゴーグルを着用。
マスクとゴーグルの代わりにシールド付マスクを用いることも可能です。



使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 強く引っ張ったり、装着時に強く差し込みすぎるとシートが破れる可能性があります。
- 万一、本品を誤って飲み込んだり、吸収材が目に入った場合は、医師にご相談ください。
- 本品は水洗トイレに流せません。
- 本品を持ったまま振って広げたり手荒に扱うと、吸収材がズレたり、破れる可能性があります。
- 長時間マット等に敷いて使用する保水・吸収シートやおむつではありません。
- 本品をハサミ等で切らないでそのままご使用ください。吸収材がこぼれたり排泄物が漏れる原因になります。
- 使用後、お肌やシートに吸収材が付いた場合は取り除いてください。
- 使用後は、汚れた部分を内側に丸め、不衛生にならないように処理してください。
- 使用後は、ベッドパンに汚物が付く可能性もありますので洗浄・消毒してください。

製品素材	表面材：ポリプロピレン不織布 吸収材：綿状パルプ 吸収紙、 高分子吸収材 防水材：ポリエチレンフィルム 結合材：ホットメルト粘着剤
製品サイズ	60cm×22cm
数 量	60 枚入
1 枚 重量	60 g

日本製

品 名	内容量 / 規 格	1 梱入数	商品コード	JANコード
サラヤQシート ベッドパン用	60枚	1	45330	49-87696-45330-2

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)