

2018年2月 (第1版) 医03 手術用手袋および指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

サラヤニトリルグローブソフトフィット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする、検査・検診用使い捨て使い捨て手袋である。左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダー無し、未滅菌である。

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm) 以上	230	230	230	230
掌幅 (mm) ±5mm	75	85	95	105

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

【使用方法等】

個装箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

- 爪先、刃物等、とがったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合、および製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 着色ムラがある場合でも、品質上問題はない。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保存すること。

2. 使用期限

包装に記載する（底面バーコード、EXP DATE）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サラヤ株式会社
所在地 大阪市東住吉区湯里2-2-8