
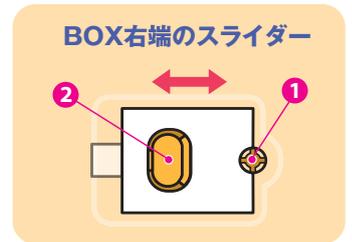


# 「サラヤ 針捨てBOX 3.2L / 7.6L」スライダーの使い方

## ルアーロック式注射針

ロック式の注射針などを外す際には、  
針捨てBOX右端のスライダーをご使用ください。


 スライダーをご使用の際は、手袋を着用してください。

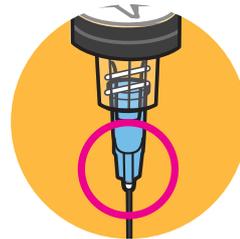


**1** スライダーボタン②を  
押しながら右に動かし、  
注射針外し口  
①を閉じます。




**2** 閉じた注射針外し口①に  
注射針を垂直にまっすぐ  
差し込みます。

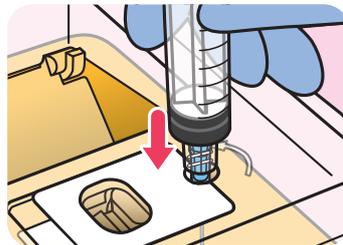

**3** シリンジを左回りに回して、  
注射針を外します。

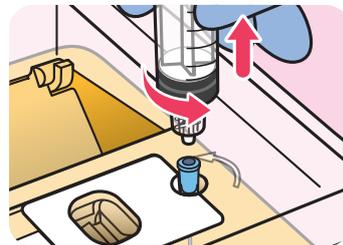



**4** スライダーボタン②を押し  
ながら左に引くと外し口①  
が開き、針が  
針捨てBOX内  
に落ちます。

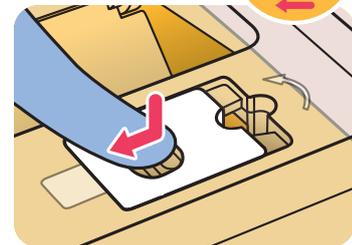


## ペン型注入器用針

ペン型注入器用針を外す際には、  
針捨てBOX中央のスライダーをご使用ください。


 スライダーをご使用の際は、手袋を着用してください。

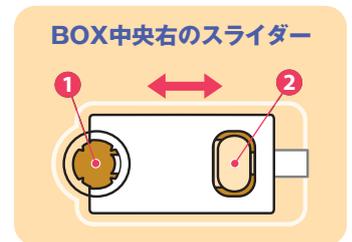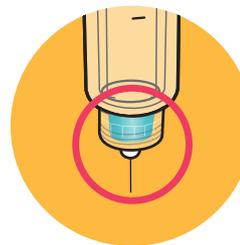


**1** スライダーボタン②を  
押しながら左に動かし、  
針の外し口①を  
閉じます。

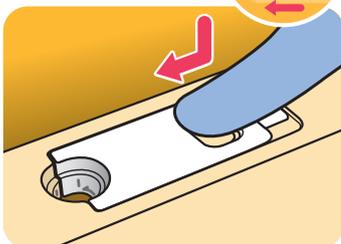


**2** 閉じた針の外し口①に  
ペン型注入器の先端を  
垂直にまっすぐ差し込み  
ます。

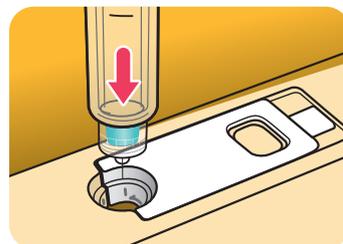

**3** ペン型注入器を左回りに  
回して、注射針を外します。

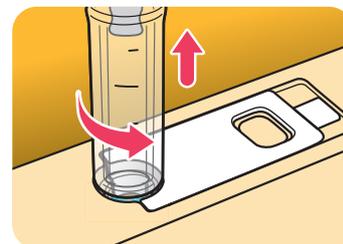


**4** スライダーボタン②を押し  
ながら右に引くと外し口①  
が開き、針が  
針捨てBOX内  
に落ちます。

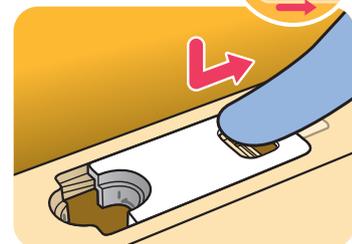

### ペンニードル® プラスを使用される場合

スライダー外し口のツメ4点とペンニードル®プラスの凹形状の溝  
(右記イラスト○印)が合うよう、ペン型注入器本体を挿入してください。

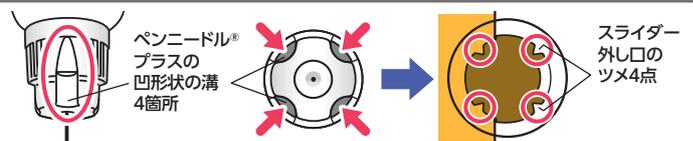

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00～17:00)

MU/68-0424E-01-M