

SARAYA

ブッシュ式うがいディスペンサー コロックル

COLOCLE CD-500

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。

製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。

目次	ページ
安全上のご注意	1
各部の名称	3
設置方法	4
使用方法	8
お手入れ方法	12
故障かな?と思ったら	13
仕 様	14
アフターサービス	14
お問い合わせ窓口	裏表紙
梱包内容	
●本体	1台
●タッピンねじ	(呼び4×25) 2個
●プラグ	2個
●使用方法ラベル	1枚
●取扱説明書	本紙

●お問い合わせ先
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
サライヤ株式会社
TEL.06-679-2525 URL:http://www.saray-a.com/

●お問い合わせ先
00:81~00:6 (土)日お休み
電話受付:平日9:00~18:00

●お問い合わせ先
00:81~00:6 (土)日お休み
電話受付:平日9:00~18:00

安全上のご注意1

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。ここには、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの
図記号の説明	行為を禁止する記号です。例: 禁止の記号、禁止の記号、禁止の記号
	行為を強制、指示する記号です。例: 注意の記号、注意の記号


設置上の注意 警告	本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。 事故やケガ、故障の原因になります。
注意 丈夫で凹凸のない壁面、または丈夫で段差のない水平な場所に確実に設置する。 設置上の不備は、落下、転倒によるケガや故障の原因になります。	
設置上の注意 注意	湿気やほこりの多い場所に設置しない。 故障や劣化の原因になります。
結露が生じる場所に設置しない。 故障や劣化の原因になります。	火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。 故障や変形の原因になります。
直射日光の当たる場所、高温になる場所に設置しない。 故障や変形の原因になります。	
使用上の注意 警告	本紙で禁止・指示した規格以外での使用は行わない。 事故やケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意2

絶対に分解・修理・改造は行わない。 ケガや故障の原因になります。 修理についてはお買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。	製品に水をかけない。 故障や劣化の原因になります。
薬液の取り扱いについては、使用する薬液の注意事項に従う。 事故やケガの原因になります。	

使用上の注意 注意	製品の上に物を置かない。 落下によるケガや故障の原因になります。
落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。 故障の原因になります。	プッシュボタンを乱暴に押さない。 故障の原因になります。
製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従う。	カバーの開閉時は指詰めにご注意。 ケガの原因になります。
定期点検や清掃を行う。 製品の安全および性能を保つため、定期点検や清掃作業を行ってください。	長期間使用しないときや保管するときは以下の作業を行う。 ①薬液ボトルを取り外す。 ②製品を清掃する。 製品の故障や、薬液の劣化の原因になります。
タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。 故障や変形の原因になります。	当社指定の薬液以外は使用しない。 思いがけない事故や故障の原因になります。
薬液はこぼさないように装着する。 こぼれた場合はすぐに拭き取ってください。すべて転倒するなどの事故や変色の原因になります。	製品を移動させるときは薬液ボトルを取り外す。 液漏れの原因になります。

各部の名称3

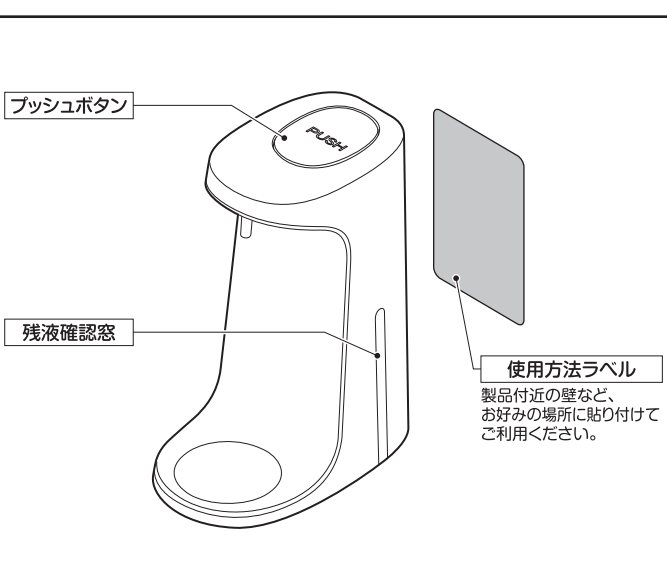

プッシュボタン

残液確認窓

使用方法ラベル
製品付近の壁など、お好みの場所に貼り付けてご利用ください。

外観寸法図

取付穴:2カ所

寸法単位:mm(小数点以下切り上げ)

設置方法4

据え置きの場合

『据え置きに適した丈夫で水平な場所であること』『使用の妨げにならない十分なスペースがあること』を確認し、設置します。

注意
斜面や不安定な場所には置かないでください。

壁に取り付ける場合

壁への取り付けに必要な工具


- 電動ドリル ●ドリル刃 (φ6、φ2.5) ●プラスドライバー
- ハンマー (樹脂ヘッド) ●メジャー、ものさしなど

1 設置場所の確認

『取り付けに適した丈夫な壁であること』『使用の妨げにならない十分なスペースがあること』を確認します。

注意


- 以下の壁面にはねじで取り付けないでください。
 - 凹凸面
- プッシュボタンを押すために本体上部からは150mm以上、カバーを取り外すために本体底部からは50mm以上のスペースをあけてください。

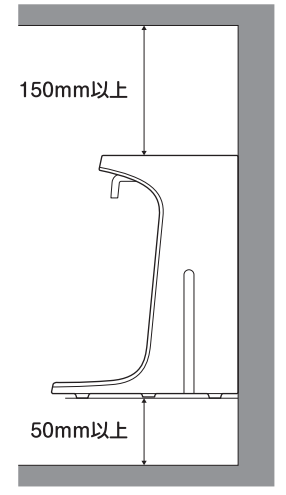

設置方法5


2 製品の取り付け

①本体底部からカバーを押し、ロックを外します。

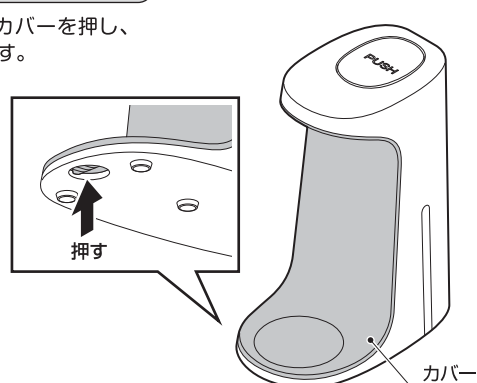

カバー

②カバーを下から取り外します。

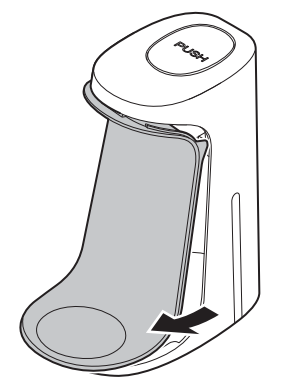


設置方法6

③本体背面の取付穴 (2カ所) に合わせて、壁に穴をあけます。

④ねじで固定します。

注意

- 穴をあける場所に、配管・配線が通っていないことを確認してください。
- 切粉はきれいに取り除いてください。
- 壁がコンクリートの場合
 - ①壁にφ6mmの穴 (プラグが埋まる深さ) をあけます。
 - ②穴にプラグを打ち込み、タッピンねじで固定します。
- 壁が木製の場合
 - ①壁にφ2.5mmの案内穴をあけます。
 - ②タッピンねじで固定します。
- 石膏ボードなど、壁の強度が弱い場合
 - ①補強材で補強します。
 - ②タッピンねじ、またはボードに適したねじで固定します。

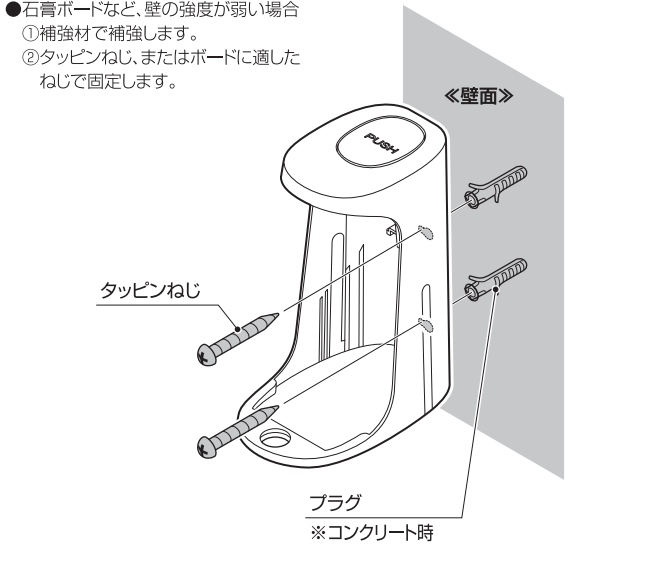

タッピンねじ

プラグ
※コンクリート時

《壁面》

⑤カバー上部のツメを引っ掛けます。

⑥ロックが掛かるまで押し込んで、カバーを取り付けます。

薬液ボトルの装着

注 意

薬液ボトルは付属していません、別途お買い求めください。

①本体底部からカバーを押し、ロックを外します。

②カバーを下から取り外します。

③薬液ボトルのポンプロックを外します。

④薬液ボトルを、奥まで確実に押し込み、装着します。

⑤カバー上部のツメを引っ掛けます。

⑥ロックが掛かるまで押し込んで、カバーを取り付けます。

注 意

カバーから薬液ボトルのノズルが出るように、カバーを取り付けてください。

うがいの仕方

①カバーの上にコップを置きます。
※コップはカバーの目印に合わせて置いてください。

②プッシュボタンを1回押します。
⇒ノズルから薬液を吐出します。

注 意

●新しい薬液ボトルは、装着した直後はノズルから薬液を吐出しません。薬液を吐出するまで、繰り返しプッシュボタンを押してください。

●プッシュボタンを乱暴に押さないでください。必要以上の力で押すと破損する恐れがあります。

●薬液については、薬液に表記されている「使用上の注意」などをよく読んでから使用してください。

お手入れ方法

12

本体の清掃

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。汚れは乾いた布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。そのあと、水で濡らしてよく絞った布で洗剤を拭き取り、乾いた布で拭いてください。

注 意

●やわらかい布を使用してください。

●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従ってください。

●次のものは使わないでください。
シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど

カバーの清掃

薬液が固着しているなどカバーの汚れがひどいときは、カバーを取り外して水洗いし、乾いた布で拭いてください。

注 意

カバー以外は水洗いしないでください。

お手入れ方法

13

ノズルの清掃

ノズル先端に薬液やゴミが固着すると、吐出が正常に行われません。以下の手順でノズルの清掃を行ってください。

①70～80℃のお湯に、約2分間ノズル先端を浸します。
※吐出穴の付着物が取れていない場合は、φ0.5mm以下の針金などを差し込んで付着物を取り除きます。

②吐出状態を確認します。

注 意

●吐出穴を針金などで清掃する際、ノズル内部の部品を傷付けないように注意してください。

●お湯を扱うときは、やけどに注意してください。

●確認後、吐出状態が改善されないときは、薬液ボトルを交換してください。

仕 様

14

項 目	内 容
名 称	プッシュ式うがいディスペンサー COLOCLE
型 式	CD-500
外形寸法	W102 × D165 × H214 mm (小数点以下切り上げ)
製品質量	約310g (梱包、付属品、薬液は除く)
主な材質	ケース、カバー：ABS プッシュボタン：POM
使用環境温度	5～40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)
使用薬液	当社指定の薬液
容 量	500mL

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

アフターサービス

アフターサービスについて

●アフターサービスでお困りの場合は
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
※故障の場合は“ご購入日”“本製品の型式”“できるだけ詳しい故障状態”をお知らせください。

●転居されるときは
ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。
ご転居先での販売店または最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。

故障かな?と思ったら

お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご相談いただく前に、次の点検を行ってください。

症 状	原 因	対処方法	ページ
薬液を吐出しないとき	薬液ボトルが正しく装着されていない	薬液ボトルを正しく装着する	9
	薬液切れ	薬液ボトルを交換する	
	ノズルが目詰まりしている	ノズルを清掃する	13

上記の点検を行っても直らないときは、ご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。