



手術時手指消毒専用

ノータッチ式ディスペンサー

HUD-1-M

ノータッチ式のため衛生的。
コンパクトで限られたスペース
にも設置可能。



商品コード
42530



最大6回連続吐出

手をかざすと最大6回まで連続吐出可能。
手を離せば即座に停止し、かざすと連続吐出が再開します。

吐出量の調整が可能

簡単なパーツ調整だけで、1回あたりの吐出量を現場ニーズに
合わせて0.8mL~1.8mLで調整可能。無駄使いを防ぎ、
消耗品のコスト削減に貢献します。

多彩な使用液に対応

サラヤの多彩なラインアップから用途に応じて、
最適な使用液を自由に選択可能です。

超コンパクト&2WAY設置

壁掛け・スタンド設置のどちらにも対応。
限られたスペースでも作業の邪魔にならない
コンパクトサイズであらゆる場所に設置可能です。



ディスペンサー用スタンド
IS-2020
商品コード：41804

使用液

医療用医薬品

原液

液状

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A0.5%



500mL 角ポンプ付
商品コード：42341

1L ポンプ付
商品コード：42342

速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A1%



500mL 角ポンプ付
商品コード：42345

1L ポンプ付
商品コード：42346

速乾性手指消毒剤（抗菌性スクラブ剤）
スクラビインS4%液



500mL 角ポンプ付
商品コード：25011


1L ポンプ付
商品コード：25013

仕様

項目	内容
名称	ノータッチ式ディスペンサー
型番	HUD-1-M
外形外寸	W122×D106×H110mm (小数点以下切り上げ、取付板、トレー含まず) W122×D109×H150mm (小数点以下切り上げ、取付板含む) W122×D192×H180mm (小数点以下切り上げ、取付板、トレー含む)
製品質量	約420g (梱包、付属品、取付板、電池、使用液ボトルは除く)
主な材質	本体：ABS/POM、取付板：ABS、トレー：ABS
電源	●単2アルカリ乾電池×4本 ●当社指定のACアダプター
使用環境温度	5～40℃ (使用液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)
使用液	当社指定の使用液
容量	500mL～1L
吐出/噴射量	手指消毒剤… ●スプレー：約0.8～1.6mL/回 ●リキッド：約1.0～1.8mL/回
付属	取付板、両面テープ、固定パーツ外し、 ねじセット(タッピンねじ3個、プラグ3個)、 変換アダプター、トレー、取扱説明書


使用液は当社指定のものをお使いください。
他社の使用液を使用した場合、トラブルが生じるおそれがありますのでお使いにならないでください。

※1 固定パーツの位置を変更することで吐出量を調整することができます。

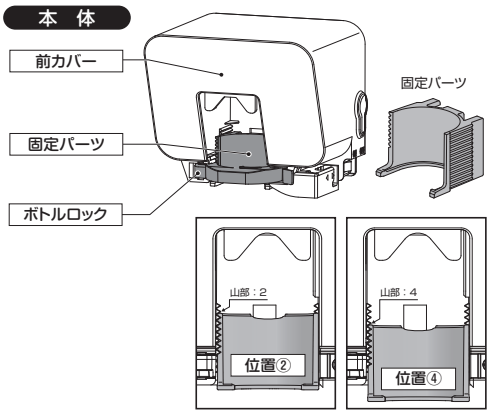

■参考 使用液量 (1回の吐出量)

	手術時手指消毒剤 1Lボトル	手指用殺菌消毒剤 1Lボトル
薬液名	ヒビスコール液A0.5%、1%	スクラビインS4%
位置②	約 1.6mL	約 1.8mL
位置④	約 0.8mL	約 1.0mL

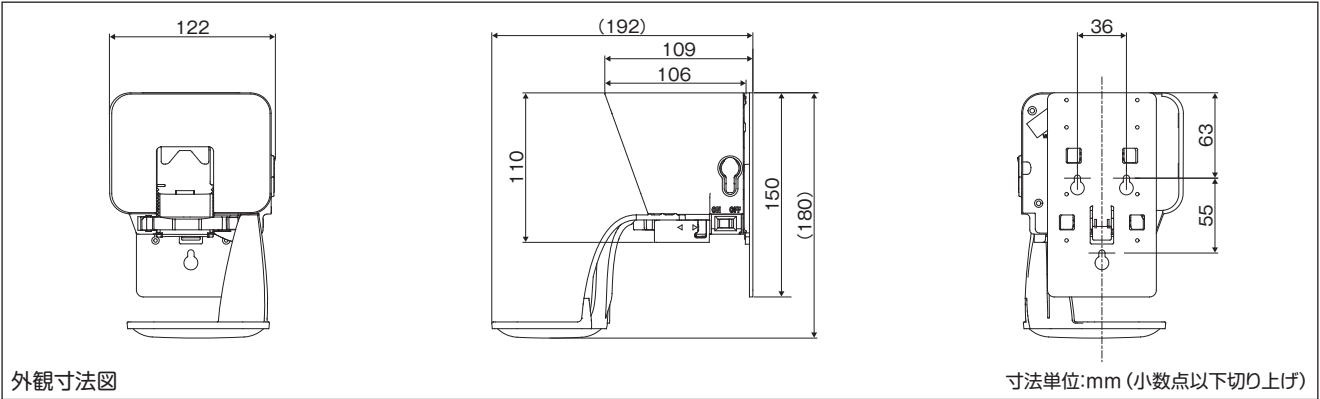

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
HUD-1-M	本体	1	42530	49-87696-42530-9
ACアダプター	—	1	47007	—
ディスペンサー用スタンド IS-2020	本体	1	41804	49-87696-41804-2

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード
				販売包装単位コード (*****:有効期限 %%%%) :製造番号)
ヒビスコール液A0.5%	500mL角ポンプ付	10	42341	(01)04987696100251 (01)14987696423418 (17)***** (10)%%%
	1Lポンプ付	10	42342	(01)04987696100268 (01)14987696423425 (17)***** (10)%%%
ヒビスコール液A1%	500mL角ポンプ付	10	42345	(01)04987696100428 (01)14987696423456 (17)***** (10)%%%
	1Lポンプ付	10	42346	(01)04987696100435 (01)14987696423463 (17)***** (10)%%%
スクラビインS4%液	500mL角ポンプ付	10	25011	(01)04987696100046 (01)14987696250113 (17)***** (10)%%%
	1Lポンプ付	10	25013	(01)04987696100060 (01)14987696250106 (17)***** (10)%%%

**安全にご使用
いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。
指定以外の使用液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2026年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)