

医 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
歯科用手袋 JMDN70911000

サラヤニトリル検査検診用グローブ G P

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とする、検査・検診用及び歯科用使い捨て手袋である。平手タイプの左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダー無し、未滅菌である。

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm) 以上	230	230	230	230
掌幅 (mm) ±4mm	76	86	98	107

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、診察、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

パックのミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

- 爪先、刃物等、尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 着色ムラがある場合でも、品質上の問題はない。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すること。
- 感染防止のため患者ごとに新しいものに取り換えること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

2. 使用期限

使用の期限は包装に記載する（側面バーコード、EXP DATE）。125 枚/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サラヤ株式会社
所在地 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部
TEL：06-4706-3938