


プロベスト

洗淨・除菌が同時にできる

両性界面活性剤 第四級アンモニウム塩

日常の環境衛生に

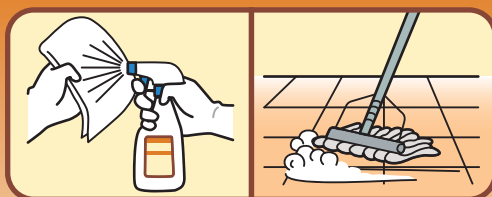

第四級アンモニウム塩
配合

製品特徴

1. 洗淨成分が、血液・体液などの蛋白汚れ、脂質汚れなどをすっきり落とします。
2. 第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮します。
3. 血液・体液などの有機汚れ共存下でも高い除菌力で、効果が持続します。
4. 金属やプラスチックの腐食が少なく、においがほとんどありません。



●環境除菌洗淨剤 プロベストの性能評価

(1) 洗淨効果

血液テストピースを用いた洗淨試験
(サラヤバイオケミカル研究所調べ)



試験方法

テストピースにヒツジ保存血50μLを塗布し、乾燥後、「プロベスト」100倍希釈液および70%エタノールを浸した綿棒で縦横10回、横縦10回の拭き取りを2回繰り返した。

(2) 除菌効果

各種菌に対する除菌試験
「プロベスト」100倍希釈液 (サラヤバイオケミカル研究所調べ)

供試菌	作用時間			対照(5分作用) cfu/mL
	30秒	1分	5分	
<i>Escherichia coli</i>	Nd.	Nd.	Nd.	2.3×10 ⁷
<i>Staphylococcus aureus</i>	Nd.	Nd.	Nd.	1.6×10 ⁷
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Nd.	Nd.	Nd.	3.1×10 ⁷
<i>Acinetobacter haemolyticus</i>	Nd.	Nd.	Nd.	1.2×10 ⁷
<i>Staphylococcus aureus</i> [MRSA]	Nd.	Nd.	Nd.	4.5×10 ⁷

試験方法

(Nd.: 検出限界以下)


供試菌を液体ブイオン培地で、37℃、24時間培養した供試菌液1mLを、20℃に保った「プロベスト」100倍希釈液9mLに添加し、30秒、30秒、1分および5分間作用させた。その作用液0.5mLを不活化液4.5mLに添加して、薬剤の作用を停止させた。必要に応じて段階希釈後、ブイオン寒天培地で、37℃、24時間混釈培養し、残存菌数を計測した。また、対照として滅菌蒸留水を用いた。

医療施設の環境整備の基本は、**清掃による汚染の除去**です。

医療施設用 環境除菌洗剤 **プロベスト**

成分：第四級アンモニウム塩、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤

用途・使用方法

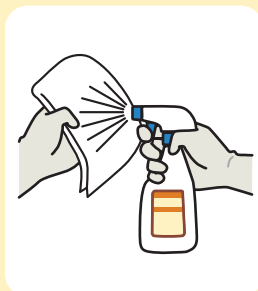

希釈使用

医療従事者や患者の手の接触面に

- 希釈液専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。または、対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。
- バケツなどに希釈した液を布などにつけて、よく絞ってから対象物を拭く。



処置室・ICU・手術室などの床に

- ブラシやモップなどに希釈液をつけて汚れをこすり取った後、十分に水拭きする。

トイレ・浴室などに

- 希釈液を直接かけるか、ブラシやモップなどにつけて、汚れをこすり取った後、よく水洗いする。

使用目安濃度

床の清掃

希釈倍率 **100倍**

その他の清掃

希釈倍率 **50~100倍**

※必要に応じて調整してください。

希釈方法

1 ①のポンプを押し、**2**に適量をとります。

2 ②の目盛を参考に、水を加え、希釈します。



希釈例) 50倍希釈 8プッシュ=約8mL : 水を400mL目盛まで
100倍希釈 4プッシュ=約4mL : 水を400mL目盛まで

プロベスト希釈用ボトル



プロベスト 希釈用スプレーボトル
JANコード 49-87696-65143-2

使用上の注意



目に注意 子供に注意 手袋使用

- 作業時は手袋を着用する。また、状況に応じてマスクおよび保護メガネを着用する。
- キャップを開けるときに液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮膚につく恐れがある。
- 他の容器に移し替える場合は、商品名、使用方法、注意事項を明記した専用のプラスチック容器を使用する。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
- 原液で使用しない。
- 用途以外には使用しない。
- 他の殺菌剤・洗浄剤等とは混ぜない。効力が低下したり、沈殿が生じたりすることがある。
- 直射日光を避け、高温の場所に保管しない。
- 子供の手の届かない場所に保管する。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	JANコード
医療施設用環境除菌洗剤 プロベスト	5L	3	49-87696-31741-3
	480mLポンプ付	12	49-87696-31742-0
プロベスト 希釈用スプレーボトル	500mLスプレーボトル	12	49-87696-65143-2

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。

SARAYA サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

TEL. 06-4706-3938
サラヤ株式会社 学術部
(受付時間：平日 9:00~17:00)