

サニクイック

速効成分・持続成分を配合

エタノール

第四級アンモニウム塩

希釈いらずで 手間なく すばやく 除菌



第四級アンモニウム塩
配合

製品特徴

1. エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。
2. 第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
3. グラム陽性菌、グラム陰性菌を問わず、幅広い抗菌スペクトルを示します。



500mL
スプレーボトル



5L



火気厳禁

危険物第4類 アルコール類
水溶性・危険等級II

火気厳禁商品ですので
取り扱いには十分ご注意ください。

●環境アルコール除菌剤 サニクイックの性能評価

(1)速効除菌効果

各種菌に対する除菌試験

(サラヤバイオケミカル研究所調べ)

供試菌	作用時間	
	15秒	30秒
<i>Escherichia coli</i>	—	—
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	—	—
<i>Staphylococcus aureus</i>	—	—
<i>Streptococcus faecalis</i>	—	—
MRSA 臨床分離株	—	—

(死滅：—、生存：+)


試験方法

供試菌を液体ブイオン培地で、37℃、24時間培養した供試菌液0.5mLを、20℃に保った「サニクイック」10mLに添加し、15秒および30秒間作用させた。その作用液約10μLを、液体ブイオン培地で、37℃、48時間培養し菌の発育を目視で判定した。

(2)持続抗菌効果

黄色ブドウ球菌に対する抗菌試験

(サラヤバイオケミカル研究所調べ)

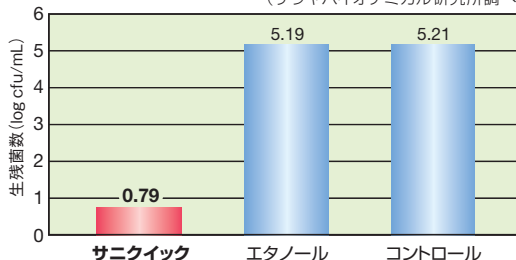


試験方法

ろ紙の中心に「サニクイック」0.05mLを滴下し、エタノール蒸発後、供試菌液(黄色ブドウ球菌: *Staphylococcus aureus* ATCC25923) 0.02mLを滴下して10分間作用させた後、菌を回収し、ブイオン寒天培地で37℃、48時間培養し残存菌数を測定した。

医療施設用 環境アルコール除菌剤 サニクイック

成分：エタノール72.6W/w%(79.1V/v%)、第四級アンモニウム塩

用途・使用方法

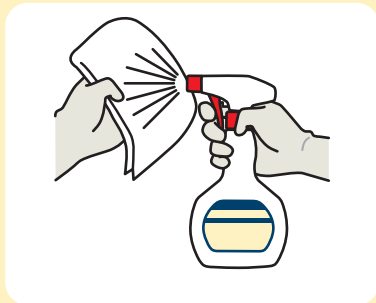


原液使用

医療従事者や患者の手の接触面に

- 専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。
もしくは、対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。
※広範囲に噴霧しないように注意してください。

ドアノブなどに

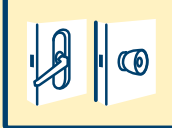

ベッド柵などに



車イスなどに



手台などに



サニクイック 小分け用ボトル



霧状
スプレー
500mL

サニクイック 詰替用スプレーボトル
JANコード 49-87696-65144-9

不織布ガーゼ ドライロール

別売りのドライロールにサニクイックを含浸させ、
除菌シートとして使用することもできます。

厚手・大判サイズ
コットン由来不織布
1ロール180ピース、
1ピース170×300mm
6個入り



不織布ガーゼ ドライロール
JANコード 49-73512-71763-5



ドライロール 含浸容器
JANコード 49-73512-71765-9

使用上の注意



火気厳禁
危険物第4類 アルコール類
引火性 水溶性・危険等級II

火気厳禁商品ですので
取り扱いには十分ご注意ください。

- 取り扱う場合、換気を十分に行う。
- 火気に近づけない。
- 作業時は状況に応じて、手袋、マスクおよび保護メガネを着用する。
- 倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。
- 直射日光を避け、温度の低い場所に、密栓し保管する。
- 子供の手の届かない場所に保管する。
- 他の容器に移し替える場合は、商品名、使用方法、注意事項を明記した専用のプラスチック容器を使用する。
- キャップを開けるときに液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。
緩んでいると、液がはねて目や皮膚につく恐れがある。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
- 用途以外には使用しない。
- 他の殺菌剤・洗浄剤等とは混ぜない。効力が低下したり、沈殿が生じたりすることがある。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	JANコード
医療施設用環境アルコール除菌剤 サニクイック	5L	3	49-87696-31746-8
	500mLスプレーボトル	12	49-87696-31747-5
サニクイック 詰替用スプレーボトル	500mLスプレーボトル	12	49-87696-65144-9
不織布ガーゼ ドライロール	180ピース × 6個入	1	49-73512-71763-5
ドライロール 含浸容器	1	4	49-73512-71765-9

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。

SARAYA サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

TEL.06-4706-3938
サラヤ株式会社 学術部
(受付時間：平日 9:00～17:00)