

# SARAYA

湿性生体物質による汚染や  
アウトブレイク時の環境整備に

除菌・洗浄剤

## ジアクリン 泡1000

環境表面・器具・物品などの除菌・洗浄に





### 特長

- ◆ **次亜塩素酸ナトリウムを含有**した泡状の除菌・洗浄剤です。
- ◆ **希釈不要で**、必要な時にすぐに使用できます。
- ◆ **泡タイプなので飛散しにくく**、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。

### 使用用途

トイレの便座・手すり・床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に

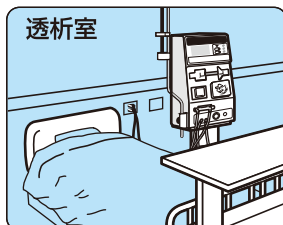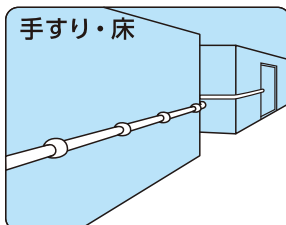

## 成分

次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤（陰イオン系、両性系）、水酸化ナトリウム

## 液性

アルカリ性

## 使用方法

対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。

## 使えるもの

プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品

## 使えないもの

ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器

## 使用上の注意

- 用途以外に使用しない。
- 子供の手の届かないところに保管する。
- 体調の悪いときは使わない。
- 作業時は必ずゴーグル、およびゴム手袋を着用する。
- 顔より高いところは、スポンジや布などにつけて拭く。
- 他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- キャップを開けると液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚につく恐れがある。
- 直射日光を避け、高温のところに置かない。
- 酸性タイプ、またはアルコールタイプの製品と一緒に使う（混ぜる）と有害な塩素ガスが出て危険。

※体調のすぐれない方、心臓病・呼吸器疾患等の方は使わないでください。



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ジアクリン泡1000	500mL泡スプレー付	12	40124	49-87696-40124-2

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2015年9月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部

TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日 9:00～18:00)