

手指消毒

チェッカー

専用ローション

手指消毒方法の確認に!

手に塗り広げやすく、塗った後に専用のライトを当てると、正確に手指消毒が実施できているかを確認できます。



使用方法



適量(1プッシュ程度)を手塗り広げてください。



専用のライトに当ててください。



専用のライトを当てると、適切に手指消毒ができている部分が光ります。



確認後は石けんで十分に洗い流してください。

【使用上の注意】

●目に入らないように注意してください。目に入った場合は速やかに流水でよく洗眼してください。異常が残る場合は専門医にご相談ください。●衣服に付くと取れにくいので注意してください。●小児の手の届かないところに保管してください。●他の容器に入れ替えないでください(誤用や品質が変わる原因になるため)。●用途以外に使用しないでください。●高温多湿の場所を避け、開封後はお早めにお使いください。●火気に近づけないでください。●初期火災の場合、大量の水または消火器で消火してください。●ノズルの先が詰まった場合は、詰まりを取り除いてから使用してください。



火気厳禁

引火性

危険物第4類
アルコール類(エタノール)
水溶性・危険等級II

品名	内容量 / 規格	1コ標準価格(税抜)	1梱入数	JANコード
サラヤ手指消毒チェッカー	250mL	1,750円	—	49-87696-41657-4

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合があります。

発売元

SARAYA サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

TEL.06-4706-3938
サラヤ株式会社 学術部
(受付時間: 平日 9:00~17:00)