


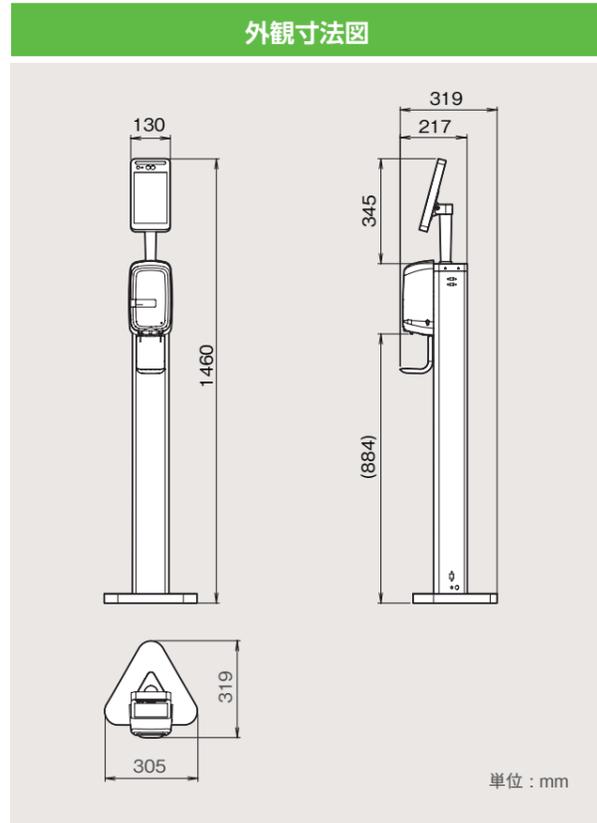

PROTEGATE

仕様	
項目	内容
名称	プロテゲートモニター
型式	UD-PGM-2
外形寸法	W305×D319×H1460mm
製品質量	10.2kg
電源	弊社指定のACアダプター
使用環境温度	5℃～40℃
使用環境湿度	20%～85% (結露なきこと)
使用薬液	当社指定の薬液
測定可能温度範囲	35℃～45℃
測定誤差	±0.3℃
測定距離	30cm～80cm
項目 (ディスペンサー部)	内容
カートリッジ容量	600mL
消毒剤吐出量	液状 約1.5mL /回 ジェル状 約1.2mL /回 泡状 約0.8g /回
付属品	トレー、カギ、取扱説明書、据付説明書、 ネジ類、火気厳禁ラベル



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
プロテゲートモニターセット	プロテゲートモニター用タブレット プロテゲートモニター用スタンド UD-600PG サラヤACアダプター	1	41719	—
サニサーラ Aqua Light	600mL ディスペンサー用	6	41738	49-87696-41738-0
ウィル・ステラVジェル	600mL ディスペンサー用	6	42093	49-87696-42093-9
サニサーラフォームS	600mL泡 ディスペンサー用	6	42119	49-87696-42119-6
サニサーラ Aqua Light H	600mL ディスペンサー用	6	41739	49-87696-41739-7
ウィル・ステラVHジェル	600mL ディスペンサー用	6	42111	49-87696-42111-0
ウィル・ステラVH	600mL ディスペンサー用	6	42108	49-87696-42108-0
サニサーラフォームSH	600mL泡 ディスペンサー用	6	42116	49-87696-42116-5

**安全にご使用
いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。
- 指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社
 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

顔認証手指衛生システム

プロテゲートモニター



PROTEGATE

0.3秒で瞬間計測!!

入口での体調管理をノータッチ化

オールインワンシステム

医療・福祉施設や職員入口での感染対策に

タブレットが施設利用者や職員を認識し、顔の表面温度測定*1、マスク着用確認*2、手指消毒まで全てノータッチで行えるオールインワンシステム

*1 本機は医療用の体温計ではありません。表面温度を測定する製品です。
*2 マスク着用の確認は、設定をOFFにすることが可能です。

1 オールインワンの顔認証手指衛生システム

タブレットと手指消毒ディスペンサーが連動し、作動日時、写真、顔表面温度、マスクの着用状況*2、手指消毒まで記録ができるオールインワンの顔認証手指衛生システムです。

2 従業員の個人衛生管理

プロテゲートモニターとパソコンを繋ぎ、ユーザー情報を登録することで、個人認証されたデータの記録が可能です。

- いつ (日時)
- だれの (顔認証)
- 表面温度測定
- マスク着用確認*2
- 手指消毒履歴
- 自動記録

使用手順



付属品 工事不要!電源アダプター

一般家庭用 100V 電源でご使用いただけます。



モニター用 ACアダプター
入力: AC100-240V 50/60Hz
出力: DC12V 3A
コード長さ: 1.7m

ディスペンサー用 ACアダプター
入力: AC100V 50/60Hz
出力: DC6V 2A
コード長さ: 1.8m

対応薬液

※その他対応薬液もございます。



速乾性手指消毒剤 サニサーラAqua Light
ジェル状 600mL ディスペンサー用
とろけるように手肌になじみ繰り返しの手指消毒後もべたつきません。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。ジェルタイプ。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVジェル*
ジェル状 600mL ディスペンサー用
ノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に作用する手指消毒剤です。保湿成分を配合し、手荒れ軽減にも配慮。ジェルタイプ。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%

LANケーブル差込口
ACアダプター差込口



速乾性手指消毒剤 サニサーラフォームS
泡状 600mL ディスペンサー用
手からこぼれにくく、すばやくムラなく広げられる泡タイプ。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。保湿成分を配合し、手荒れ軽減にも配慮しています。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%


速乾性手指消毒剤 サニサーラAqua Light H
ジェル状 600mL ディスペンサー用
とろけるように手肌になじみ繰り返しの手指消毒後もべたつきません。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。ジェルタイプ。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVHジェル*
ジェル状 600mL ディスペンサー用
ノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に作用する手指消毒剤です。保湿成分を配合し、手荒れ軽減にも配慮しています。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH
液状 600mL ディスペンサー用
ノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に作用する手指消毒剤です。保湿成分を配合し、手荒れ軽減にも配慮しています。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%

速乾性手指消毒剤 サニサーラフォームSH
泡状 600mL ディスペンサー用
手からこぼれにくく、すばやくムラなく広げられる泡タイプ。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。保湿成分を配合し、手荒れ軽減にも配慮しています。
有効成分: エタノール76.9~81.4vol%

*ウィル・ステラVジェル、ウィル・ステラVHジェルは、ノズルの先端で固まった薬液が横跳びする恐れがあるため、あらかじめノズルカバー(付属品)を装着してお使いください。

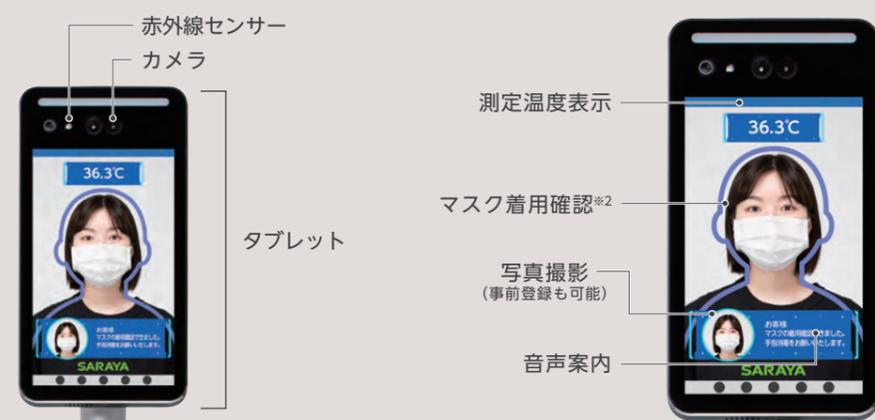

この1台ですべてOK

0.3秒のスピード判定



パソコン接続でユーザー登録・履歴・閲覧も簡単!

※本機とパソコンの接続には有線 LAN または Wi-Fi 環境が必要です。

ユーザー情報の登録管理
従業員の方の写真や属性等を一括登録・変更が可能です。(最大20,000件)
事前に登録することで、AIが該当者を判別し名前、写真が表示され測定します。

作動記録のエクスポート
作動記録をエクセルデータで書き出しが可能です。(最大8,000件)
※USBメモリを用いて書き出す事もできます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	番号	デバイス認証コード	装置名称	氏名	ID番号	温度	顔写真	通行時刻	累計吐出回数	吐出状況
	1	8629DE-A32B5F		お客様		36.4°C		2021-04-26 16:30:53		はい