

プロテゲートモニターのマスク検知機能 OFF設定の仕方


アプリのバージョンが V2.3.7.0_GH または V1.5.7.0_GH の場合

ログイン

メイン画面を長押しし、ログイン画面を表示させます。

- ①ID 欄に saraya と入力します。
- ②パスワード…初期設定 561234 またはお客様で変更されている場合は、設定されたパスワードを入力します。

③確認をタップします。

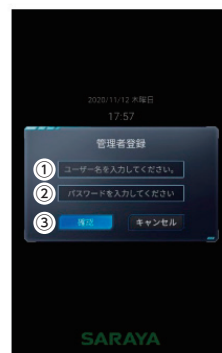

④システム設定を確認をタップします。



⑤マスク検知の項目をスライドしてOFFにします。

⑥システム設定の左にある < をタップします。



⑦設定の左にある < をタップします。

メイン画面に戻ったら、画面の前に立ち、温度測定して「手指消毒をお願い致します。」の表示と「手指消毒をお願いします。」の音声があれば完了です。



※ご使用中のアプリのバージョンがご不明の場合は、取扱説明書P22をご覧ください。

※ご使用中のアプリのバージョンが V2.3.7.0_GH または V1.5.7.0_GH ではない場合は、バージョンのアップグレードをお勧めします。

バージョンアップの手順は、プロテゲートモニター製品メンテナンス・サポートのホームページ タブレット用アプリをご覧ください。

https://pro.saraya.com/support/maintenance/auto-dispenser/protegate_monitor/41718.html