

パワークイック

ジェット洗浄機、超音波洗浄機 兼用

洗浄機用洗浄剤 M

中性

低起泡性

プロテアーゼ配合。
低起泡性で優れた
洗浄力を発揮します。

特徴

- 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
- プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。
- 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。
- 天然の界面活性剤(ソホロリピッド[®])を配合した環境に優しい洗浄剤です。
- 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。



使用方法

洗浄機に合わせて使用してください。

ジェット洗浄機

推奨使用濃度: 0.5% (10Lの水に対し50mL)
汚れの程度により 0.2~0.5%
(10Lの水に対し20~50mL)



超音波洗浄機

推奨使用濃度: 1.0% (10Lの水に対し100mL)
汚れの程度により 0.5~2.0%
(10Lの水に対し50~200mL)



成分

タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)、金属イオン封鎖剤、界面活性剤(ソホロースリピッド)、酵素安定化剤、防錆剤

使用上の注意

- 用途以外には使用しない。● 子どもの手の届かないところに保管する。● 他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜない。● 作業時は必ず手袋、マスク、エプロン、ゴーグル等の防護具を着用する。● 他の容器に移し替えて保管しない。● キャップを開けるときの液が飛び出すおそれがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚につくおそれがある。● 洗浄液は最低1日に1回交換する。洗浄液の汚染が激しいときはその都度交換する。● 倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。● 直射日光を避けなるべく涼しい場所で保管する。● 樹脂の種類やメッキ製品等金属の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。● 経時的に黄変することがありますが、性能に問題はありません。

応急処置

- 目に入った場合は直ちに水洗いし、医師の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合は、直ちに医師の処置を受ける。
- 皮膚についたときは水で洗い流す。

パワーquick 洗浄機用洗浄剤 M

中性で優れた洗浄力を実現

方法

洗浄評価インジケータTOSI (Pereg社、ドイツ)7個をジェット式洗浄機WD-32(サラヤ)にセットし、パワーquick洗浄機用洗浄剤M(中性)および他社品を用いて洗浄しました。洗浄後のTOSIは、パワーquick残留タンパク検出液(サラヤ)で染色しました。

パワーquick
洗浄機用洗浄剤M



他社品A



他社品B




水道水



高い酵素安定性

方法

パワーquick洗浄機用洗浄剤M(中性)および他社品の原液を40℃で28日間保存し酵素活性を測定しました。保存前の酵素活性値に対する相対値として、残存活性を算出しました。

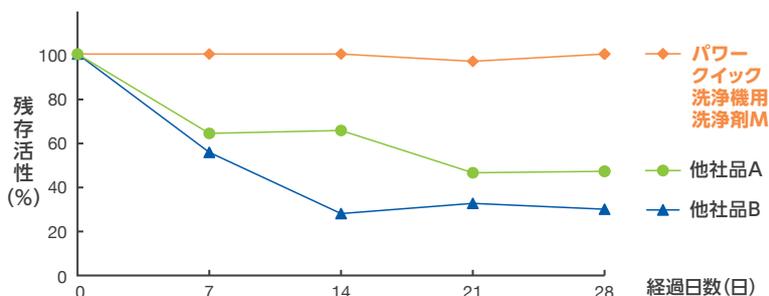


優れた防食性


方法

各種金属を、パワーquick洗浄機用洗浄剤M(中性)および他社品の実用液に浸漬し、過酷条件下(50℃・7日間)で放置しました。


パワーquick
洗浄機用洗浄剤M

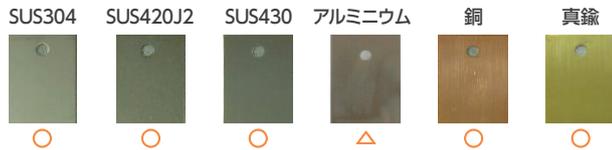

他社品A

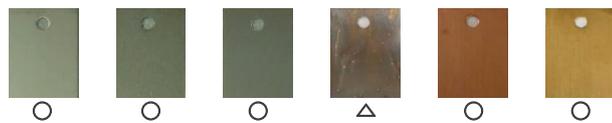

他社品B

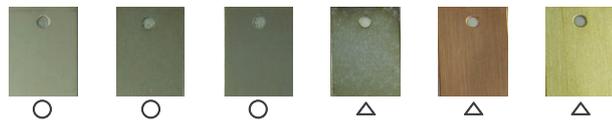

評価基準 ○: 変化なし、△: 水道水と同等の変化、×: 水道水以上の変化

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
パワーquick 洗浄機用洗浄剤M 中性	4L	3	50357	49-87696-50357-1

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年10月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間: 平日 9:00~18:00)