

ベッドパンウォッシャー用

# アルカリ性洗剤

アルカリ性

アルカリの作用で  
尿器・便器に付着した  
汚物を除去します。

## 特徴

- アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。
- 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。
- 様々なプラスチック素材に使用できます。
- 防錆剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。
- 保存安定性に優れています。



5L

## 使用方法

- お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。

### ベッドパンウォッシャー

推奨使用濃度：**0.2~0.4%**  
(汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。)

〈自動注入の場合〉

- 自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。

## 成分

アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、防錆剤

## 使用上の注意

- 用途以外には使用しない。●ミストを吸引しない。●この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。●他の洗剤および薬剤とは混ぜない。●作業時は必ず手袋、マスク、エプロン、ゴーグルなどの防護具を着用する。●取り扱い後は、よく手を洗う。●他の容器に移し替えて使用しない。●キャップを開けるとき液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。●樹脂の種類やメッキ製品等金属の種類によっては、変化する場合があるので、あらかじめ試験してから使用する。

## 応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後、速やかに医師の診断を受ける。●万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。●液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。

# 材質適合性

## 方法

各種テストピースをアルカリ性洗剤または他社品Aの実用液に浸漬し、50℃で7日間放置した後、テストピースの外観観察を行いました。

			SUS304	SUS420J2	SUS430	銅	真鍮	PE	PP
アルカリ性洗剤	0.2%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
	0.4%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
他社品A	0.2%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
	0.4%	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
		写真							
水道水	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり	変化あり	変化なし	変化なし	
	写真								

# 優れた安定性

## 方法

アルカリ性洗剤または他社品Aの実用液を、50℃で1ヶ月放置した後、外観観察を行いました。

	アルカリ性洗剤	他社品A
外観変化	浮遊物発生なし	浮遊物発生あり
写真		

品名	内容量 / 規格	1コ標準価格(税抜)	1梱入数	JANコード
ベッドパンウォッシャー用 アルカリ性洗剤	5L	7,200円	4	49-87696-50358-8

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2016年8月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部  
TEL.06-4706-3938 (受付時間: 平日 9:00~18:00)