

パワークイック

用手洗淨 専用

酵素系用手洗淨剤 中性

中性

プロテアーゼと界面活性剤が
汚れをしっかりと
除去します。

特徴

- 豊富な泡立ちのため、用手洗淨に最適です。
- 抜群の酵素安定性のため、高い洗淨力が維持できます。
- プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果による、高い洗淨力を有しています。
- ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。



880mL

使用方法

- ① 適量の水を含んだスポンジなどに、洗淨剤(原液)を吐出してください。
- ② 泡立て、医療器具を用手洗淨してください。
- ③ 洗淨後は流水で十分にすすいでください。



成分

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)、酵素安定化剤、防錆剤

使用上の注意

●用途以外には使用しない。●子どもの手の届かないところに保管する。●作業時は必ず手袋、マスク、エプロン、ゴーグルなどの防護具を着用する。●他の薬剤・洗淨剤とは混ぜない。●他の容器に移し替えて使用しない。●倒れたりこぼれたりすることのないような場所に保管する。●直射日光を避けなるべく涼しい場所で保管する。●樹脂の種類やメッキ製品等金属の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●機械洗淨する場合は必ず器具をすすぐ。●本品に滅菌効果はありません。●経時的に変色することがありますが、性能に問題はありません。

応急処置

- 目に入った場合は直ちに水洗いし、医師の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合は、直ちに医師の処置を受ける。
- 皮膚についたときは水で洗い流す。

パワーquick 酵素系用手洗浄剤 中性

中性で優れた洗浄力を実現

方法

20gの水道水を含ませたスポンジに3gの洗浄剤を吐出して使用することを想定して、洗浄力を評価しました。13%に希釈した各種洗浄剤に、洗浄評価インジケータ-TOSI®を20°Cで30分浸漬後、残留タンパク検出液(サラヤ)で染色しました。

	洗浄後の写真
パワーquick 酵素系用手洗浄剤 中性	
他社品 A	
台所用洗剤 B	

豊富な泡立ち

方法

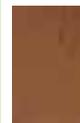
20gの水道水を含ませたスポンジに3gの洗浄剤を滴下し、10回揉みました。この動作を4回繰り返しました。

	はじめ	10回	20回	30回	40回
パワーquick 酵素系用手洗浄剤 中性					
他社品 A					
台所用洗剤 B					

優れた防食性

方法

20gの水道水を含ませたスポンジに3gの洗浄剤を吐出して使用することを想定して、防食性を評価しました。6種類の金属テストピース(ステンレス3種、アルミニウム、銅、真鍮)を、13%に希釈した各種洗浄剤に浸漬し、50°Cで1週間保管しました。

		SUS304	SUS420J2	SUS430	アルミニウム	銅	真鍮
パワーquick 酵素系 用手洗浄剤 中性	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
	写真						
台所用 洗剤 B	外観変化	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	濃い橙色	光沢のある黒色
	写真						

品名	内容量 / 規格	1コ標準価格(税抜)	1梱入数	JANコード
パワーquick 酵素系用手洗浄剤 中性	880mL	1,600円	12	49-87696-50362-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2016年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部

TEL.06-4706-3938 (受付時間: 平日 9:00~18:00)