

医療機器 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (70976000)

サラヤニトリル検査検診用グローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする、検査・検診用使い捨て手袋である。左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダーなし、未滅菌である。

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為および汚染された医療材料を取扱う場合、患者および使用者を交差汚染から守るために使用する。

【品目仕様等】

引っ張り強度
(老化前) 18.0MPa、(老化後) 16.0MPa

最大伸長度
(老化前) 500%、(老化後) 400%

【操作方法又は使用方法等】

小箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

爪先、刃物等、とがったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
着色ムラがある場合があるが、品質上の問題はない。
かゆみ、かぶれ、発疹等の症状があらわれた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すること。
(体質により上記の症状が現れる可能性がある。)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

使用期間

使用の期限は包装に記載する。

【包装】

200枚/箱
全長 (mm 以上) 240
掌幅 (mm±4mm) XS: 76 S: 86 M: 98 L: 107

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 サラヤ株式会社
所在地 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL (06) 6797-2525

外国製造業者 ハータレガ株式会社/Hartalega Sdn. Bhd.
外国製造所国名 マレーシア