

医療用品3 手術用手袋及び指サック

管理医療機器 天然ゴム製手術用手袋 JMDNコード：40548000

# サンコーシルキーフィット マイクロ


## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

### \*\*【形状・構造及び原理等】

- \*\* 本品は、JIS T 9107「単回使用手術用ゴム手袋」に規定された天然ゴムラテックス製のパウダーなし・滅菌済み手術用手袋です。

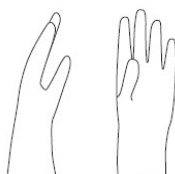

形状：C（屈指）  
表面仕上げ：T（全面が粗面）

（単位：mm）

呼び番号	掌部の幅	最小全長	厚さ
5	67±4	250	0.13 以上
5.5	72±5		
6	77±5	260	
6.5	83±5		
7	89±5	270	
7.5	95±5		
8	102±6		
8.5	108±6	280	
9	114±6		

### \*【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差汚染から保護します。

### 【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出します。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出したのち、装着します。

### \*【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状（I型-即時型：天然ゴムラテックスに含まれるタンパクによる、IV型-遅延型：主に添加剤等の化学物質による）をまれに起こすことがあります。このような症

状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

- 天然ゴムラテックスと接触する機会が多い方々は天然ゴムラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

#### 2) 重要な基本的注意

- \*○ 包装及び製品に破れなど異常が認められた場合には、直ちに使用を中止してください。
- 鋭利な器具に接触した場合、破れや穴が生じることがありますのでご注意ください。
- 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

#### 3) 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので確認の上使用してください。
- 電子メス使用時に高周波回路が形成された場合、手袋の電気的絶縁性が損なわれ、火傷を起こす可能性がありますので注意してください。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### 1) 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温や多湿を避けて保管してください。

#### 2) 有効期間

- \*\*○ 使用期限は別途記載しています。  
[自己認証（自社データによる）]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者  
三興化学工業株式会社  
広島県大竹市新町2丁目1番4号  
TEL：0827-52-3111
- 製造業者  
サンケムコーポレーション  
SANCHEM CORPORATION SDN.BHD  
(マレーシア)