



感染対策は手洗いから… 手洗い方法の確認に

# スタンド型 手洗いチェッカー BLB

手洗いチェッカーローションを手についた汚れに見立てて、  
特殊ライト下で光らせます。

きちんと洗えていない部分が光るので、  
適切な手洗いが実施できているのかを  
確認できます。

明るい場所でも  
見やすい!



## 多人数での 手洗い評価に最適です

ライトまわりに囲みのないスタンド  
型なので、多人数で手洗い評価がで  
きます。教育ツールとしても最適です。



洗い残しが  
光ります

## スタンド型 手洗いチェッカーBLB の使用方法

※詳細は使用説明書をご覧ください。



1 手洗いチェッカーローションを  
1プッシュ(約1mL)手に取り、  
まんべんなくぬり広げます。



2 手洗い用石けん液を使って、  
手洗いをし、ペーパータオル  
で水分を拭き取ります。



3 スタンドに手をかざします。



4 洗い残した部分が光ります。  
適切な手洗いができている  
かチェックします。

# セット内容

## スタンド型 手洗いチェッカー-BLB

スタンド型 手洗いチェッカー-BLB 本体 1台



### 専用ローション



医療向け 手洗いチェッカーローション  
250mL×3本

### 手洗い石けん液



手洗い石けん  
シャボネット石鹸液F(医薬部外品)  
500mL×1本

### 手洗手順シール



「正しい手洗手順」シール  
1枚

折りたたみ式で  
コンパクト収納



## 仕様

項目	内容
名称	スタンド型 手洗いチェッカー-BLB
本体外寸	W295mm × D180mm × H200mm(梱包、付属品は除く)
製品質量	約1,050g(梱包、付属品は除く)
材質	本体 …… ABS樹脂
電源	AC100V 50/60Hz 27W
紫外線ランプ電力	27W
紫外線出力	3.8W
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スタンド型 手洗いチェッカー-BLB(1台)</li> <li>● 医療向け 手洗いチェッカーローション(250mL×3本)</li> <li>● 手洗い石けん シャボネット石鹸液F 扁平ポンプ付(500mL×1本)</li> <li>● 「正しい手洗手順」シール(1枚)</li> </ul>

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
スタンド型 手洗いチェッカー-BLB	—	1	41654	49-87696-41652-9
〔単品〕 医療向け 手洗いチェッカーローション 3本入	250mL 3本入	1	41656	—
〔単品〕 手洗い石けん シャボネット石鹸液F 扁平ポンプ付	500mL 扁平ポンプ付	10	23277	49-87696-23277-8



安全にご使用  
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 手洗いチェッカー-BLBをご使用の際は、当社指定の薬剤をご使用ください。  
指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2015年1月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>