


足踏み式ディスペンサー HC-600

取扱説明書

お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

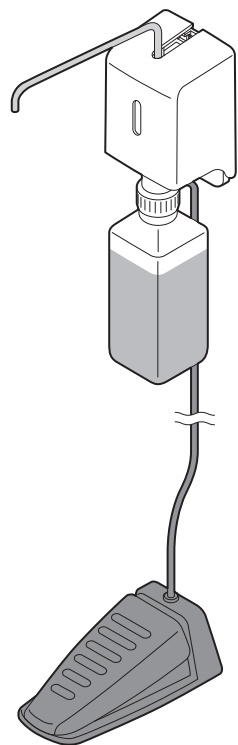

付属品

- ・チューブⒶ(長さ:168mm、直径φ7mm) 1本
- ・チューブⒸ(長さ:168mm、直径φ8.5mm) 1本
- ・ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個) 1セット
- ・火気厳禁ラベル 1枚
- ・ノズル掃除方法ラベル 1枚
- ・取扱説明書 本紙

目次

	ページ
安全上のご注意	1
・取り付け上の注意事項	
・使用上の注意事項	
・移設・修理時の注意事項	
・廃棄時の注意事項	
各部の名称	4
取り付けについて	5
・取り付けに必要な工具	
・取り付け方法	
・ポンプチューブの付け替えについて	
・スクラビンを使用する場合	
・速乾性手指消毒剤を使用する場合	
ご使用方法	11
・薬剤ボトルの装着または交換方法	
・使用方法	
お手入れ方法	12
修理を依頼される前に	12
仕様	13
アフターサービス	14
・アフターサービスについて	
お問い合わせ窓口	裏表紙

お問い合わせ窓口 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
サラヤ株式会社 TEL.06-6797-2525 URL.<http://www.saraya.com/>

電話受付:平日(土日および祝祭日、弊社休日を除く) 9:00~18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。





安全上のご注意

1

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでもご確認いただける場所に保管してください。
本取扱説明書で不明な点は、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）までご連絡ください。

表示の説明

図記号の説明

 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷（※1）などに結びつく可能性があるもの		絶対に行わないでください
 注意	誤った取り扱いをしたときに傷害（※2）、または家屋・家財などの損害（※3）に結びつくもの		必ず指示に従ってください







（※1）重傷とは、失明やケガ、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を要するものをさします。

（※2）傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。


（※3）損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

取り付け上の注意事項

警告

-  仕様で定める規格に従い取り付け、使用する。
規格外での取り付け・使用は、ケガや事故・故障の原因になります。
-  丈夫で凹凸のない壁面に確実に取り付け。
取り付け上の不備があると、落下によるケガや故障の原因になります。
-  丈夫で、段差のない水平な場所に確実に取り付け。
段差がある場所でペダルを踏んだ場合、転倒やケガ・故障・誤作動の原因になります。
-  火気や火花が出る器具の近くには取り付けない。
変形や故障、火災の原因になります。万一に備えて近くに消火器を設置してください。
-  直射日光の当たる場所、高温になる場所には取り付けない。
変形、火災の原因になります。
-  換気が十分に行える場所に設置して換気する。
換気が不十分だと、揮発した薬剤が充満して引火する危険性や気分が悪くなる場合があります。

注意








-  湿気やほこりの多い場所には取り付けない。
故障の原因になります。

安全上のご注意








2

使用上の注意事項

警告

-  火のついたローソクやタバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけない。
変形や火災の原因になります。
-  製品に水をかけない。
故障の原因になります。特にペダルやワイヤに水や薬剤がかからないように注意してください。
-  消毒以外の目的で使用しない。
薬剤で顔や頭などを洗わない。薬剤が目に入ると危険です。
-  アルコール系消毒剤で濡れた手を火気に近づけない。
消毒剤に引火した場合、やけどや火災の原因になります。
-  当社指定の薬剤以外は使用しない。
故障の原因になります。
-  アルコール系消毒剤の霧を吸い込まない。
薬剤中のアルコール成分は、鼻やのどなどの粘膜に刺激があります。
-  薬剤は、その薬剤の「使用上の注意」などをよく読んでから使用する。

注意

-  製品の上に物を置かない。
落下によるケガや故障の原因になります。
-  落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
-  ペダルを乱暴に踏まない。
乱暴に扱うと故障の原因になります。
-  ノズル部を乱暴に回さない。
乱暴に扱うと故障の原因になります。
-  薬剤を装着するときは薬剤がこぼれないように注意する。
薬剤がこぼれた場合はすぐに拭き取る。床面などの変色や、すべて転倒するなどの事故の原因になります。
-  定期点検を行う。
装置の安全および性能を保つため、定期点検と清掃作業を行ってください。
-  長期間使用しないときや保管するときは、本体を拭き、必ず薬剤ボトルを取り外す。
ポンプや薬剤の劣化の原因になります。

移設・修理時の注意事項

警告




絶対に分解・修理・改造は行わない。
ケガや故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店、または当社のお問い合わせ窓口
(裏表紙に記載)にご相談ください。

廃棄時の注意事項

注意



製品を廃棄するときは、各国・地域の法律または規則に従う。

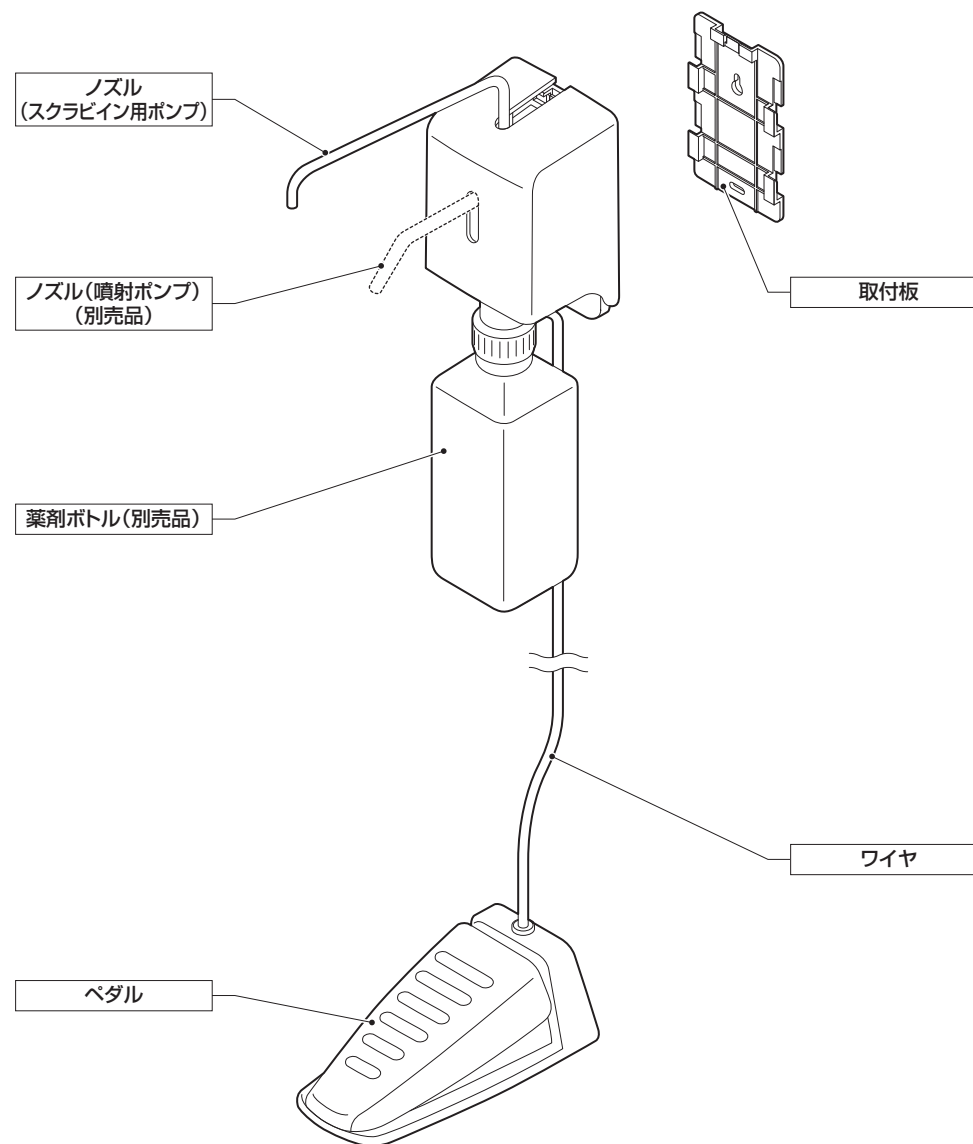

取り付けについて

5

取り付けに必要な工具

- φ6ドリル刃 ●φ2.5ドリル刃 ●電動式ドリル（振動ドリル） ●プラスドライバー
- メジャー、ものさしなど ●ハンマー（樹脂ヘッド）

取り付け方法

【1】設置場所の確認

取り付ける壁とスペースを確認します。

注意



- ワイヤ部分に無理のかからない位置に取り付けてください。
- 丈夫な壁面に取り付けてください。
- 凹凸面には取り付けられません。

【2】取付板の取り付け

- ①寸法図を参考に取り付け位置を決定します。
- ②取付板に合わせて壁面に穴をあけ、付属のねじセット（タッピンねじ2個、プラグ2個）で取付板を固定します。

注意

- 壁面がコンクリートの場合は、振動ドリルなどで穴（φ6mm・深さ30mm～40mm）をあけ、プラグ2個を打ち込み、タッピンねじ2個で固定してください。
- 壁面が木製の場合は、案内穴（φ2.5mm）をあけてから、タッピンねじで固定してください。
- 壁面の強度が弱い（コンパネ[6mm以下]石膏ボードなど）場合は、補強材で補強してからタッピンねじ、もしくはボードに適したねじで固定してください。
- 壁面に穴をあけるときは、他の配管・配線が通っていないことを確認してください。
- 切粉はきれいに取除いてください。

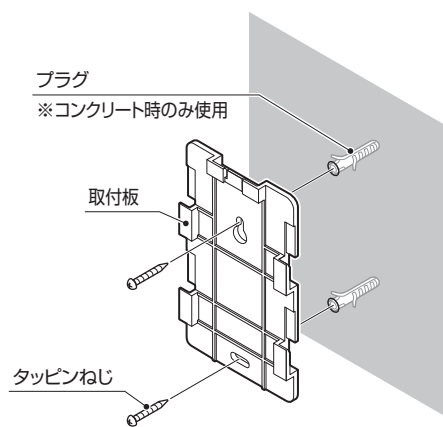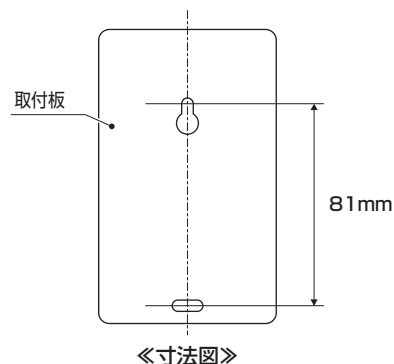


取り付けについて

6


【3】本体の取り付け

本体を取付板に取り付けます。

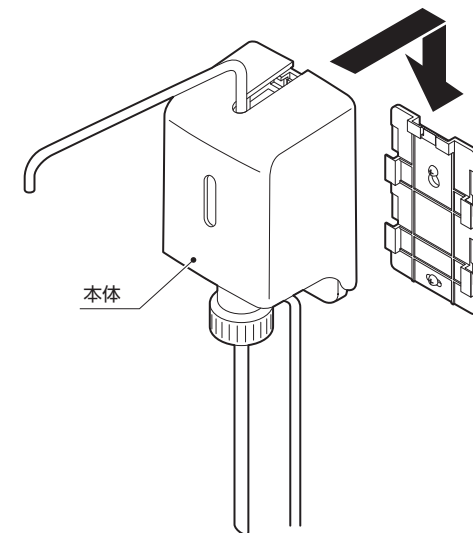

【4】本体の取り外し

- ①カバーとポンプを取り外します。
（8ページ「速乾性手指消毒剤を使用する場合」参照）
- ②右図のように、マイナスドライバーなどを差し込んで取付板のツメを外します。
- ③本体を上へスライドして取り外します。

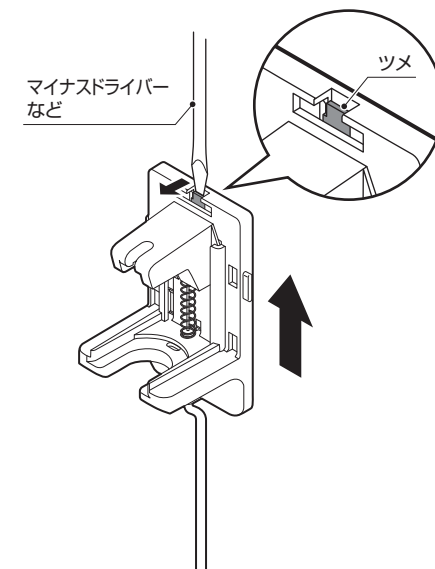

ポンプチューブの付け替えについて

本製品は、使用するポンプと薬剤の容量により、使用するチューブが変わります。(右図)


以下の方法で適切なチューブに付け替えてください。

注意

適切なチューブに付け替えないとボトル内の薬剤を最後まで使用できません。

必ず適切なチューブに付け替えてください。

チューブ① 長さ:184mm 直径:φ7mm
 チューブ② 長さ:168mm 直径:φ7mm
 チューブ③ 長さ:168mm 直径:φ8.5mm

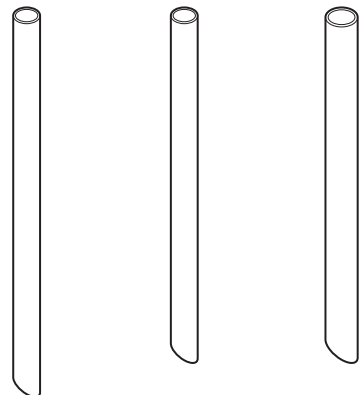


スクラビインを使用する場合

スクラビイン500mLを使用する場合

梱包時はスクラビイン500mLを使用する設定になっています。そのまま使用してください。


※チューブ①(長さ:184mm、直径φ7mm)が取り付けられています。

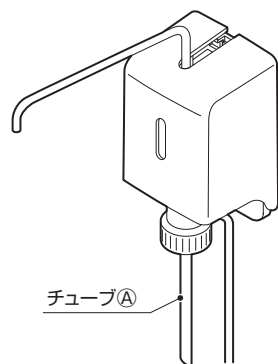

スクラビイン1Lを使用する場合

①スクラビイン用ポンプからチューブ①(長さ:184mm、直径φ7mm)を取り外します。


②チューブ②(長さ:168mm、直径φ7mm)を取り付けます。

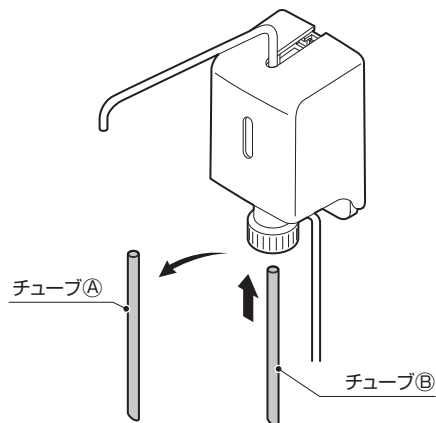

速乾性手指消毒剤を使用する場合


1 カバーの取り外し

カバーを持ち、手前に引くように取り外します。

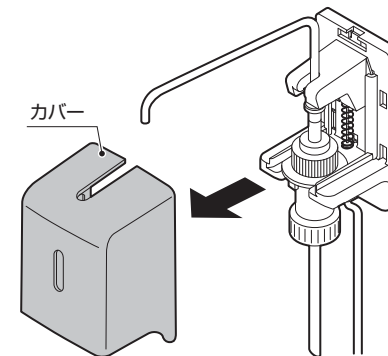


2 ポンプ取付台の取り外し


①図のようにスクラビイン用ポンプを下から押し上げ、ツメを外します。

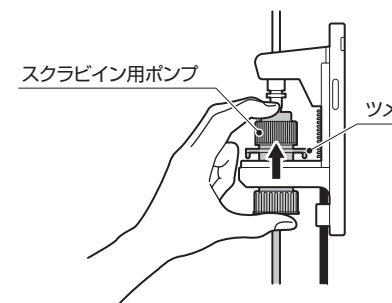

②下部を手前にずらしてスクラビイン用ポンプを取り外します。

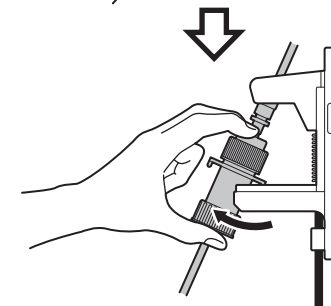

③ポンプ側のキャップをゆるめ、ポンプ取付台を取り外します。

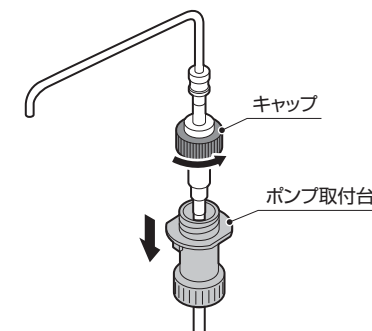


3 チューブの付け替え


①ポンプに付いているチューブを、本製品に付属しているチューブに付け替えます。

※噴射ポンプ（ロングノズル）はチューブ◎（長さ：168mm、直径φ8.5mm）に付け替えます。

※噴射ポンプはチューブⓑ（長さ：168mm、直径φ7mm）に付け替えます。

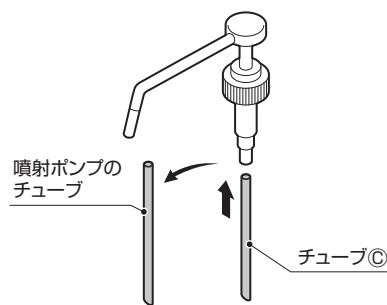

《噴射ポンプ（ロングノズル）》

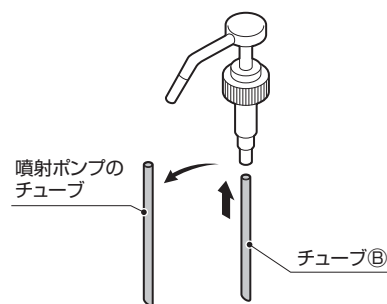


《噴射ポンプ》


②各ポンプにポンプ取付台を取り付け、キャップを締めます。

注意


以下の手順は噴射ポンプ（ロングノズル）、噴射ポンプ共通です。イラストは噴射ポンプ（ロングノズル）で説明しています。

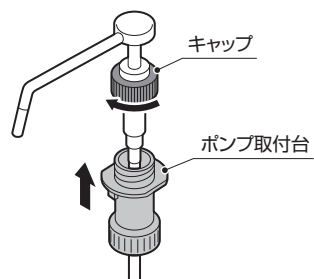

③ポンプ部分を押しさえながら、本体に取り付けます。
※ツメを本体の穴に差し込んでください。

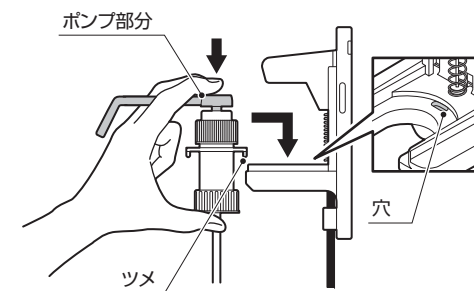


④ポンプ部分を上げます。

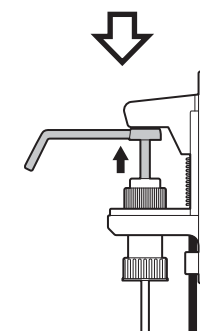

4 カバーの取り付け

ツメをカバーの溝にあわせて取り付けます。

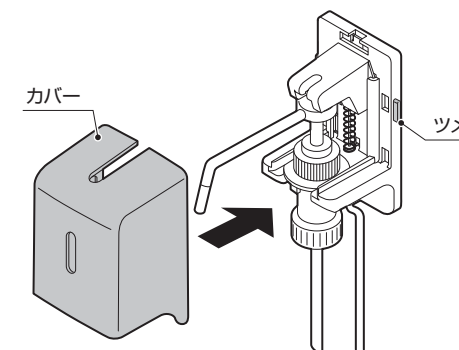

ご使用方法


11

薬剤ボトルの装着または交換方法

- ①薬剤ボトルを取り付けます。
- ②キャップを締めます。

注意

キャップは確実に締め付けてください。
キャップの固定に不備があると、薬剤ボトルが落下する原因になります。

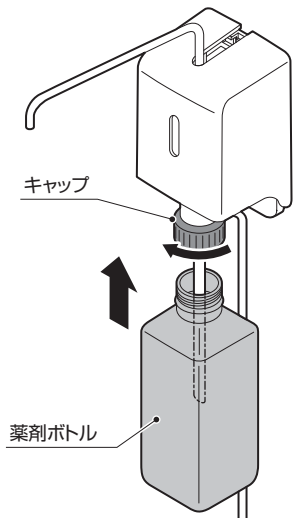


使用方法

ペダルを踏むと薬剤が吐出（噴射）します。

注意

- 薬剤ボトルを装着した直後は、すぐにノズルから薬剤は吐出（噴射）しません。
薬剤が吐出（噴射）するまで、繰り返しペダルを踏んでください。
- ペダルを乱暴に踏まないでください。
必要以上の力で踏むと破損する恐れがあります。
- 薬剤については、薬剤に貼付されている『使用上の注意』などをよく読んでからお使いください。

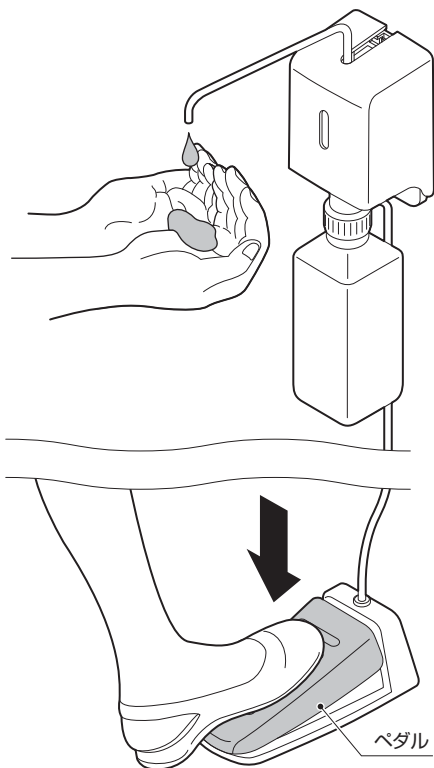

お手入れ方法

12

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。

そのあと、水で濡らしてよく絞った柔らかい布で洗剤を拭き取り、最後に柔らかい布でから拭きしてください。

注意 次のものは使わないでください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど
化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

修理を依頼される前に

故障かな?…と思ったら、まず次のことをお調べください。

症状	調べるところ	ページ
薬剤が吐出（噴射）しない、もしくは異常があるとき	●適切なチューブを取り付けていますか?	7~10
	●薬剤切れではありませんか?	11
	●薬剤ボトルが本体に確実に装着されていますか?	11

以上のことをお調べになり、それでも不具合症状が解消されない場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

項 目	内 容
名 称	足踏み式ディスペンサー
型 式	HC-600
外 形 寸 法	本 体:W92 × D235 × H205 mm ペダル:W100 × D187 × H69 mm
製 品 質 量	約780g (梱包、付属品および薬液は除く)
主 な 材 質	本体・カバー … ABS ノズル … ステンレス (SUS304) ペダル … ABS+PA
ワイヤ長さ	1400mm
使用環境温度	5~40℃ (薬剤に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
使用薬剤 (※)	当社指定の手指用殺菌消毒剤 (スクラビイン)、速乾性手指消毒剤
吐 出 量	スクラビイン:約5mL/回 速乾性手指消毒剤:噴射ポンプ (ロングノズル) …約3mL/回 噴射ポンプ …約1.8mL/回

※ 使用薬剤は、当社指定の薬剤をお使いください。
他社の薬剤を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

アフターサービスについて

●アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口 (裏表紙に記載) にご相談ください。

※故障の場合は、ご購入日、本製品の型式と、できるだけ詳しい故障状態をお知らせください。

●転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口 (裏表紙に記載) にご相談ください。

ご転居先での販売店、もしくは最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。