


サラヤPPEホルダー


取扱説明書

サラヤPPEホルダー 手袋／エプロン用
サラヤPPEホルダー マスク用
サラヤPPEホルダー ガウン用


お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

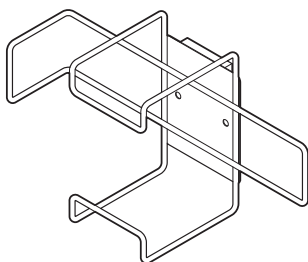

サラヤPPEホルダー 手袋／エプロン用
(W244 × D105 × H141 mm)

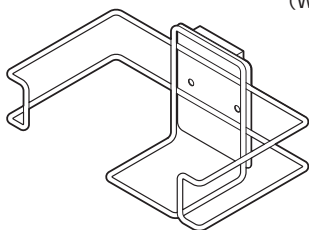

サラヤPPEホルダー マスク用
(W203 × D125 × H104 mm)

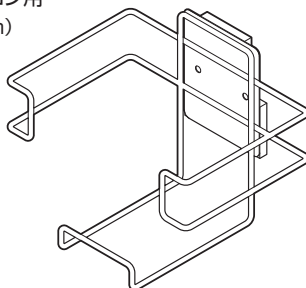

サラヤPPEホルダー ガウン用
(W185 × D137 × H151 mm)

《使用上の注意》

- 本製品は磁石を使用しているため、下記内容に注意してください。
 - 磁石をパソコン・携帯電話・時計等の精密機器・電子機器に近付けないでください。
 - 磁石を心臓ペースメーカー等の医療機器に近付けないでください。
 - 磁石をクレジットカード・キャッシュカード・フロッピーディスク等に近付けないでください。
 - 金属アレルギー体質の方が磁石に触れた場合、肌が荒れたり、赤くなる恐れがあります。このような症状が現れた場合、磁石に触れないでください。
 - 他の物に吸着して（磁石同士の吸着も含む）強い衝撃が加わった場合、磁石が欠ける、割れる、表面処理が剥がれる、離せなくなるなどの可能性があります。
- 安易に放置すると、周囲の磁石製品や金属を勢いよく引き寄せられる恐れがあります。
- ホルダーを磁石で吸着する物体に近づけた場合、間に指などを入れないでください。
- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
- その他ご不明の点はお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏面に記載）にご相談ください。

取付方法

【取り付け】

ホルダーを壁面に取り付けます。

※イラストはサラヤPPEホルダー手袋／エプロン用で説明しています。他の2種も同様に付けてください。

注意



- 鉄製の壁面へ取り付けてください。
- 凹凸面やザラザラした壁面には取り付けられません。各種PPE製品を取り出すときにホルダーごと外れたりずれたりするとホルダーが落下し、事故や破損の原因になります。
- ホルダーを確実に取り付けができない場合は、サラヤPPEホルダー取付ボード（別売品）を設置して取り付けてください。

【取り外し】


ホルダーを取り外す際は、右図のように片方を引いて、ホルダーの設置面（磁石）を浮かせてから取り外します。

注意


- 壁面よりホルダーを取り外すときは勢いよく引っ張らないでください。
- ホルダーの移動や方向を変える場合は、壁面またはボードよりホルダーを一度取り外し、再度取り付けてください。壁面上またはボード上を滑らすと、壁面またはボードを傷付ける恐れがあります。

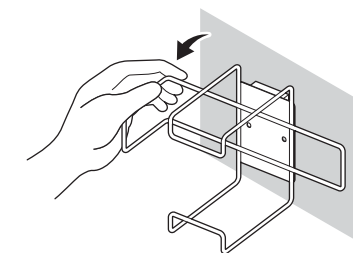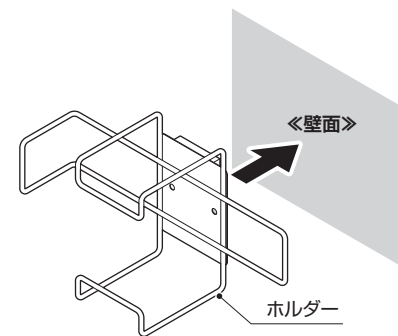

サラヤPPEホルダー 手袋／エプロン用

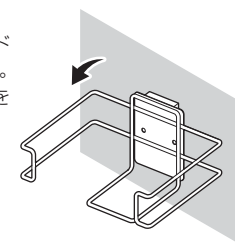

サラヤPPEホルダー マスク用

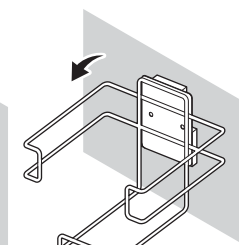


サラヤPPEホルダー ガウン用

使用方法

PPE製品（別売品）をホルダーに装着し、使用します。

注意

- PPE製品は無理に引っ張らず、手を添えてゆっくり取り出してください。
- 当社指定のPPE製品以外は使用しないでください。ホルダーが落下し、事故や破損の原因になります。

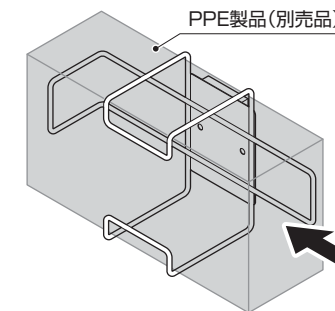

SARAYA

サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525