

サラヤ針捨て BOX 3.2L 回転タイプ° 取扱説明書

2026 年 2 月 第 2 版

① フタの取り付けについて

- イ) 写真 1 のようにフタのツメ 4 か所と本体の角 4 か所を合わせるようにセットします。
その際、本体はラベルを貼り付けている面を正面にして、フタは回転部がある方を正面に、
組み立ててください。
- ロ) フタのツメを本体の角に 1 か所ずつ、はめ込みます。

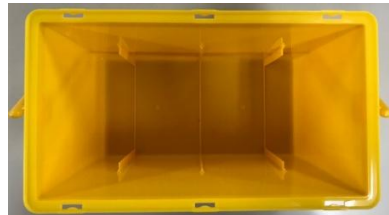


写真 1

② フタのはめ込み方法

- イ) 写真 2 のように、1 か所から順に、はめ込みます。
- ロ) はめ込む際、両手でフタを押さえ、本体の縁を握るように
力を加えて「カチッ」と音が鳴るまで
確実に押し込みます。



写真 2

③ はめ込みが終われば、残りのツメも同じ要領で 行ってください。

④ 最後に、全てのツメがしっかりと本体にはまっているか、 ご確認のうえご使用ください。

※ 安全にご使用いただくために針捨て BOX をご使用にならない
際は、仮フタは極力閉めてご使用ください。

※ 廃棄の際は、回転部の両側を強く押し込み、確実に封がされている
ことをご確認のうえ、医療廃棄物として BOX ごと廃棄してください
(写真 3)。



写真 3

※耐荷重：2.0kg

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)