

サラヤ針捨て BOX 3.2L 取扱説明書

2026 年 2 月 第 4 版

① フタの取り付けについて

イ) フタのツメ 4 か所と本体の角 4 か所を合わせるようにセットします。(写真 1)

その際、本体はラベルを貼り付けている面を正面にして、フタは仮フタロック用のツメがある方を正面に、組み立ててください。

ロ) フタのツメを本体の角に 1 か所ずつ、はめ込みます。

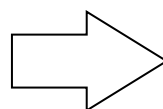


写真 1

② フタのはめ込み方法

イ) 1 か所から順に、はめ込みます。(写真 2)

ロ) はめ込む際、両手でフタを押さえ、本体の縁を握るように力を加えて「カチッ」と音が鳴るまで確実に押し込みます。

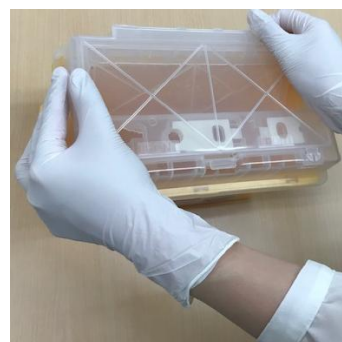


写真 2

③ はめ込みが終われば、残りのツメも同じ要領で行ってください。

④ 最後に、全てのツメがしっかりと本体にはまっているか、ご確認のうえご使用ください。

※ 安全にご使用いただくために針捨て BOX をご使用にならない際は、仮フタは極力閉めてご使用ください。

※ 廃棄の際は、完全ロック用のツメ（黒丸部分）を折り曲げ、完全ロック用の溝に差込み、確実に封がされていることをご確認のうえ、医療廃棄物として BOX ごと廃棄してください（写真 3）。

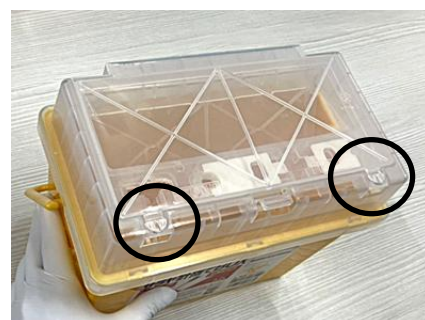


写真 3

※耐荷重：2.0kg

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)